

 **Netti® III XHD**

 **Netti® III XXHD**

GMDN 41620 EMDN Y122103 og Y122106

Brugermanual

 Dette produkt er i overensstemmelse med
MDR regulativ
(EF) 2017/745 for medicinske produkter.

UM0106DK 2023-06

*inspire
joy of life*

INDHOLD

1. INDLEDNING	4
1.1 ANVENDELSESOMRÅDER/INDIKATIONER FOR NETTI III XHD OG NETTI III XXHD	5
1.2 KONTRAINDIKATIONER	5
1.3 KVALITET OG HOLDBARHED	5
1.4 MILJØ OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD	6
1.5 OPLYSNINGER OM GENBRUG	6
1.6 OM DENNE VEJLEDNING	7
1.7 VITALE FORANSTALTNINGER	7
2. HURTIG REFERENCE	9
3. BESKRIVELSE*	10
4. EGENSKABER FOR NETTI III XHD & NETTI III XXHD	11
5. TILBEHØR	12
5.1 MONTERING AF HOFTESELE	15
5.2 MONTERING AF H-BÆLTESTANG	15
6. MONTERING OG JUSTERING	16
6.1 UDPAKNING (SE KAPITEL 5 OG 6)	16
6.2 DRIVHJUL	16
6.3 FORGAFLER	16
6.4 FORHJUL	17
6.5 SÆDEHØJDE FORAN	17
6.6 SÆDEHØJDE BAGEST	18
6.7 RYGLÆN	18
6.8 JUSTERING AF SÆDEDYBDEN	19
6.9 JUSTERING AF SÆDEDYBDEN FORAN	20
6.10 ANTI-TIP	21
6.11 JUSTERING AF ARMSTØTTER	21
6.12 PUDER	22
6.13 JUSTERING AF VELCROEN TILBAGE	22
6.14 BENSTØTTE	23
6.15 HOVEDSTØTTE	26
6.16 SKUBBEHÅNDTAG	28
6.17 JUSTERING AF BREMSERNE	28
7. SÆDEVINKEL / HÆLDNING OG RYGVINKEL / LÆNE SIG TILBAGE	30
7.1 SÆDEVINKEL	30
7.2 VINKEL AF RYGLÆN	30
7.3 NØGLEORD FOR VIPNING OG HÆLDNING AF STATISKE COMFORT KØRESTOLE	30
7.4 REDUCER MULIGHEDEN FOR AT GLIDE -, KLIPPE- OG TRYKSÅR:	31
7.5 BETJENING AF VIPPEHÅNDTAG: TILT AF SÆDEENHED	31
7.6 BETJENING LÆNEHÅNDTAG: LÆNE STOLEN TILBAGE	32

8. TRANSPORT	33
8.1 TRANSPORT I BIL	33
8.2 SAMMENKLAPNING TIL TRANSPORT	35
8.3 TRANSPORT PÅ FLY	35
8.4 REJSE MED OFFENTLIG TRANSPORT	35
9. KØRSEL	36
9.1 GENERELLE TEKNIKKER	36
9.2 KØRSEL TEKNIKKER – OP AD TRIN –	37
9.3 KØRSEL TEKNIKKER – TRIN NED –	37
9.4 KØRSEL TEKNIKKER – HÆLDNING –	38
9.5 KØRSEL TEKNIKKER – OP AD TRAPPER –	38
9.6 KØRSEL TEKNIKKER – NEDAD TRAPPER –	39
9.7 OVERFØRSEL	39
9.8 BALANCEPUNKT	40
9.9 LØFT AF KØRESTOLEN	41
10. VEDLIGEHOLDELSE	42
10.1 MEDLIGEHOLDELSE	42
10.2 RENGØRING OG VASK	42
10.3 LANGTIDSOPBEVARING	43
11. FEJLFINDING	44
12. TEST & GARANTI	45
12.1 TESTS	45
12.2 GARANTI	45
12.3 GARANTIKRAV	45
12.4 NETTI CUSTOMIZED / INDIVIDUELLE TILPASNINGER	46
12.5 KOMBINATIONER MED ANDRE PRODUKTER	46
12.6 SERVICE OG REPARATION	46
13. DIMENSIONER & VÆGT	47

1. INDLEDNING



Netti III XHD XXHD er komfortkørestole beregnet til både indendørs og udendørs brug. De er testet i henhold til EN 12183:2014. Tests er udført af TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland.

I Alu Rehab mener vi, at kørestole skal vælges ud fra en grundig vurdering med fokus på brugernes behov og miljøkrav.

Det er derfor vigtigt at kende til kørestolens muligheder og begrænsninger. Netti III XHD og XXHD er kørestole designet til brugere med behov for komfort og lindring. Kombinationen mellem siddesystemet og de ergonomiske løsninger i rammekonstruktionen giver mange muligheder for tilpasning og justeringer og muligheder for at variere siddepositionen fra aktivitet til hvile ved hjælp af vippe- og lænefunktioner.

Netti III XHD og XXHD fås i 2 versioner:

Netti III XHD sædebredder:	500 – 600 mm
Netti III XXHD sædebredder:	650 – 750 mm

Maks. brugervægt: 200 kg.



Ved montering af tilbehør som f.eks. powerkit etc. skal vægten af tilbehøret trækkes fra den maksimale brugervægt.



Netti III HD - er kollisionstestet med maks. brugervægt 160 kg. Netti III XHD og XXHD er forstærkede konfigurationer af Netti III HD og godkendt til brug som sæde i bil med en maks. brugervægt på 160 kg.



Specifikationer kan variere mellem lande.

1.1 ANVENDELSESOMRÅDER/ INDIKATIONER FOR NETTI III XHD OG NETTI III XXHD

Netti III XHD og XXHD er multifunktionelle kørestole til transport på hjul til helt eller delvis ubevægelige personer med fysiske og/eller psykiske handicap. Den giver et middel, hvormed en handicappet person, der kræver muligheden for at variere siddepositionen fra aktivitet til hvile, vil drage fordel af at bruge tilt- og lænefunktioner. Den er designet til brugere med behov for komfort og lindring. Kombinationen mellem siddesystemet og den ergonomiske løsning i rammekonstruktionen giver mange muligheder for tilpasning og justeringer.

Disse handicap kan have forskellige årsager. Netti III XHD og XXHD har en justerbar sæde- og rygvinkel, hvilket letter brugeren ændring af position, mobilisering eller korrektion af kropsholdningen (stabilisering), hvor følgende funktionelle hindringer med deres flere mulige årsager er til rådighed:

- begrænset eller manglende mobilitet
- begrænset eller manglende muskelkraft
- begrænset bevægelsesomfang
- manglende eller begrænset ryg- og kropsstabilitet
- høj brugervægt, hård anvendelse
- hemiplegi
- reumatiske lidelser
- kraniocerebrale skader, ukontrollerede bevægelser
- amputationer
- andre neurologiske eller geriatriske lidelser.



Hvis vores standardløsninger ikke dækker dine behov, bedes du kontakte vores kundeservice for tilpassede løsninger fra Netti.

1.2 KONTRAINDIKATIONER

Med stærk muskuløs spasticitet og ufrivillige bevægelser anbefaler vi Netti Dynamic System, som tilbyder en rammekonstruktion, der følger brugerens bevægelsesmønstre.

At ignorere dette råd kan under ugunstige omstændigheder føre til deformation eller brud på metaldele i området af rygrøret, benstøtterne eller armlænene.

1.3 KVALITET OG HOLDBARHED

Netti III kørestolen er testet ved TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland, efter den europæiske DIN EN 12183:2014 standard.



Som producent vurderer Alu Rehab A.S. at testen svarer til 5–6 års normal brug af stolen. Brugerens funktionsnedsættelse, robustheden i anvendelsen, samt det udførte niveau af vedligeholdelse bestemmer rullestolens holdbarhed. Således vil holdbarheden variere afhængigt af disse tre faktorer.

1.4 MILJØ OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD



Alu Rehab og dets leverandører ønsker at beskytte miljøet.

Dette betyder:

- At vi i videst muligt omfang undgår at anvende miljøskadelige stoffer og processer.
- At Alu Rehab's produkter sikres en lang levetid og en høj grad af fleksibilitet - til gavn for miljøet og økonomien.
- At al emballage kan genindvindes.
- At kørestolen er designet til at blive adskilt i sine komponenter af materialer - for at gøre genbrug lettere.



Kontakt dit lokale genbrugscenter for at få korrekte oplysninger om, hvordan du håndterer affald i dit område.



TEMPERATUROMRÅDE

Netti III kørestol er designet til temperaturområde fra -10 °C til +40 °C

1.5 OPLYSNINGER OM GENBRUG

Alle produkter fra Alu Rehab er designet til årevis af vedligeholdelsesfri drift. Alle produkter kan tilpasses til genbrug af en autoriseret forhandler. For at kunne garantere ydelsen og sikkerheden, anbefaler Alu Rehab de følgende tests inden genanvendelse.

Undersøg venligst følgende komponenter til funktion, integritet osv. og udskift dele om nødvendigt:

- Hjul (dæk slidbane)
- Kørestol ramme
- Forreste hjul og lynkobling
- Nav
- Bremsfunktion
- Retningsstabilitet af hjul
- Lejer: Test for slid og smøring.
- Puder
- Benstøtter
- Armstøtter
- Læne/vippe funktion
- Skubbebjælke/håndtag
- Anti tip

Af hygiejniske årsager udskiftes hovedstøtten for en ny bruger.

Bemærk også indholdet i afsnit 10.2 Rengøring og pleje.

ANTI TIP

Korrekt monteret, vil anti-tip sikre stolen fra at vippe baglæns.

Vi anbefaler kraftigt at anti-tips anvendes.

Seneste opdateringer af brugervejledninger, bemærkninger til produkters sikkerhed, adresser og anden produktinformation som tilbagekaldelse osv. vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

1.6 OM DENNE VEJLEDNING

For at undgå skader, mens du bruger Netti III XHD eller XXHD kørestolen, skal du læse denne brugervejledning omhyggeligt, før du begynder at anvende stolen.



Symbol for forbudte handlinger.
Der kan ikke kræves nogen garanti, når disse handlinger gennemføres.



Symbol på advarsel.
Når dette symbol bruges, skal der udvises forsigtighed.



Symbol for vigtige oplysninger.



Symbol for nyttige tips.



Symbol for værktøjer.



Symbol for:
Maksimal sikker hældning for håndbremse.



Symbol for: Maksimal brugervægt.



Symbol for medicinsk udstyr



Producent: navn + adresse



Produktionsdato.



Produktets serienummer



Læs instruktioner



Bemærk venligst, at denne vejledning opdateres i henhold til det år og den dato, der er angivet på hver side.

Brugermanual på nettet

For forbedret læsbarhed (fordelagtigt for brugere med udfordringer på synet), kan du finde vores brugermanual på vores hjemmeside: www.My-Netti.dk - manualer - brugervejledning Netti III XHD og XXHD.

1.7 VITALE FORANSTALTNINGER

Netti III XHD og XXHD er komfortable kørestole designet til både udendørs og indendørs brug.



Specifikationer kan variere mellem lande.

TOTALVÆGT: 35 KG
(500 mm bred stol)


SÆDEBREDDE:
Netti XHD: 500, 550, 600,
Netti XXHD: 650, 700, 750 mm



SÆDEDYBDE:
(Fra ryglæn pude til forsiden af sædeplade)
400, 425, 450, 475, 500 mm



SÆDEHØJDE:
(Fra gulv til øverste sædeplade ved hjælp af 24" hovedhjul i øverste hulposition).
440 mm*

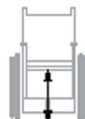

* Ved at ændre placeringen af hovedhjulene, er det muligt at opnå en sædehøjde på 475 mm. Andre siddehøjder kan nås ved at ændre hjulets dimensioner.

RYGLÆNSHØJDE:
500 mm*



* Brug af ryglænsforlænger giver 600 mm inklusive rygpude.

** For Netti III XHD & XXHD med sædebredde 500 mm er totalbredden 240 mm mere. Den totale bredde overstiger de anbefalede 700 mm.

*** Mindst stabile og mest stabile refererer til placeringen af anti-tippers. Brug altid anti-tippers, når der kører op ad bakke.



Netti III XHD og XXHD med sædebredde på 500 mm og derover overstiger den samlede bredde de anbefalede 700 mm.

Specifikation	min.	max.
Samlet længde med benstøtte - vandret sæde. (Sæde + ryg vippes maks. fremad. Ben understøtter lodret)	1030 mm (955 mm)	1030
Samlet bredde **	740 mm	990
Sammenfoldet længde	780 mm	780
Sammenfoldet bredde (uden hjul)	710 mm	960
Foldet højde (uden hjul, puder, arm -, hoved - + benstøtte)	520 mm	520
Totalvægt	36,0 kg	42,0 kg
Masse tungeste del: ramme	17,0 kg	25,0 kg
Masse tungeste komponent: benstøtte	3,8 kg	4,0 kg
Statisk stabilitet ned ad bakke		13 °
Statisk stabilitet op ad bakke***	8°	15°
Statisk stabilitet sidelæns	15°	15°
Sikker hældning, brug anti-tipper		10°
Sædeplansvinkel	-9 °	16 °
Effektive sædedybde	400 mm	500 mm
Effektive sædebredde	460 mm	710 mm
Komfortsæde overflade højde foran	440 mm	475 mm
Ryglænsvinkel	86°	133°
Højde af ryglæn uden pude	490 mm	590 mm
Benstøtte til sædeafstand	280 mm	560 mm
Ben til sædeoverflade vinkel	105°	182°
Armstøtte til sæde afstand	185 mm	325 mm
Forreste placering af armstøttestruktur	300 mm	430 mm
Skubbefælg diameter	535 mm	535 mm
Horisontal akselplacering	-10 mm	95 mm
Parkeringsbremse maks. hældning	–	7°
Mindste venderadius, lodrette benstøtter	R 700 mm	825 mm

Model med 24 " hovedhjul. Målt uden puder.

2. HURTIG REFERENCE

Indholdet på denne side er en oversigt over hele manualen. Den giver dig en kort introduktion til brug og pleje af **Netti III XHD og XXHD** kørestolen.

 **Den hurtige reference er ikke en erstatning for manualen, kun en påmindelse/tjekliste.**

- Udpakning af kørestolen (Kapitel 6.1).
- Montering af hovedhjul (Kapitel 6.2).
- Montering af forhjul (Kapitel 6.4).
- Læn ryglænet tilbage og monter gasfjeder for tilbagelæning på ryglænet med låsebolte. (Kapitel 6.7).
- Montering af armstøtte (Kapitel 6.11).
- Monter puderne (Kapitel 6.12).
- Monter benstøtterne (Kapitel 6.14).
- Juster skubbehåndtagene (Kapitel 6.16).
- Montering af hovedstøtte (Kapitel 6.15).
- Placering af anti-tip i aktiv position (Kapitel 6.10)
- Tilbehør til montering (se kapitel 5. for mere information). Monteringsbeskrivelser vil følge tilbehøret.).

 **JUSTER KØRESTOLEN EFTER BRUGEREN:**

Juster sædedybden og til sidst kørestolsbalancen, benstøttehøjde, armlænsenhøjde, hovedstøttehøjde og dybde, stolens rygpudehøjde.

For yderligere information om tilpasning af kørestolen til brugeren henvises til:
www.My-Netti.dk viden og værktøjer.

 **Produktkonfigurationen kan variere mellem forskellige lande. Illustrationer kan afvige fra det leverede produkt.**

 **For fejlfinding, se kapitel 11.
For justeringer se kapitel 6.**

 **Meddelelser om produktsikkerhed og til sidst produktindkaldelser vil blive offentliggjort på vores hjemmeside www.My-Netti.dk**

 **For synshandicappede kan manualer og kataloger hentes på www.My-Netti.dk**

 **Kør forsigtigt! Manøvrering af kørestolen kan være en udfordring grundet størrelsen på stolen og den maksimale belastning. Kørsel ned af hældninger skal ske med stor forsigtighed.**

 **Anti-tips skal altid bruges for brugerens sikkerhed.**

 **Bremser skal altid benyttes når brugeren efterlades i bagud hældet position.**

 **Sørg for at låse grebene korrekt.**

 **Stå aldrig på fodpladerne på grund af risiko for at vippe fremad.**

 **Løft aldrig kørestolen ved hjælp af benstøtter, armstøtter eller hovedstøtte.**

 **Vær opmærksom på fare for klemning ved sammenklapning og udklapning, vipning, tilbagelæning og alle andre justeringsbevægelser.**

 **Vær opmærksom på, at friktion mod skubfælge kan skabe en varm overflade.**

 **Overfladetemperatur af metaldele i rammestrukturen kan stige, når de udsættes for direkte sollys.**

 **Saltvand kan øge risikoen for korrosion yderligere foranstaltninger relateret til miljøet er ikke påkrævet.**


 **Hvis der er monteret elektriske funktioner:
Oplad batteriet dagligt.**

 **Hvis stolen har luftfyldte dæk:
Check dæktrykket hver uge og pump 24" op til 45 PSI, og 7" til 36 PSI**

 **Hvis du er i tvivl - bedes du kontakte din forhandler!**

3. BESKRIVELSE*

1. Hovedstøtte
2. Ryglæn pude - model Stabil
3. Armstøtte med pude
4. Sædepude
5. Knæpude
6. Lårstøttebeslag
7. Lejehus/fastgørelse af forgaffel
8. Lynkobling til forgaffel
9. Forgaffel
10. Forhjul
11. Fodpladelås
12. Fodplade
13. Lårstøtte
14. Skruer til justering af vinkel
15. Skruer til justering af højde
16. Knop til justering af vinkel
18. Anti tip
19. Bremse
20. Aksel til lynkobling
21. Skubbering
22. Hovedhjul
23. Navneskilt kørestol på nedre ryg tværstang.
24. Slip håndtag til armstøtte
25. Udløsergreb til skubbehåndtags højdejustering
26. Skubbehåndtag

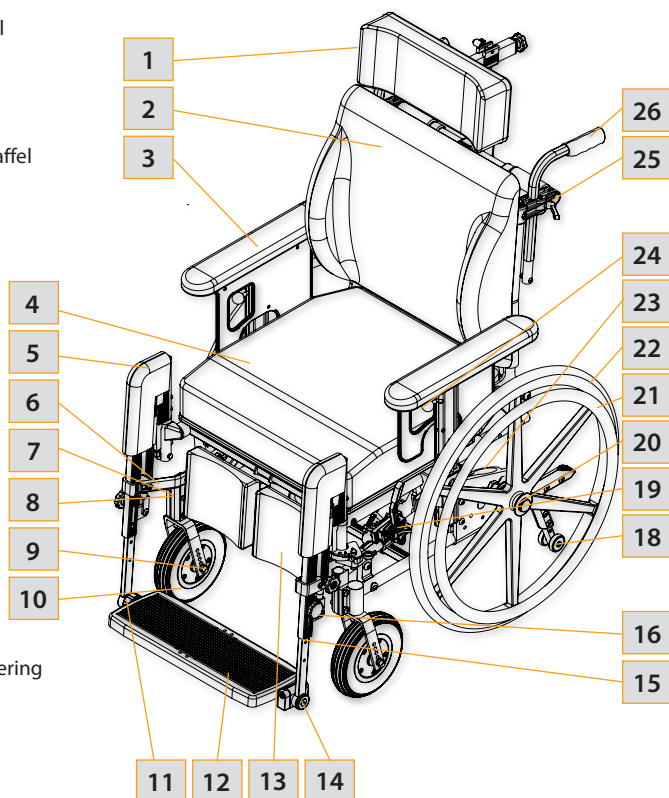

* Vær opmærksom på, at specifikationerne kan variere fra land til land.



Hvis nogen af disse dele mangler bedes du kontakte forhandleren.



For fuldstændig information, kontakt venligst din forhandler.

4. EGENSKABER FOR NETTI III XHD & NETTI III XXHD

STANDARD

SÆDE – NETTI SIDDEPUDE

- Forstæket fast sædeplade.
- Pude med gode egenskaber for fordeling af tryk
- Vipning -9° til +16°
- Dobbelte gasfjedre for sædevipning
- Justerbar højde 400 mm til 485 mm ved ændring af hjulstørrelse og position
- Justerbar dybde op til 100 mm

HJUL*

- 24 " x 1 3/8 " Punkteringssikre forstærkede hovedhjul med lynkoblingsaksel
- Skubbefølg: Aluminium integreret i hjulfælg
- 8 " punkteringsfrie forreste hjul med forstærket 15 mm lynkoblingsaksel

RAMME – Stål tværstivere

SKUBBEHÅNDTAG

- Højdejusterbar, svingbar, aftagelig.

BREMSER - bruger bremsér

ANTI TIP

- Højde og længde justerbar - svingbare

RYGLÆN –NETTI STABIL PUDE

- Vinkel: 86° – 133°
- Højde: 500 mm
- Forstærket ryglænsbhængsel
- Ryglæns pude med integreret lændestøtte og sidestøtte, højdejusterbar
- Højdejusterbare, aftagelige skubbehåndtag.
- Dobbelte gasfjedre for rygvipning.

BENSTØTTE – NETTI GRANDIS

- Fodplade m. låsebolt fra 650 mm
- Forstærkede forlængelser
- Højde - og vinkeljusterbare fodplader med lægstøtte og knæpolstring.

ARMSTØTTE

- 80 mm bred armstøtte, dybdejusterbar.
- Højdejusterbar og aftagelig
- Forstærkede armstøttebeslag

HOVEDSTØTTE

- Højde-, dybde- og vinkeljusterbar
- Stabilisator for hovedstøtte

EKSTRAUDSTYR / TILBEHØR

SÆDE

- Diverse modeller af sædepuder
- Universalbakker (se kapitel 5)
- Hofseseler og 4 punktseler (se kapitel 5)

HJUL

- 12 1/2" hovedhjul med tromlebremse
- Egerbeskyttere (Se kapitel 5)

BREMSER –tromlebremsér

RYGLÆN

- Ryglænsforlænger (se kapitel 5)
- Lændestøtte og kile (se kapitel 5)
- Ryglæn puder - forskellige modeller

LEG SUPPORT

- Netti Dynamic vinkeljusterbar – DUAL
- Amputationsstøtte
- Knæ - og lårstøtte (se kapitel 5).

ARMSTØTTE

- Forskellige puder (se kapitel 5)
- Hemi armlæn og Hemi pude (se kapitel 5)

HOVEDSTØTTE

- Netti Dynamic hovedstøtte
- Forskellige modeller (se kapitel 5)

5. TILBEHØR

i Det til alle tider opdaterede, komplette tilbehørsprogram findes på vores hjemmeside: www.My-Netti.dk – bestillingsformularer.

i Ikke alt tilbehør er tilgængeligt for alle kørestolskonfigurationer. Se website eller bed kundeservice om yderligere oplysninger.

SELER

Flere modeller:
Hoftebælter med eller uden polstring og med plastlås eller billås. (Kapitel 5.1 for montering.)



H - BÆLTE

FASTGØRELSESSTANG

Monteres på separate stænger eller på skubbehåndtagene. Leveres i to størrelser med teleskopstang. (Se kapitel 5,2)



BAKKER

Flere modeller:
Svingbar, aflåselig og standard "tryk på" model.



POLSTRING FOR BAKKE

Giver en blød base til armen, der hviler på bakken.



KILE

Øger sidestøtte.



LÆNDESTØTTE

Øger lumbal krumning.



PUDER

SÆDEPUDER

Mange at vælge mellem. Kontakt venligst din forhandler.



RYGLÆN PUDER

Mange at vælge mellem. Kontakt venligst din forhandler.



EGERBESKYTTERE

Til 20 ", 22 " og 24 ". Sort eller gennemsigtig er valgfri.



BENSTØTTER

FODBOKS NETTI GRANDIS

Upolstret



GRANDIS BENSTØTTE

Fra sædebredde 600 mm kan den leveres med enkelt fodplade og låsning i en side.



NETTI DYNAMIC ANGLE

Justerbar benstøtte DUAL



AMPUTATIONSSTØTTE



BREMSEFORLÆNGER

90 mm
120 mm
250 mm



POLSTRING TIL LÆGSTØTTE BESLAG

Reducerer tryk.



KNÆ / LÅR STØTTE

Støtten reducerer adduktion.



GLIDEBLOK

Blokken reducerer adduktion.

Lille: 80 mm bredde

Medium 110 mm bredde


Large: 140 mm bred



HOVEDSTØTTER

Støtte A

Sidestøtte fås også med panderem.

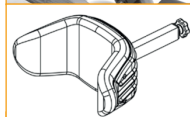


Støtte B

Lille




Støtte C

Stor

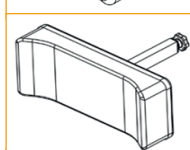


Støtte D

komfort fordeling af tryk

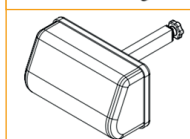


Støtte E

justerbare sidestøtter

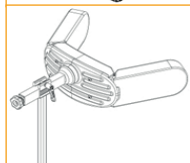

Støtte F

med kind / hage støtterem

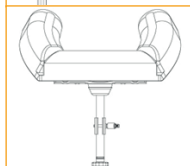

HYGIEJNE DÆKNING

Beskytter kernen i hovedstøtten.



HOVEDPUDE

400 x 400 mm pude med

Kospoflex fyld og gummi.



KOMFORT HOVEDPUDE

Pude med Kospoflex - fyldning til at trække på hovedstøtten.



RYGLÆNSFORLÆNGELSE

120 mm forlængelse.

Anvendes sammen med 600 mm ryglæns pude. Når du bruger Netti III med sædebredder 500 mm og mere som sæde i bilen, anbefales ryglænsforlænger og påkrævet hovedstøtte.



ARMSTØTTEPUDER

Bredde: 415 x 80 mm

Lang: 445 x 70 mm

Lang/Bred: 525 x 80 mm

Kort: 333 x 58 mm

Standard: 385 x 58 mm

Armstøttepude bøjet



HEMI ARMSTØTTE

Tilbyder ekstra støtte til den berørte arm. Kan indstilles i faste positioner.



HEMI PUDE

En mere imødekommende støtte end hemi armstøtten.



KOMFORTPUDER

Skal fastgøres til skørtbeskytteren. Tilbyder en trykfordelende effekt. 25 mm, 35 mm og 45 mm.



FODPLADE MED LÅS

Benstøtterne kan svinges til siden ligesom standard benstøtter.



STABIL SIDESTØTTE

Beregnet til brugere med nedsat stabilitet i den øverste torso. For optimal funktion brug sammen med flip ryglæn.



PUDE FOR SIDESTØTTE



LANGT RYGLÆN HÆNGSEL

Dækker sædedybde: 545, 570 and 590 mm. Skal anvendes med ekstra langt låsehoved.



EL. KOMPONENTER

Til hældning, ryglæn og benstøtter, separat eller komplet. Se venligst Netti III El med maks. sædebredde 600 mm på My-Netti.dk for detaljerede oplysninger.



RAMMEFORLÆNGER

Øger afstanden mellem hovedhjul og forreste hjul. Reducerer risiko for væltning.



VÆRKTØJSSÆT



5.1 MONTERING AF HOFTESELE

Se venligst www.My-Netti.dk for løbende opdateret overblik over bæltet og seler samt monteringsvejledning.


- Træk selen gennem hullet i hofteseleseslaget.



- Træk selen tilbage gennem bæltespændet.



- Fastgør hofteseleseslaget til det bageste hul i det bageste hængsel ved hjælp af de medfølgende skruer og møtrikker.

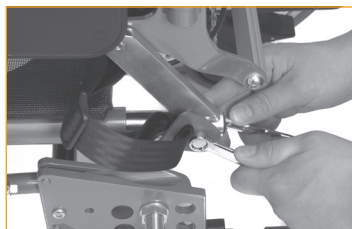

2 stk 13 mm skruenøgle.

5.2 MONTERING AF H-BÆLTESTANG

- Se separat beskrivelse for montering af MD0074 seleadaptersæt.
- Fastgør skubbehåndtagene i korrekt position og lås fast. Fastgør derefter stangen i den rigtige position / højde. Højden skal være i niveau med brugerens skuldre.



- Træk bæltet gennem rullerne, og lås bæltet ved at trække bæltet gennem båndklemmen. Juster til den ønskede længde af bæltet.



6. MONTERING OG JUSTERING



6.1 UDPAKNING (SE KAPITEL 5 OG 6)

1. Pak alle dele ud, og kontroller, at alt er der i henhold til pakkelisten.
2. Monter hovedhjul og forreste hjul.
3. Monter ryglæn, armstøtter, puder og benstøtter.
4. Monter tilbehør.

Vægt af komponenter (450 mm stolebredde):

Drivhjul:	1,90 kg hver
Forhjul:	0,80 kg hver
Benstøtte Grandis:	2,60 kg hver
Stabil Ryg:	1,35 kg
Netti Sit:	1,00 kg
Hovedstøtte A:	1,00 kg
Hovedstøtte B:	0,90 kg
Armstøtte	1,10 kg hver

Nødvendige værktøjer er beskrevet under hvert kapitel. Tilbehør beskrevet i kapitel 5 er en præsentation af muligheder og leveres med separate beskrivelser for montering.

Når siddepladser og hjulindstillinger udføres i de mulige positioner med standardudstyr, vil justeringerne ikke overstige sikre grænser.

6.2 DRIVHJUL

For at montere drivhjulet skal du fjerne lynkoblingsbolten fra navbøsningen, føre den gennem midten af hovedhjulet og ind i navbøsningen, mens du trykker på knappen i midten.



For at kontrollere, at drivhjulet er korrekt fastgjort til navet, skal du fjerne fingeren fra den centrale knap og trække hovedhjulet.



Hvis drivhjul ikke låser, konsulteres fejlfinding og justeres. Hvis det stadig ikke låser, må du ikke bruge kørestolen, men kontakte din forhandler.



Sand og havvand (salt anvendt til strøelse om vinteren) kan skade lejer på forhjul og hovedhjul. Rens kørestolen grundigt efter brugen.

6.3 FORGAFLER

Forgafler leveres som standard med aksler til lynkobling. Forgaffelen fjernes let ved at trykke på hurtigudløserknappen oven på lejehuset.



Kontroller hjulets lejevinkel (se kapitel 6.5).



6.4 FORHJUL

Fjernelse

- Tryk på udløserknappen øverst på lejehuset på gaffelen - under silikonehætten.



Montering

- Før lynkoblingsakslen ind i lejehuset. Træk let i gaffelen for at sikre, at den er helt lukket.



Sand og havvand (salt anvendt til strøelse om vinteren) kan skade lejer på forhjul og hovedhjul. Rens kørestolen grundigt efter brugen.

6.5 SÆDEHØJDE FORAN

Sædehøjden afhænger af:


- Størrelse af forreste hjul.
- Størrelse af forgaffler.
- Kontroller vinklen på det hjulbærende hus.

I kapitel 5 vises oversigten, at du kan vælge mellem flere modeller af både forhjul og forgaffler. For at ændre højden på de forreste hjul - løsnes hjulet, og sæt det i den ønskede position i forhjulet.

Vinkel af lejehus

Korrekt justeret vinkel på forgaffelen er vigtig for at opnå kørestolens korrekte manøvreegenskaber. Løsn de to skruer på indersiden af rammen nok til at justere de excentriske møtrikker. Vip lejehuset, så det er 90 ° i forhold til jorden.

Spænd skruerne med 16 Nm.

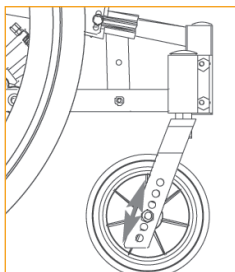

1 stk 5 mm unbrakonøgle.



Lejehuset kan ikke justeres i højden.



Kontroller og juster om nødvendigt positionen af anti-tips

6.6 SÆDEHØJDE BAGEST

Sædehøjden bag afhænger af:

- Størrelsen på hovedhjul.
- Placering af hovedhjulet.

Hovedhjul

Løsn navbøsningen, inklusive skive og møtrik, og monter den i den ønskede position i hovedhjulbeslaget.



2 stk 24 mm skruenøgle



Sørg for, at møtrikken på indersiden af rammen er helt inde i hjulbøsningen.



Når sædehøjden ændres, skal du sørge for, at lejehuset på de forreste hjul justeres lodret til jorden (se kapitel 6.5).



Risikoen for væltning øges, når hovedhjulet bevæges fremad i hovedhjulbeslaget.



Kontroller positionen af anti-tip.



Juster bremserne igen (se kapitel 6.17).

6.7 RYGLÆN

- Udfold og løft ryglænet op, og monter gasstiverne i beslaget.
- Fastgør ryglænet ved at skubbe låsebolten ind fra siden, gennem beslaget og hovedet på gasstiveren.



Hvis gasfjeder ikke passer, benyttes nedre b'vandrette bjælke på ryggen til sammenpresning af gasfjeder. Hold vipningsgrebet indtrykket mens du trykker bjælken mod gasfjeder og herved trykker den sammen. Slip grebet og anbring gasfjeder i gasfjederhovedet.

6.8 JUSTERING AF SÆDEDYBDEN

Sædedybden kan justeres både bagpå og foran på sædet. Justeringer udføres for at give brugeren en behagelig siddeposition med korrekt lændestøtte, mens knæleddet er justeret med benstøttens knæled.

Ved at justere sædedybden kan stolebalancen og køreegenskaberne ændre sig. En velafbalanceret stol er let at køre uden let at vippe bagud. Start altid med at justere sædedybden bagud, og juster derefter benstøttens fastgørelsesbeslag for at få benstøttens knæled til at justere sig efter brugerens knæled. Om nødvendigt skal drivhjulspositionen også ændres.

Sædedybden kan justeres 100 mm bagtil og 100 mm foran.

JUSTERING AF SÆDEDYBDEN BAGPÅ

Justering af sædedybden bagpå:

- Ryglænets hængsel har 5 huller med 25 mm afstand imellem dem.
- Sædedybden kan justeres fra 400 - 500 mm (målt fra forsiden af sædepladen til ryglænsrør uden ryglænspudd).
- På rammen under stolepladen er der monteret et ekstra låsehoved til gasstiveren.
- Det korte låsehoved dækker sædedybde 400 mm, 425 mm og 450 mm.
- Det lange låsehoved dækker sædedybde 450 mm, 475 mm og 500 mm. (der er også et langt ryglæns-hængsel, der dækker længere sædedybde. Se kapitel 5)

- Når du ændrer positionen på ryglæns-hængslet, skal du også huske at ændre positionen på gasstiveren under stolen. Beslaget har 3 huller. Når ryglæns-hængslet er indstillet i den korteste position, placeres gasfjederen i det forreste hul ved hjælp af det korte låsehoved.



For hver position trækkes ryglæns-hængslet ud, gasfjederen flyttes et hul bagud. Når gasfjederen når det bageste hul med kort låsehoved, skal du skifte til langt låsehoved og starte fra det forreste hul igen.



Ved brug af komfort sædepladen anbefales det at skifte sædeplade, når sædedybden skiftes. Sædepladen kommer i dybden: 400 mm, 430 mm & 460 mm.



Ved at bruge Velcro justeringsstropperne i stolryggen kan du få et par cm på dybden.



Sædedybde bagtil justeres som følger:

- Slip vippegassens stiver ved at vippe sædet helt fremad.
- Træk låsebolten til ryglænet ud, og placer ryglænet fremad i sædet.
- Fjern skruerne, der holder ryglænsbænk, og sæt bænk i en position, der giver ryglænet den ønskede position. Udfør begge sider på samme tid.
- Sæt skruerne tilbage i ryg og fastgør dem.
- Husk også at flytte gasstiverne som beskrevet tidligere i dette kapitel - for at nå 90 ° tilbage vinkel, når gasstiverne bundes.



Ved justering af sædedybden bagpå skal skruen i ryglænsbænk strammes med 14 Nm.



6 mm unbrakonøgle.
13 mm gaffelnøgle.



Hvis brugeren har brug for en anden ryglænvinkel end det, der er standard, er det muligt at ændre gasstiverens position i tre positioner under stolen foran.



Når du skifter sædedybde, ændrer du også stolens vippepunkt. Dette kan forhindres ved at ændre hovedhjulets position i hovedhjulbeslaget (se kapitel 6.6). Juster anti-tips i overensstemmelse hermed (Se kapitel 6.10).

6.9 JUSTERING AF SÆDEDYBDEN FORAN

Det er muligt at justere sædedybden op til 100 mm foran. Ved urolige brugere må forlængerstykket ikke trækkes mere end 50 mm ud.

Gør følgende:

- Løsn skruen, der holder forlængerstykket til benstøtten.
- Indstil forlængelsesstykket til den ønskede position.
- Fastgør skruerne, stram dem med 25 Nm.



6 mm unbrakonøgle.



Ved at indstille forlængere til forskellige positioner - forskellige positioner er det muligt at kompensere for et roteret bækken eller forskellige længder af lårene.

6.10 ANTI-TIP

- Juster anti-tip, så den ikke stikker uden for hjulets radius.
- Træk anti-tippen ud/bagud fra chassiset.
- Drej den nedad 180°.
- Lås den i position ved at bevæge sig fremad med fjederspændingen.



- i** Anti-tips leveres justeret i henhold til ordnet hovedhjulstørrelse i standardposition. Hvis der udføres andre justeringer, skal anti-tip justeres i overensstemmelse hermed.

Justering af anti-tip

Anti-tips skal justeres, når hovedhjulets position eller dimension ændres.

Korrekt justerede anti-tips skal placeres lige på indersiden af hovedhjulets radius. Anti-tips justeres som følger:

- Løs låseklemmen på anti-tip bar ved hjælp af en unbrakonøgle.
- Træk eller skub stangen til den ønskede position.
- Fastgør låseklemmen.
- Gør den samme procedure på den modsatte side.



6 mm unbrakonøgle.



Kontroller, at begge anti-tip har samme længde. Afstanden mellem anti-tip hjulene og gulvet skal være 20 - 30 mm.



Hvis anti-tips er placeret på ydersiden af hovedhjulets radius, vil det forstyrre ved kantsten og trapper.



Anti-tips skal altid bruges for brugerens sikkerhed.

6.11 JUSTERING AF ARMSTØTTER

- Drej armstøttens udløserhåndtag til siden og hold.
- Juster armlænet til den ønskede højde og slip håndtaget. Løft eller sænk armlænet lidt, indtil det låser.



Armpuden og låseskruen er sat i midterposition. Dette kan justeres, så det passer til brugeren.

6.12 PUDER

Puder fastgøres og justeres på kørestolen ved hjælp af Velcro.




Det er bydende nødvendigt at indstille puden korrekt for at sikre god siddekomfort.



Pudebetræk kan vaskes og kan dermed genbruges. Følg vejledningen på bagsiden af puden for korrekt vedligeholdelse og vask af puden.

6.13 JUSTERING AF VELCROEN TILBAGE

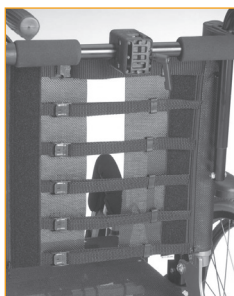

- Løsn stropperne, og placer ryglæns-puden, så brugeren får plads til bunden og den integrerede lændestøtte i korrekt position.
- Spænd stropperne, så de følger krumningens krumning og giver lidt ekstra støtte øverst på korsbenet.

6.14 BENSTØTTE

Netti III XHD og XXHD har følgende alternative benstøtter:

- Netti Grandis vinkeljusterbar benstøtte
- Netti Dynamic benstøtter DUAL
- Amputationsstøtte
(Se kapitel 5 for billeder).

Som standard leveres **Netti III XHD og XXHD** med Netti Grandis vinkeljusterbar benstøtte.

Fra sædebredde 650 mm leveres benstøtter med fodplade og låse på venstre side af benstøtte.

En separat brugermanual – UM0119 for Netti Grandis benstøtte kan hentes på vores website **My-Netti.dk**


Se separat brugermanual UM0115 for Netti Dynamic benstøtte DUAL.

Netti Grandis benstøtte er drejelig og aftagelig. Den er højdejusterbar og leveres med højde- og dybdejusterbar lægstøtte. Fodpladerne er hængslet og svinges op til siden. I nedfoldet tilstand kan de vinkles i faste positioner. Som standard leveres fodpladerne med en lås, der forbinder de 2 plader, hvilket gør pladerne stærkere og reducerer vedligeholdelsen. Hvis låsning ikke er ønsket, kan bolten fjernes ved hjælp af en unbrakonøgle.

MONTERING AF GRANDIS BENSTØTTEN


For montering:

- Fold fodpladerne op.
- Hold benstøtten på det øverste led, og placer det i udtræksstykket i en vinkel som vist på billedet nedenfor.
- Sving benstøtten indad og skub let nedad, indtil den går i låst position.

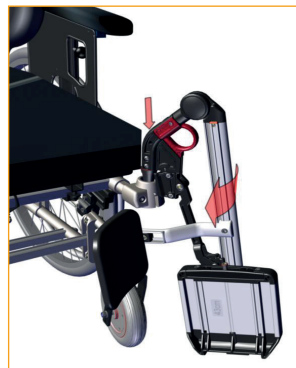

Benstøtte vinkeljustering


For at justere vinklen på benstøtten skal du blot løsne den røde håndtag og løfte eller sænke. Benstøtten forbliver i den position, hvor du låser håndtaget.

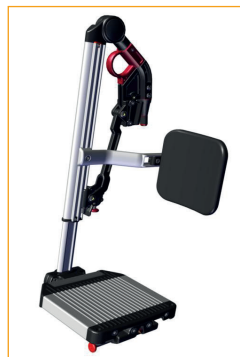

Højdejustering af fodplade:


Fodpladerne kan justeres trinkløst i højden.

- Løsn justeringsskruen, så justeringsbjælken bevæger sig frit.
- Skub fodpladen til den ønskede højde, og stram derefter skruen.

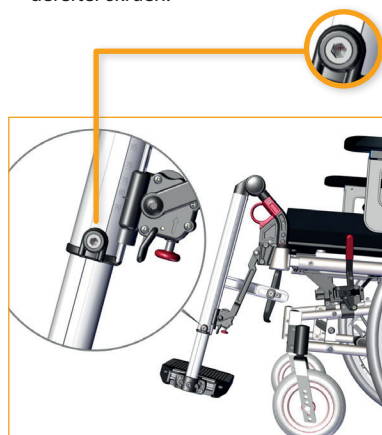

Justering af fodpladens dybde:

- Løsn de 2 skruer helt som vist nedenfor ved hjælp af en 5 mm unbrakonøgle.
- Træk fodpladen ud, og løsn de næste 2 skruer, der er blevet synlige.
- Skub fodpladen frem eller tilbage til den ønskede dybde, før alle skruer fastgøres igen.

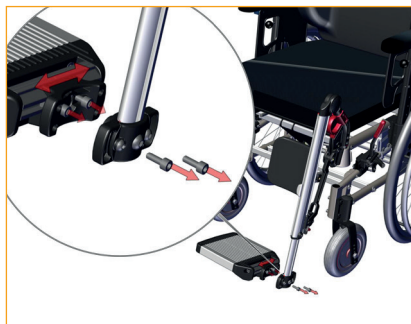

Justering af vinkel af fodplade:

- Løsn de 2 skruer som vist nedenfor ved hjælp af en 5 mm unbrakonøgle.
- Juster fodpladen til den ønskede vinkel, og stram skruerne.



Låsning og frigørelse af fodplader

- Fodpladerne leveres med en lås, der forbinder de 2 fodplader, hvilket gør pladerne stærkere.
- For at låse fodpladerne lad den højre fodplade falde over bolten, der står ud fra den venstre, den klikker ind i låsen.
- For at frigøre fodpladen skal du skubbe plastknappen under den højre fodplade og løfte den højre fodplade op.



-  Mens justeringen foretages, må der ikke være nogen belastning på fodpladerne.
-  Til udendørs brug skal der være en afstand på 40 - 50 mm mellem fodpladen og jorden.
-  Stå aldrig på fodpladerne på grund af risikoen for at vippe fremad.
-  Når du justerer benstøttevinklen, skal du være opmærksom på klemfare mellem bevægelige dele.

Fjernelse af benstøtter:

- Slip fodpladen ved at skubbe den røde plastknap under den højre fodplade og løfte den højre fodplade op.
- Træk det røde cirkulære greb på toppen af benstøtten og løft støtten opad, mens du drejer den lidt udad.




Justering af lægstøtter

Lægstøtten kan justeres i højden og dybden. Løgstøtterne skal justeres i en højde og dybde, der forhindrer fødderne i at glide ned fra fodpladen. For at justere højden skal du løsne skruen på støttebeslaget og skubbe den i den ønskede position, inden skruen fastgøres.



5 mm unbrakonøgle.

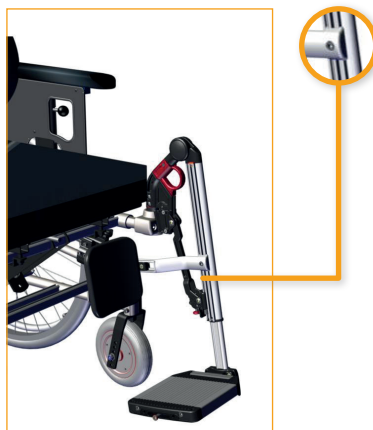

For at justere dybden af kalvepuden løsnes skruen, der holder kalvestøtten, og skub den til den ønskede position, før skruen fastgøres igen.




5 mm unbrakonøgle.



Stå aldrig på fodpladerne!



Løft aldrig kørestolen i benstøtterne.

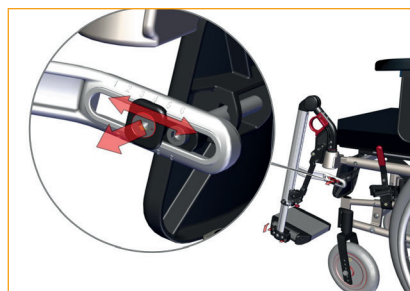

Netti III XHD og Netti XXHD med Grandis benstøtte med fodplade fra sædebredde 650 mm:




Amputationsstøtte



6.15 HOVEDSTØTTE

- A - Greb for justering af dybde
- B - Hjul for justering af vinkel
- C - Greb for justering af højde
- D - Beslag til hovedstøtten.

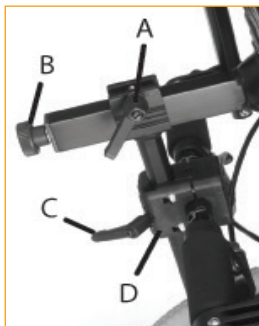

- Placer den firkantede møtrik i sporet af hovedstøttekonsollen som vist nedenfor.



- Placer hovedstøtten i hovedstøttekonsollen.
- Højden og dybden af hovedstøtten er indstillet til de ønskede positioner og strammet.
- Hovedstøttekonsollen fastgøres ved at stramme de fire skruer to og to diagonalt, så beslaget fastgøres med samme styrke opdelt på de fire skruer.

Hovedstøttens stabilisator hjælper til at holde hovedstøttebeslaget i position og retning når den er monteret på en bred kørestol.



Husk at løsne håndtagene, når du justerer hovedstøtten.



Hvis konsollen til hovedstøtten ikke passer perfekt til beslaget, er beslaget sandsynligvis fastgjort for stramt eller ujævnt. Efter montering af hovedstøtten fastgøres den korrekt ved at stramme den lille sætskrue i midten på toppen af hovedstøttekonsollen ved hjælp af en unbrakonøgle.



Hvis hovedstøtten virker for kort i højden, kan den drejes 180 ° ved at løsne justeringshjulet bag på den vandrette bjælke (B).

Justering af hovedstøtten i dybden:

- Slip låsehåndtaget oven på den lodrette bjælke (A).
- Juster hovedstøtten og fastgør den i den ønskede position.

Justering af hovedstøtten i højden:

- Løsn låsehåndtaget på hovedstøtteadapteren (C).
- Juster hovedstøtten og fastgør den i den ønskede position.

Justering af hovedstøtten i vinkel:

- Slip justeringshjulet bag på den vandrette bjælke (B).
- Juster hovedstøtten og fastgør den i den ønskede position.

Justering af hovedstøtte sideværts:

- Adapteren til hovedstøtten kan flyttes både til højre og venstre, hvilket giver mulighed for at imødekomme særlige behov for støtte af hovedet.
- Løsn de fire skruer, der holder adapteren sammen.
- Flyt adapteren til den ønskede position, og fastgør adapteren ved at stramme skruerne diagonalt.

6.16 SKUBBEHÅNDTAG

Justering af skubbehåndtagene:

- Slip håndtaget på siden og løft håndtaget helt op.
- Drej håndtagene i den ønskede position.
- Juster højden.
- Lås håndtaget i den ønskede position ved at stramme håndtaget.



Kontroller, at sikkerhedsskruen er korrekt strammet.



For at fjerne håndtagene skal sikkerhedsskruen i bunden af håndtagene fjernes.

6.17 JUSTERING AF BREMSERNE

- Bremsene er frit justerbare langs rammerøret.
- Skub håndtaget fremad for at aktivere bremsen.



- Træk håndtaget bagud for at frigøre bremsen.



- For at flytte bremsen skal du løsne de to skruer på indersiden af bremseklemmen.



- For finjustering løsnes den øverste skrue på indersiden af bremsene.
- Juster bremsepositionen, og spænd skrueerne.



5 mm unbrakonøgle.

-  **Kontroller, at bremsene er korrekt justeret ved at aktivere bremsene, og kontrollere at kørestolen ikke bevæger sig.**
-  **Knæbremserne er konstrueret som parkeringsbremsen og må ikke anvendes som drivbremsen.**
-  **Vær opmærksom på den potentielle fare for presning mellem bremse og dæk.**

TROMLEBREMSE

Netti III XHD & XXHD er som standard monteret med håndbetjente tromlebremser.



Hvis bremsen ikke fungerer korrekt:

For at justere ledningen på den ene eller begge sider justeres fodskrue 2 - -4 omdrejninger ud. Kontroller derefter bremsene igen.

Hvis wire er for løs:

Juster fodskrue helt ind. Spænd wire ved at løsne wirespænde inden wire trækkes yderligere gennem det. Spænd wirebeslag og juster fodskrue ud igen.




-  **1 Stk 10 mm svensk nøgle**

 **For at sikre wires korrekte funktioner må disse aldrig være stramme.**

Drift og anvendelse af tromlebremse

Kørestolen med tromlebremse tillader regulering af hastigheden på bakker og under kørsel lige ud. Bremsegreb er placeret på skubbehåndtagene.

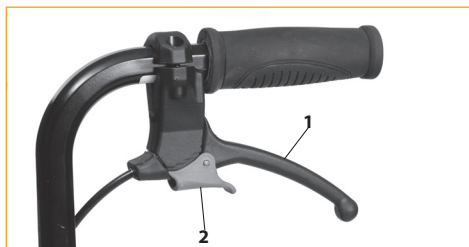

- Bremsene aktiveres ved at trække bremsehåndtagene (1) jævnt og jævnt mod håndtaget og bringe kørestolen til stop.
- For aktivering og låsning af parkeringsbremsen (2) Tryk håndtaget (1) mod skubbehåndtaget og lås parkeringsbremsen med fingeren. Sørg for, at begge parkeringsbremsen er låst.
- Parkeringsbremsen udløses, når du trykker håndtaget (1) mod skubbehåndtaget. Det er låst med en fjeder, og dette frigiver det.

 **Efterlad ikke brugeren i kørestolen uden at aktivere parkeringsbremsen.**

7. SÆDEVINKEL / HÆLDNING OG RYGVINKEL / LÆNE SIG TILBAGE

7.1 SÆDEVINKEL

Sædevinkel er reguleret med frigivelsesgrebet for vinkel monteret på skubbebøjlen.

Sædeenheten kan vippe fra -9° til +16°.



7.2 VINKEL AF RYGLÆN

Ryg vinkel er reguleret med frigivelsesgrebet for hældning monteret på skubbebøjlen. Vinklen kan reguleres fra 4° frem til 40° bagud.

 For at sikre wires korrekte funktioner må disse aldrig være stramme.

 Sæde - og ryglæsvinklen må ikke justeres uden brug af anti-tips.

Frigivelsesgrebet har hver to følgende mærkninger:



Tip



Læn

 Risiko for væltning.
Kontroller positionen af anti-tip.

 Ved monteret stoleforlænger øges risikoen for væltning. Det bør forbedres efter behov ved at flytte hovedhjul længere bagud.

 Brug altid anti-tips, når læne- og vippefunktionerne er aktiveret.

7.3 NØGLEORD FOR VIPNING OG HÆLDNING AF STATISKE COMFORT KØRESTOLE

Tilt og tilbagelæning er de grundliggende fordele ved en komfort kørestol. Det giver mulighed for forskellige siddepositioner under tiden kørestolen er i brug.

Vi har gennemgået de kliniske beviser vedrørende tilt og læning, og fandt, at der er flere undersøgelser eller retningslinjer for bedste praksis, der antyder, at tilt - og læne-sekvensen er vigtig for at reducere forskydning og glidning:

Først tilt og herefter tilbagelæning. Når patienten rejses op igen, skal sekvensen være først tilbagelæning og herefter tilt. Det ser ud til, at den mest forskydning ville blive induceret, når man går lodret fra en tilbagelænet og vipet position.

7.4 REDUCER MULIGHEDEN FOR AT GLIDE -, KLIPPE- OG TRYKSÅR:

Benyt kun tiltvinkel for variation af brugers siddeposition. Det er almindeligt kendt, at tilbagelænet ikke bør justeres, når rygvinklen er tilpasset brugerens bedste siddeposition. Muskelbelastning i hals og ryg skal være så lave som muligt for at forebygge glidning, og et skift af tilbagelæning fra original position vil afbryde og ødelægge den korrekte kroppsposition, og medføre øget muskelbelastning i halsen.

Hvis Læne-funktionen anvendes under en overførselssituation eller andre situationer, er det meget vigtigt, at vippevinklen justeres tilbage til den korrekte, oprindelige position, når brugeren er tilbage til en normal siddeposition. Forkert brug af tilbagelæning medfører en øget mulighed for glidning, og det betyder en øget fare for forskydning (lodrette og vandrette kræfter) og tryksår.

SØRG FOR, AT BRUGEREN ER SIKKER, NÅR TILT ELLER TILBAGELÆNEFUNKTIONER VIL BLIVE JUSTERET:


Alle modeller af Netti komfortkørestole's vippe- og hvilefunktioner er en "enhåndsbetjening", inklusive kørestole i Dynamic modellerne. Dette er en stor fordel for brugeren: Pleje giveren er i stand til at etablere øjenkontakt med brugeren, når tilt eller lænefunktion vil blive brugt. Plejer er også i stand til at kommunikere med bruger inden brug af tilt eller tilbagelæning. Brugeren vil føle sig mere sikker, når han / hun er klar over, at tilt eller lænefunktion vil blive brugt.

7.5 BETJENING AF VIPPEHÅNDTAG: TILT AF SÆDEENHED

Tryk på det venstre håndtag på skydebøjlen, og tryk på skydebøjlen for at vippe sædeenheten med en af dine hænder, mens du har øjenkontakt med brugeren og læg den anden hånd på armstøtten.


Den korrekte relative vinkel mellem kroppsdelene forbliver den samme, når sædeenheten vippes.

Uanset hvor du slipper håndtaget løs, forbliver siddeenheten i denne position. For at bringe sædeenheten op, trykkes grebet og tiltecylinder hjælper dig til at løfte sædeenheten op.

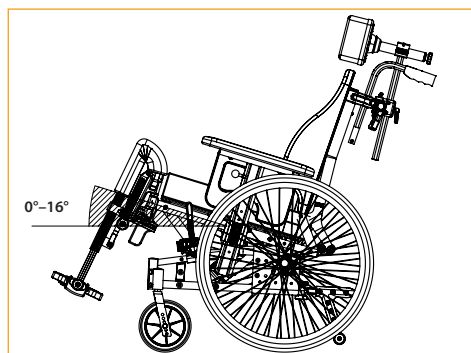

En bagudvendt sædeenhed giver en stejlere siddevinkel i forhold til overfladen og forhindrer glidning af kørestolsbrugeren.

En fremadrettet vippe sædeenhed bringer brugeren i en position, hvor aktiviteter - for eksempel ved et bord eller ved at stå op fra kørestolen, understøttes.

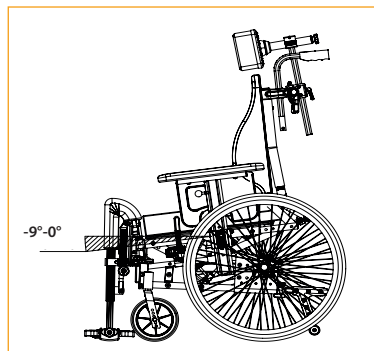


Vippehåndtaget og vippe tegnet er på skubbehåndtaget - vist på forrige side.



Lad aldrig brugeren være alene, når sædet vippes fremad. Brugeren kan glide fremad.

7.6 BETJENING LÆNEHÅNDTAG: LÆNE STOLEN TILBAGE

Tryk på det højre håndtag og læg pres på trykstangen for at læne ryggen tilbage med en af dine hænder, mens du har øjenkontakt med brugeren og læg den anden hånd på armstøtten. Uanset hvor du slipper håndtaget løs, forbliver stolens ryg fast og låst.

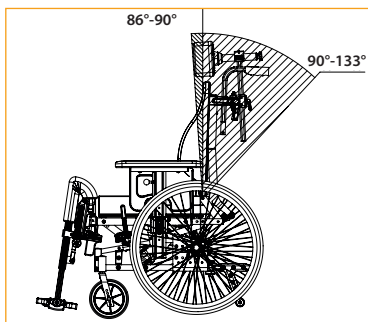

8. TRANSPORT

8.1 TRANSPORT I BIL

Når det er muligt overføres til et bilsæde med sikkerhedssele når du kører i bil. Fastgør kørestolen eller opbevar den i bagagerummet.



Netti III XHD og XXHD er forstærkede konfigurationer af Netti III HD.

Netti III HD er testet med succes i fremadrettet placering med både hofte- og skulderseler, i henhold til kravene i ISO 7176-19:2008 og er godkendt til brug som sæde i bil - maks. brugervægt 160 kg.

Stolen er testet med et kombineret kørestol- og brugerfastspændingsystem W120/DISR fra Unwin Safety Systems. For yderligere information: BraunAbility Europe. <https://www.braunability.eu/ctors>

Netti III XHD og XXHD er godkendt til brug som bilsæde med maks. brugervægt på 160 kg.

Brug altid godkendt kørestol og fastholdelsesordning (ISO 10542:2012) til fastgørelse af kørestolen i køretøjet. Brug en 4-punkts sele til sikring af kørestolen i køretøjet

Klassificeringen af kørestolens optagelse af køretøjsforankrede selefastholdelsesordninger er A = God.

FJERN TILBEHØR

Før du bruger Netti III XHD og XXHD som sæde i en bil, skal du sørge for at fjerne og fastgøre alle dele og tilbehør (f.eks. bakker og glideblokke), der kan falde af i tilfælde af en ulykke, og sikre dem et andet sted.

Stolen er kollisionstestet uden strømforsyningsæt osv. Hvis der på et senere tidspunkt er monteret et strømforsyningsæt, trappebestigning osv., Skal du kontrollere, om din elassistent enhed er kollisionstestet og godkendt til kørestole, der bruges som sæde i en bil. Hvis elassistent ikke er godkendt, skal den demonteres - og sikres andetsteds, hvis kørestolen skal benyttes som sæde i bil.

SIKRING AF KØRESTOLEN

-  **Løft stolen til oprejt sædeposition med maks. 10 graders vipning og 10 graders hældning. Drej skubbebjølen op og fastgør den bag hovedstøtte.**

For fastgørelse af kørestolen i køretøj må der kun benyttes de tilsigtede fastgørelsespunkter.



Stolen er markeret med mærkater der angiver kørestolens fastgørelsespunkter. Fastspændingers dimension er 25x60 mm.

For: Brug krog eller stropfastgørelse.



Bag:


Krog eller strop eller krog/karabinhage i bilens øjer på rammen. Vinkel på stropper skal være tæt på 45°




SIKRING AF BRUGEREN

- ⚠ Benyt altid 3-punkts sikkerhedsseler.
- ⚠ Brug altid både bækken- og skulderstop til at reducere muligheden for hoved- og brystpåvirkning med køretøjets komponenter. Kontroller at selen ikke er snoet og at spændet ikke har kontakt med stolen i tilfælde af en kollision.

Sørg for at bilens hoftelese ligger tæt over eller foran hoften - vinklen mellem hoftelese og horisontal mellem 30 - 75 grader, højere vinkel er bedst. Skuldersele skal ligge tæt på kroppen af brugeren og ikke på tværs af armstøtter, hjul m.m. Se illustration

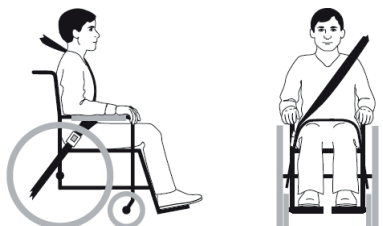

- ⚠ Skuldersele må ikke ligge på tværs af armstøtter, hjul m.m. Se illustration

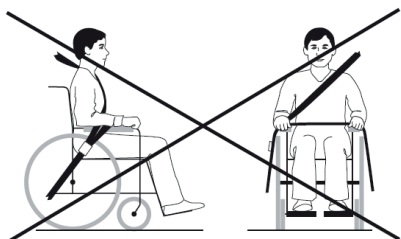

- ⚠ De korrigerende seler, der bruges i kørestolen, er ikke sikkerhedsseler.

- i Hvis bruger er 1,85 m eller derover, skal rygforlængersæt og en 500 mm vertikal bjælke for hovedstøtte monteres når Netti III XHD og XXHD benyttes som sæde i en bil.

- i Hvis en Netti hovedstøtte er monteret korrekt, er den meget stabil, men erstatter ikke behovet for ekstern nakkestøtte monteret i bilen.

- i Brug altid Netti eller Ride Designs puder, når Netti III XHD og XXHD kørestol bruges som sæde i en bil.

- ⚠ Benyt aldrig kørestolen som sæde i bilen hvis den har været udsat for en ulykke, før den er inspiceret og godkendt til dette af producentens repræsentant.

- ⚠ Enhver ændring eller erstatning er forbudt på kørestolens fastspændingspunkter eller strukturelle- og rammedele uden aftale med producenten af kørestolen.

- i Kørestolens vægt uden puder er mellem 35 og 45 kg afhængig af kørestolens størrelse og konfiguration.



Netti III XHD og XXHD med sædebredde 500 mm og mere overstiger den maksimale bredde på 750 mm, der er specificeret i PRM-TSI, og har indflydelse på muligheden for togtransport.

Det kan også skabe problemer ved passage gennem døre og andre åbninger.



Vær opmærksom på, at bredere kørestole har større venderadier og reduceret manøvrerbarhed i biler. Mindre kørestole giver normalt nemmere adgang til bilen og manøvrering til fremadrettet position.

8.2 SAMMENKLAPNING TIL TRANSPORT

Når kørestolen ikke er i brug, kan den foldes sammen som angivet herunder. Sæt kørestolen i bagagerummet eller bagsædet. Når du placeres i bagsædet, skal du fastgøre rammen ved hjælp af sikkerhedsseler.

- Fjern hovedstøtten (kapitel. 6.15)
- Drej anti-tips op (Kap. 6.10)
- Sving skubbehåndtag ind (Kap. 6.16)
- Demontering af armstøtter (Kapitel 6.11)
- Fjern benstøtter (kapitel. 6.14)
- Fjern ryglænsputen (Kap. 6.12)
- Slip ryglænet og klap det ned (Kap. 6.7)
- Fjern hovedhjulene (Kap. 6.2)
- Fjern forreste hjul (Kap. 6.4).

8.3 TRANSPORT PÅ FLY

Netti III XHD og XXHD kørestole må transporteres i fly uden begrænsninger. Netti III XHD og XXHD kørestole er udstyret med 4 gasfjedere. De er dog ikke klassificeret som farligt gods. I modsætning til den generelle vejledning til farligt gods UN3164 bestemmer IATA-DGR (særlig regulering A114), at gods, der indeholder gas og er bestemt til at fungere som støddæmpere (inklusive energiabsorberende enheder eller pneumatiske fjedre) IKKE er underlagt transportinstruktionerne, dvs. de er skadesløs fra følgende krav:

- a) hver vare har et gasvolumen, der ikke overstiger 1,6 l og et ladetryk på ikke over 250 bar, hvor produktet af kapaciteten udtrykt i liter og ladetrykket udtrykt i stænger ikke overstiger 80.
- b) hver artikel har et minimum sprængtryk på 4 gange ladetrykket ved +20 grader Celsius for produkter, der ikke overstiger 0,5 l gasrumskapacitet.
- c) hver artikel er lavet af materiale, der ikke vil fragmentere.
- d) hver vare er fremstillet i overensstemmelse med kvalitetsstandarden, som er godkendt af den ansvarlige nationale myndighed.
- e) det er bevist og vist, at artiklen genoplever sit tryk ved hjælp af en brandnedbrydelig tætning eller anden trykaflastningsanordning, således at artiklen ikke vil fragmentere, og artiklen ikke raket.

8.4 REJSE MED OFFENTLIG TRANSPORT

Kørestolen bør anbringes i særligt område for kørestole.

Kørestolen bør vende modsat af kørselsretningen. Ryggen på kørestolen skal være anbragt mod et fast objekt som en sæderække eller en skillevæg. Sørg for at brugeren nemt kan nå gelændere eller greb. Brug bæltet og seler i stolen til at holde brugeren. Brug sikkerhedsseler, hvis de er tilgængelige for at sikre brugeren i køretøjet.

9. KØRSEL

9.1 GENERELLE TEKNIKKER

Vægt og balance for stolen påvirker køreevnerne for kørestolen.

Vægt, størrelse og siddeposition for brugeren er også påvirkende faktorer. Hjulenes position vil også påvirke køreegenskaberne. Jo mere vægt der er på hovedhjulene, jo nemmere er den at køre med. Hvis der anbringes en høj vægt over forhjulene, vil stolen være tung at køre med.

 Netti III XHD og XXHD kan være en udfordring at manøvrere grundet størrelse og last. Vær forsigtig ved kørsel på hældende flader. Du kan miste kontrollen.

 Trinvis tilgang:
Du skal altid nærme dig trin i en langsom bevægelse og forhindre, at de forreste hjul rammer trinnet med stor kraft. Brugeren kan falde ud af stolen ved stødet. De forreste hjul kunne bremse.

 Kørsel fremad, ned ad trin / fortove: Vær forsigtig med ikke at køre ned ad trin højere end 30 mm. Benstøtterne kan ramme jorden først. Derved kan du miste kontrollen, og benstøtterne kan bremse.

 Ledsager:
Hvis brugeren efterlades alene i kørestolen, skal du altid låse bremserne og sikre dig, at anti-tips er skruet ned.

 Parkering:
Forøg den nederste støtte på kørestolen ved at flytte stolen omkring 100 mm bagud, så de forreste hjul vender fremad.

 Kørsel på blødt, ujævnt eller glat underlag Kan besværliggøre kørslen, da hjulene mister greb og det er svært at styre kørestolen.

 FLUGTVEJE:
Netti III XHD med sædebredde på 500 mm og derover, har en samlet bredde på over 700 mm og kan have svært ved at passere nødudgangsveje.

9.2 KØRSEL TEKNIKKER – OP AD TRIN –



Ledsager, kørsel forlæns op ad trin:

- Sørg for at anti-tips er drejet op.
- Vend kørestolen bagud.
- Løft skubbehåndtagene, mens du skubber stolen op på trinnet.



Drej anti-tips ned.

Brugere, kørsel forlæns op ad trin:

Denne teknik er kun nyttig, hvis trinnet er meget lavt. Det afhænger også af afstanden mellem fodpladerne og jorden.

- Sørg for at anti-tips er drejet op.
- Kør stolen bagud mod trinnet.
- Lav et fast greb om skubfælgene og bevæg kroppen fremad, mens du trækker.
- Træk kørestolen op ad trinnet og gå baglæns længe nok til at lægge de forreste hjul på trinnet.



Drej anti-tips ned.

Ledsagere, kørsel forlæns op ad trin:

- Sørg for at anti-tips er drejet op.
- Træk stolen bagud ved siden af trinnet.
- Drej kørestolen baglæns, og bevæg de forreste hjul lidt op i luften.
- Træk kørestolen op ad trinnet og gå baglæns længe nok til at lægge de forreste hjul på trinnet.



Drej anti-tips ned.

9.3 KØRSEL TEKNIKKER – TRIN NED –

Ledsagere, kørsel ned et trin fremad:

- Sørg for at anti-tips er drejet op.
- Drej kørestolen baglæns, og bevæg de forreste hjul lidt op i luften.
- Kør forsigtigt ned ad trinnet og vinkl kørestolen fremad og sæt de forreste hjul tilbage på jorden.



Drej anti-tips ned.

Ledsagere, kørsel ned et skridt baglæns:

- Sørg for at anti-tips er drejet op.
- Kør stolen baglæns mod trinnet.
- Kør forsigtigt ned ad trinnet, og flyt kørestolen bagud på hovedhjulet, indtil de forreste hjul er kommet væk fra trinnet.
- Sæt de forreste hjul ned på jorden.



Drej anti-tips ned.

9.4 KØRSEL TEKNIKKER – HÆLDNING –

Vigtigt råd til kørsel ned og op ad bakke for at undgå risikoen for at vælte. Vær forsigtig og tag højde for den påkrævede styrke for at bremse og styre kørestolen på en hældning.

-  Undgå at dreje kørestolen midt på en skråning.
-  Kør altid så lige som muligt.
-  Det er bedre at bede om hjælp end at tage risici.

 Vær altid ekstra forsigtig ved kørsel op og ned ad bakke grundet størrelse og vægt af kørestolen.
Den kan blive for tung til at stoppe.

Brugere, kørsel op ad bakke:

Flyt overkroppen fremad for at bevare stolens balance.

Brugere, kørsel op ad bakke:

Flyt den øverste del af kroppen bagud for at opretholde balancen i stolen.

Styr stolens hastighed ved at klemme om skubbefælgene.

Hjælper:

Benyt ikke parkeringsbremsen på dækkene.
Brug tromlebremsene.

Undgå pludselige stop, brugeren kan falde ud af stolen.



9.5 KØRSEL TEKNIKKER – OP AD TRAPPER –

-  Bed altid om hjælp.
-  Brug aldrig rulletrapper, selvom assisteret af en ledsager.

Med assistance, baglæns:

- Kontroller, at anti-tips er drejet op, og at skubbehåndtagene er fastgjort korrekt.
- Træk kørestolen baglæns til det første trin af trappen.
- Drej kørestolen bagud på hovedhjule.
- Træk kørestolen langsomt op ad trappen, et skridt ad gangen holder balancen på hovedhjulet.
- Når du når toppen af trappen, skal du trække kørestolen bagud langt nok til at sætte de forreste hjul sikkert ned på gulvet.

-  Hvis to ledsagere er til stede, kan en person hjælpe med at løfte foran på rammen.
Løftepunkter på rammen er markeret med dette tegn:



-  Ledsagerne skal bruge styrken i deres ben, der bærer stolen, og undgå unødigt stress på bagsiden.
-  Løft ikke kørestolen, der holder fast på ben -, arm- eller hovedstøtterne.

-  Drej anti-tips ned.

9.6 KØRSEL TEKNIKKER – NEDAD TRAPPER –

 Brug aldrig rulletrapper, selvom assisteret af en ledsager.

Med hjælp, fremad:

- Kontroller, at anti-tips er drejet op, og at skubbehåndtagene er fastgjort korrekt.
- Kør kørestolen frem til trappens første trin.
- Drej kørestolen bagud på hovedhjulene.
- Hold fast i skubbehåndtagene, og hold balancen på hovedhjulet et skridt ad gangen.
- Når du når bunden af trappen, skal du sætte de forreste hjul sikkert ned på gulvet.



Hvis to ledsagere er til stede, kan en person hjælpe med at løfte foran på rammen. Løftepunkter på rammen er markeret med dette tegn:



Løft ikke kørestolen, der holder fast på ben -, arm- eller hovedstøtterne.



Drej anti-tips ned.

9.7 OVERFØRSEL

Teknikker til overførsel til / fra kørestolen bør praktiseres godt med de involverede personer. Her giver vi nogle vigtige råd til forberedelse af stolen:



Med eller uden ledsager – sidelæns.

Inden overførsel:

- Kørestolen skal placeres så tæt som muligt på destinationen for overførslen.
- Træk kørestolen 50-100 mm bagud for at få de forreste hjul til at dreje fremad.
- Lås bremsene.
- Fjern benstøtterne og armstøtterne på siden af overførselssiden

Med eller uden ledsager - fremad.

Inden overførsel:

- Kørestolen skal placeres så tæt som muligt på destinationen for overførslen.
- Træk kørestolen 50-100 mm bagud for at få de forreste hjul til at dreje fremad.
- Lås bremsene.
- Vip stolen fremad

BRUG AF LIFT:

Inden overførsel til stolen:

- Vip sædet en smule.
- Fjern hovedstøtten.
- Fjern benstøtterne.
- Hæld/åben ryglæn let for plads til sele bag brugeren.
- Sæt delene på plads, når overførslen er færdig.



 Stå aldrig på fodpladerne på grund af risikoen for at vippe stolen fremad.

9.8 BALANCEPUNKT

Juster balancepunktet ved at ændre hovedhjulets position i hovedhjulsbeslaget.

- Flyt hovedhjulnavet og hovedhjulet (se kapitel 6.6).
- Juster bremserne. (kap. 6.17).



2 stk 24 mm skruenøgle



5 mm unbrakonøgle.

Når hovedhjulene flyttes fremad, bliver det lettere at manøvrere kørestolen, men risikoen for at vippe bagud øges.



Balancepunktet kan også ændres ved at justere sædedybden, sædevinklen og / eller ryglænets vinkel.



Brug altid anti-tips.



Kontroller, at hovedhjulet og hurtigudløseren er låst korrekt (se kapitel 6.2).

9.9 LØFT AF KØRESTOLEN

- Den udklappede kørestol skal løftes af 2 personer, der holder fast på rammen og kun på skubbebjælken. Stolen er markeret med det symbol, hvor den skal løftes.



Løft aldrig kørestolen i ben, arm eller hovedstøtter. De kan løsnes, og kørestolen kan falde og blive beskadiget.



Løft aldrig kørestolen med en bruger i den.

10. VEDLIGEHOELDELSE

10.1 MEDLIGEHOELDELSE



Du er som bruger af kørestolen (og dine hjælpere og familie) ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af stolen. Rens den regelmæssigt og udfør vedligeholdelse for at garantere sikker og lang tids driftssikker funktion og hygiejnisk udseende.

Frekvens	Ugentlig	Månedsvi
Kontroller fejl / skader f. eks. brud / manglende dele	X	
Vask af kørestolen		X
Vask af puder		X
Kontrol af anti-tip funktion		X
Kontrol af bremsejustering		X
Kontrol af dækslitage		X
Oliering af lejer med cykelolie		X
Fedt lodrette benstøtteprofiler med hvid vaseline	X	

10.2 RENGØRING OG VASK

1. Fjern puder, før du vasker kørestolen.
2. Rengør rammen med vand og en klud.
3. Vi anbefaler at bruge blød sæbe.
4. Skyl kørestolen godt med rent vand for at fjerne al sæbe.
5. Brug methyalsprit til at fjerne det snavs der måtte være tilbage.
6. Rengør puder og betræk i henhold til instruktionerne trykt på puder.

PROCEDURE FOR RENGØRING AF NETTO PUDER

FYLD	
Vask	Håndvask 40° C
Desinfektion	Virkon S
	Auto clave 105° C
Tørring	Vridning
	Lufttørres opretstående
YDRE BETRÆK	
Vask	Maskinvask 60° C
Tørring	Tørretumbler maks. 85° C

DESINFEKTION AF KØRESTOLEN

Fjern puder.

Se separate vaskeinstruktioner herover:

Aftør med desinfektant: brug en blødklud vædet med hydrogenperoxid eller teknisk alkohol (isopropanol) og aftør hele stolen.

Anbefalet hydrogenperoxid:

NU-CIDEX "Johnsen and Johnsen".



Kontroller / juster skruer og møtrikker med jævne mellemrum.



Sand og havvand (salt anvendt til strøelse om vinteren) kan skade lejer på forhjul og hovedhjul. Rens kørestolen grundigt efter brug.

*

Brug som tommelfingerregel olie på bevægelige dele og alle lejer. Alu Rehab anbefaler brug af almindelig cykelolie.

10.3 LANGTIDSOPBEVARING

Hvis kørestolen skal opbevares i længere tid (længere end 4 måneder), er der ikke behov for særlige handlinger. Vi anbefaler, at stolen rengøres inden opbevaring. Før det bruges igen, skal du udføre ovenstående vedligeholdelsesinstruktioner.

RESERVEDELE

Netti stole er modulopbygget. Alu Rehab lagerfører alle dele og kan levere disse med kort varsel.

Nødvendige instruktioner for montering medfølger de respektive dele.

Dele, der skal håndteres af brugeren, er defineret i reservedelskataloger, der kan downloades på www.My-Netti.dk.

Disse dele kan om nødvendigt også fjernes og sendes til producent / distributør efter anmodning.



Dele relateret til kørestolens rammekonstruktion skal håndteres af producent eller autoriseret værksted.



Hvis der opstår defekter eller skader, kontaktes din forhandler.



Original lak for reparation af skrammer, kan bestilles fra Alu Rehab.

11. FEJLFINDING

Symptom	Årsag / Handling	Henvisning i manual
Kørestolen kører skævt	- Vinklen på lejehuset er muligvis ikke 90 °. - Kontroller, at de forreste hjul er monteret i samme højde. - De vigtigste hjulnav kan være forkert monteret. - En af bremserne kan være for stram. - Brugeren sidder meget skævt i stolen - Brugeren kan være stærkere på den ene side end den anden.	6.4 6.3 6.6 6.17
Kørestolen er tung at manøvrere	- De vigtigste hjulnav kan være forkert monteret. - Rengør de forreste hjul og gafler for snavs. - For meget vægt over de forreste hjul (Juster balancepunktet ved at flytte hovedhjulene tilbage).	6.6
Kørestolen er svært at dreje	- Kontroller, at de forreste hjul ikke er fastgjort for stramt. - Juster vinklen på lejehuset. - For meget vægt over de forreste hjul justere balancepunktet.	6.4 6.5
De forreste hjul er slingrende	- De forreste hjul er ikke fastgjort korrekt. - Kontroller, at forgaflerne er monteret i samme højde. - Vinklen på lejehuset er muligvis ikke 90 °. - For meget vægt over de forreste hjul justere balancepunktet.	6.4 6.4 6.3 6.5
Hovedhjulene er vanskelige at tage af og sætte på	- Rengør og smør hurtigudløseren. - Juster længden af navbøsningen.	6.6
Bremserne fungerer ikke godt	- Kontroller hjulene og afstanden til bremserne. - Juster bremsen.	6.17
Kørestolen føles "rystende"	Kontroller skruer og justeringspunkter generelt.	



Kontakt din forhandler for information om autoriserede servicefaciliteter, der kan yde support, hvis løsningen ikke nås i denne formular.



Ved behov for reservedele kontaktes din forhandler.



Når du foretager ændringer, der påvirker rammekonstruktionen, skal du kontakte forhandler / producent for bekræftelse.

12. TEST & GARANTI

12.1 TESTS

Netti III XHD og Netti III XXHD er testet og er godkendt til brug både indendørs og udendørs. Stolene er CE mærket.

MAKS. BRUGERVÆGT:
200 kg for Netti III XHD og XXHD

Stolene er testet af
TÜV SÜD Product Service GmbH i
henhold til
EN 12183:2014.



Netti siddesystem er testet for brandsikkerhed i
henhold til: EN 1021-2:2014.

Netti III HD er kollisionstestet og
Netti XHD og XXHD er forstærkede
konfigurationer af Netti III HD
godkendt for brug som sæde
i en bil. MAKS. brugervægt er 160 kg.



12.2 GARANTI

Alu Rehab giver dig 5 års garanti på alle
rammekomponenter og på tværrørssamlingen.
Der er 2 års garanti på alle andre CE-mærkede
komponenter undtagen batterier. For batterier ydes
en 6 måneders garanti.



Alu Rehab er ikke ansvarlig for skader som
følge af uheldsmæssig eller uprofessionel
installation og / eller reparationer,
forsømmelse, slid, ændringer i
kørestolssamlinger eller instruktioner, der
ikke er godkendt af Alu Rehab eller ved brug
af reservedele leveret eller produceret af
tredjepart. I sådanne tilfælde betragtes
denne garanti som ugyldig.



Denne garanti gælder kun, når brugeren
bruger, vedligeholder og håndterer kørestole
som beskrevet i denne brugervejledning.

12.3 GARANTIKRAV

Hvis et produkt har udviklet en fejl under
garantiperioden som følge af en design- eller
produktionsfejl, kan du rette et garantikrav.

- Reklamationer skal fremsendes, så snart en
mangel er opdaget og senest 2 uger efter, at
manglen er opdaget.
- Krav skal rettes til kørestolens salgsgent. Bemærk
venligst at salgsdokumentation skal udfyldes
og underskrives korrekt med serienummer og
eventuelt NeC nummer for dokumentation af tid
og sted for købet af kørestolen.
- Salgsagenten og Alu Rehab skal afgøre, om
en defekt er dækket af denne garanti. Bruger
informeres hurtigst muligt om afgørelsen.
- Hvis reklamationen accepteres, skal salgsgent
og Alu Rehab-repræsentanten afgøre, om
produktet skal repareres, udskiftes, eller om
kunden er berettiget til nedsat pris.
- Hvis et garantikrav vurderes at være ugyldigt
- efter omhyggelig inspektion af defekten ved
en Alu Rehab tekniker (defekt på grund af
forkert brug og/ eller manglende nødvendig
vedligeholdelse) kan du frit beslutte, om du vil
have produktet repareret (hvis muligt) for din
regning, eller om du vil købe et nyt produkt.



**Normalt slid, forkert brug eller forkert
håndtering er ikke et grundlag for et krav.**

12.4 NETTI CUSTOMIZED / INDIVIDUELLE TILPASNINGER

Netti ombygninger / individuelle tilpasninger er defineret som justeringer der ikke er inkluderet i denne manual. Individuelle tilpasninger ved Alu Rehab er mærket med et unikt NeC nummer for identifikation.

Kørestole, der er specielt justeret / tilpasset af kunden, kan ikke holde CE mærket udstedet af Alu Rehab A.S, Norge. Hvis justeringerne udføres af andre end Alu Rehabs godkendte forhandlere, er garantien fra Alu Rehab A.S Norway ikke gyldig.

Hvis der er usikkerhed om specielle monteringer og tilpasninger, kontaktes Alu Rehab A.S.



Hvis du har andre behov end hvad vores standard kørestolsprogram kan dække, bedes du kontakte kundeservice for i sidste ende særlige justeringer eller Netti tilpassede løsninger.

12.5 KOMBINATIONER MED ANDRE PRODUKTER

Kombinationer af Netti og andre produkter, som ikke er fremstillet af Alu Rehab A.S:

Generelt bortfalder dækningen for CE-mærkning på alle produkter i disse tilfælde.

Alu Rehab A.S har dog indgået kombinationsaftaler med nogle producenter om nogle kombinationer.

Ved disse kombinationer er CE mærket og garantierne gyldige.



For yderligere information, kontakt venligst din forhandler eller Alu Rehab A.S Norge direkte.

PRODUKTANSVAR

Netti III XHD og Netti III XXHD med forskellige konfigurationer af Netti udstyr er blevet testet / risk evalueret af Alu Rehab.

Enhver ændring eller erstatning er forbudt på kørestolens fastspændingspunkter eller strukturelle- og rammedele uden aftale med producenten af kørestolen Alu Rehab.

Udskiftninger eller ændringer af komponenter fra tredjepartsleverandører til Netti III XHD og XXHD kræver risikovurdering og accept af produktansvar og sikkerhed for brug af kørestolen fra den producent, der udfører substitutionen eller ændringen.

12.6 SERVICE OG REPARATION

For information om service og reparationservice i dit område kontaktes din lokale forhandler.



Et unikt identifikationsnummer / serienummer findes på tværstangen på hjulrammen på venstre side af stolen.



Et reservedelskatalog til kørestolen kan fås hos din lokale forhandler eller downloades på www.My-Netti.dk



En renoveringsmanual til kørestolen kan fås hos din lokale forhandler eller downloades på www.My-Netti.dk



Oplysninger om produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter findes på www.My-Netti.dk



En manual til genanvendelse af kørestolen kan fås gennem din lokale forhandler eller Downloades på www.My-Netti.dk

13. DIMENSIONER & VÆGT

Dimension* sædebredde	Sædedybde Standard**	Ryghøjde ** (forlænger)	Samlet bredde	Vægt
Netti III XHD				
500 mm	400 – 500 mm	500 (600) mm	740 mm	34,5 kg
550 mm	400 – 500 mm	500 (600) mm	790 mm	36,5 kg
600 mm	400 – 500 mm	500 (600) mm	840 mm	38,5 kg
Netti III XXHD				
650 mm	400 – 500 mm	500 (600) mm	890 mm	40,5 kg
700 mm	400 – 500 mm	500 (600) mm	940 mm	42,5 kg
750 mm	400 – 500 mm	500 (600) mm	990 mm	44,5 kg

* Målt mellem kanter på rammerør. For afstand mellem afskærmninger tillægges 25 mm.

** Målt fra forside af sædet til ryghængsel uden pude.

Ved brug af standard Uno rygpude fratrækkes ca. 30 mm.

*** Målt fra sædeplade til top af ryglæns pude.

i Vægt inkluderer hovedhjul, forreste hjul, benstøtter og armstøtter.
ikke puder.

i Anbefalet dæktryk er: 60 – 65 PSI.

i Maks. brugervægt er 200 kg. Ved brug som sæde i bil: maks. brugervægt 160 kg.

i Ved montering af tilbehør som f.eks. powerkit etc. skal vægten af tilbehøret trækkes fra den maksimale brugervægt.

Forhandler:	
Ramme nummer.:	
Dato:	
Stempel:	



Producent:

Alu Rehab AS
Bedriftsveien 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norge



post@My-Netti.com
Tlf: +47 51 78 62 20
my-netti.no

Distributør



Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Danmark



info@my-netti.com
Tlf: +45 87 88 73 00
Fax: +45 87 88 73 19
my-netti.dk

Distributør

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal
Tyskland

info@my-netti.com
Tlf: +49 5733 922 311
Fax: +49 5733 922 9311
my-netti.de

Distributør

MDH Sp. zo.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Polen

biuro@mdh.pl
Tlf: +48 42 674 83 84
My-Netti.com
