


Vaskemanual

med vedlikeholdsinformasjon
for Netti manuelle rullestoler

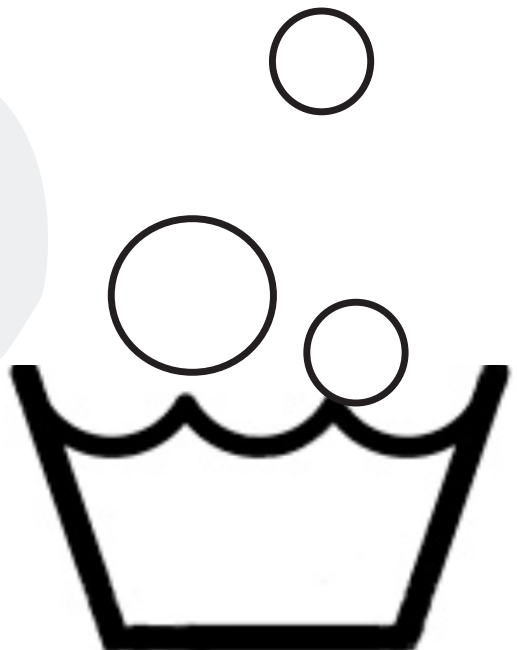

VASKEMANUAL FOR NETTI MANUELLE RULLESTOLER

En komfort / multifunksjons-rullestol er et avansert hjelpemiddel for langtidsbruk. Den utstrakte bruken av rullestolen fører til at stolen oppfattes som en del av brukeren og stolens tilstand reflekterer direkte tilbake til hvordan brukeren oppfattes.

Alu Rehab setter sin stolthet i å produsere rullestoler som er komfortable og trygge i bruk både for bruker og ledsager. Vi lager holdbare rullestoler som kan brukes og gjenbrukes i mange år med alle sine funksjoner intakt så lenge de vedlikeholdes ordentlig.

Alu Rehab arbeider for å redusere miljøbelastningen både ved valg av materialer, under utvikling, produksjon og avfallshåndtering samt under vedlikehold og resirkulering av materialer.

Vi vet at det beste for miljøet er at rullestolene brukes og gjenbrukes lenge. Ved endt bruk er stolen forberedt for at materialene blir resirkulert.

Derfor har vi laget denne vaske- og gjenbruksmanualen for å gjøre det enkelt å vedlikeholde og renovere Netti rullestolene og sikre dem lang levetid.

Nye deler / reservedeler, lakk, nye puter, polstringer og nye hjul kan kjøpes hos Alu Rehab slik at selv en slitt rullestol kan gjenbrukes etter renovering.

Takk for at du har valgt et Netti produkt fra Alu Rehab.

Alle Netti rullestoler er testet av TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH i Tyskland og oppfyller kravene i standarden EN-12183.

Netti rullestolene er krasj-testet og oppfyller kravene i standard ISO 7176-19:2008 for bruk som stol i kjøretøy.

HVORFOR REGELMESSIG VASK?

Det er 3 hovedgrunner for å holde en rullestol ren:

- Bidra til at brukeren oppfattes på sitt beste.
- Opprettholde teknisk kvalitet, sikre teknisk gode funksjoner over lang tid.
- Forhindre spredning av bakterier og annen smitte.

Det er 4 nivå for rengjøring, avhengig av miljøet der rullestolen brukes og antall brukere:

- Personlig rullestol - én bruker - private omgivelser
- Personlig rullestol - vekslende brukere, én etter én - institusjon.
- Rullestol i institusjon - hyppig veksel av brukere.
- Rullestol på sykehus - hyppig veksel av brukere - økt risiko for spredning av smitte.

ØKTE KRAV TIL RENGJØRING

Økte antall av infeksjoner med multiresistente bakterier har i de siste årene ført til økt behov for rengjøring og desinfeksjon av hjelpemidler.

Den vanligste og mest skånsomme desinfeksjon av en rullestol får man ved å gni hele stolen med en klut eller serviett fuktet med hydrogenperoksid eller annet godkjent flytende desinfeksjonsmiddel. Dette utføres etter at produktet først er rengjort med såpe og vann.

Dersom det på sykehus og institusjoner er påkrevet å vaske Netti rullestol i vaskemaskin, må rullestolen først stripes ned før den settes i vaskemaskinen. Etter vask må stolens akslinger og lager oljes og smøres før stolen settes sammen og tilpasses en ny bruker.

INNHold

Vaskemanualen er inndelt i 4 rengjøringsnivå avhengig av behovet for rengjøring.

NIVÅ 1 RENGJØRINGPROSEDYRE - ËN BRUKER - PRIVATE OMGIVELSER

■ Rullestol	Side 4
■ Sittesystem	Side 4

NIVÅ 2 RENGJØRINGPROSEDYRE - ËN BRUKER - INSTITUSJON

■ Rullestol	Side 5
-------------------	--------

NIVÅ 3 RENGJØRINGPROSEDYRE - HYPPIG VEKSEL AV BRUKERE

■ Rullestol	Side 6
-------------------	--------

NIVÅ 4 RENGJØRINGPROSEDYRE - HYPPIG VEKSEL AV BRUKERE SYKEHUS

■ Rullestol - håndvask	Side 7
■ Rullestol - maskinvask	Side 8

VEDLIKEHOLD

■ Ramme	side 9
■ Hjul	side 9
■ Armstøtter	side 10
■ Ryggenheten	side 10
■ Kjørehåndtak / kjørebøyle	side 10
■ Hodestøtte	side 10
■ Seteenheten	side 11
■ Rygg og tilt mekanisme	side 11
■ Benstøtter	side 11
■ Bremsen	side 11
■ Toppesikring	side 11
■ Generell informasjon	side 11

FUNKSJONSKONTROLL

■ Funksjonskontroll	side 12
---------------------------	---------

KVITTERING

■ Underskrift for utført kontroll	side 14
---	---------

Denne vaskemanualen kan lastes ned fra vår hjemmeside : www.My-Netti.no

Vaskemanual for manuelle rullestoler

Versjon: 2023-06

FREKVENNS: 2 GANGER I MÅNEDEN ELLER OFTERE - ETTER BEHOV

1. Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges tilbake i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.
2. Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Velcro blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.
3. Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester.
4. Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5. Sett stolen til tork i romtemperatur. Rammen kan poleres med bil-voks.
6. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.



Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer, sitteplate og etiketter.

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET

Vi anbefaler av hygien hensyn å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen. Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de mest brukte Netti putene. Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask. Borrelås / Velcro "HAN" kan rengjøres med en stål fil-børst.

SETEPUTER

	UNO Seat	Netti Sit
KJERNEN		
Vask	Hånd vask 40°C	Hånd vask 40°C
Desinfeksjon	Virkon S* Autoklave 105°C	Virkon S* Autoklave 105°C
Tørking	Vri ut vannet Tørkes stående	Vri ut vannet Tørkes stående
BESKYTTELSESTREKK	Ikke standard	
Vask		Maskin vask 60°C Tørkes av med såpe og vann
Tørking		Sentrifugør / lufttørking. Ikke egnet for tørketrommel
YTTERTREKK		
Vask	Maskinvask 60°C	Maskinvask 60°C
Tørking	Tørketrommel max 85°C	Tørketrommel max 85°C

RYGGPUTER

KJERNE	Alle Alu Rehabs rygg-puter behandles likt	
Vask	Vaskes ikke	
Desinfeksjon	Autoklave 105°C, Virkon S*	
Tørking	Vri ut vannet Tørkes stående	
YTTERTREKK	Ryggputer levers med Easy Care, 3D eller Temp trekk.	
Vask	Maskinvask 60°C.	Temp C°: håndvask
Tørking	Temp C°: Sentrifugør / lufttørking - Ikke tørketrommel. Easy Care, 3D: Sentrifugør; lufttørking, tørketrommel max 85°C.	

ÉN BRUKER - INSTITUSJON**FREKVENS: 2 GANGER I MÅNEDEN ELLER OFTERE - ETTER BEHOV**

1. Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges til-bake i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.
2. Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Velcro blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.
3. Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester.
4. Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5. Sett stolen til tørk i romtemperatur. Rammen kan poleres med bil-voks.
6. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.



Desinfeksjon: gni hele rullestolen med en klut fuktet med hydrogenperoksid eller god kjent desinfeksjonsmiddel, etter at den er vasket.



Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer, sitteplate og etiketter.

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET

Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler hvis en ny bruker skal overta stolen.

Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en oversikt over de mest brukte Netti putene.

Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask.



Borrelås / Velcro "HAN" kan rengjøres med en stål fil-børst.

FREKVENS: FOR HVER NY BRUKER ELLER MINIMUM 2 GANGER I MÅNEDEN

1. Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges tilbake i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.
2. Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Velcro blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.
3. Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester.
4. Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5. Ta av hjulene snu stolen opp ned og la den tørke i romtemperatur før akslinger oljes og smøres. Rammen kan poleres med bil-voks.
6. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.
7. Monter stolen og tilpass alle komponenter til den nye brukeren. Erstatt skadede eller manglende deler. Se vedlikeholdbeskrivelsen senere i denne manualen for flere detaljer.



Informasjon om hvordan stolen skal tilpasses en bruker står i stolens brukermanual og kan lastes ned fra vår hjemmeside www.My-netti.com



Desinfeksjon: gni hele rullestolen med en klut fuktet med hydrogenperoksid eller godkjent desinfeksjonsmiddel, etter at den er vasket.



Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer, sitteplate og etiketter.

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET

Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen.

Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en oversikt over de mest brukte Netti putene.

Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask.



Borrelås / Velcro "HAN" kan rengjøres med en stål fil-børst.

FREKVENNS: FOR HVER NY BRUKER ELLER MINIMUM 2 GANGER I MÅNEDEN

HÅNDVASK-PROSEDYRE:

1. Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges tilbake i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.
2. Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Velcro blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.
3. Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester.
4. Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5. Ta av hjulene snu stolen opp ned og la den tørke i romtemperatur før akslinger oljes og smøres. Rammen kan poleres med bil-voks.
6. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.
7. Monter stolen og tilpass alle komponenter til den nye brukeren. Erstatt skadede eller manglende deler. Se vedlikeholdbeskrivelsen senere i denne manualen for flere detaljer.



Informasjon om hvordan stolen skal tilpasses en bruker står i stolens brukermanual og kan lastes ned fra vår hjemmeside www.My-netti.com



Desinfeksjon: gni hele rullestolen med en klut fuktet med hydrogenperoksid eller godkjent desinfeksjonsmiddel, etter at den er vasket.



Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer, sitteplate og etiketter.

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET



Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen.

Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en oversikt over de mest brukte Netti putene.

Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask.



Borrelås / Velcro "HAN" kan rengjøres med en stål fil-børst.

NESTE SIDE: MASKINVASK PROSEDYRE.

FREKVENNS: FOR HVER NY BRUKER ELLER MINIMUM 2 GANGER I MÅNEDEN

MASKINVASK - PROSEDYRE:

1. Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.
2. Fjern høydejusterbare skyve-håndtak, steplate (hvis den er i tre) og armlener før vask. Seteplate av polycarbonat tåler maskinvask og må ikke avmonteres. Delene vaskes med svamp og mildt såpevann utenfor vaskemaskinen.
3. Sett rullestolen i maskinen og vask den.
4. Etter endt maskinvask; ta av hjulene, snu stolen opp ned og la den tørke i romtemperatur før akslinger oljes og smøres. Rammen kan poleres med bil-voks.
5. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.
7. Monter stolen og tilpass alle komponenter til den nye brukeren. Erstatt skadede eller manglende deler. Se vedlikeholdbeskrivelsen senere i denne manualen for flere detaljer.



Informasjon om hvordan stolen skal tilpasses en bruker står i stolens brukermanual og kan lastes ned fra vår hjemmeside www.My-netti.com

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET



Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen.



Dersom den forrige brukeren hadde infeksjoner - muligens med multiresistente bakterier, er det påbudt å erstatte alle polstrede deler med nye.



Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en oversikt over de mest brukte Netti putene. Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask.



Borrelås / Velcro "HAN" kan rengjøres med en stål fil-børst.

RENOVERING - "RESIRK"

Før man starter kontroll og ettersyn, er det en stor fordel å sette rullestolen på et løftebord for å få riktig arbeidsstilling og for å slippe unødvendige løft. Bruk høykvalitets verktøy og ha brukermanualen tilgjengelig.


Rengjør rullestolen først -se rengjøringsbeskrivelse på forrige side. Vanskelige flekker som sitter igjen etter rengjøringen, fjernes med rødsprit. Stolen plukkes ned til rammen slik at den står på tippesikringene. Det vil si at puter, hodestøtte, beinstøtter, drivhjul, svinghjul, armlener og evt tilleggastutstyr fjernes.

RAMMEN

Rammen sjekkes for eventuelle deformasjoner, brekkasje, skader, sår og manglende skruer, bolter og muttere. Utslitte deler erstattes og smøres opp slik at standarden teknisk sett blir som ny. Deformert ramme og deler kastes.

DRIVHJUL

Drivhjul og drivringer sjekkes. Deformerte hjul må kastes. Hjulene vaskes med rødsprit. Felgene rengjøres og dekkene sjekkes for skader, slitasje og eventuelle sprekker. Om nødvendig må dekkene byttes. Hurtigkobling/drivhjulsaksling smøres med olje. Kontroller at hurtigkoblingen låser hjulet i montert tilstand. Dette sjekkes slik: Før hurtigkoblingen inn i navet ved å trykke inn knappen på hurtigkoblingen, slipp knappen og dra i drivhjulet som da skal sitte fast.

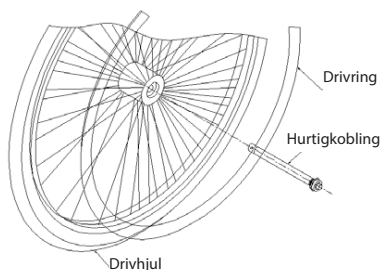

SVINGHJUL OG FORGAFFEL


Forgaffelen rengjøres med rødsprit. Hurtigkoblingen/ akslingen smøres med olje og sjekkes for slark.

Slarker det i innfesting av hurtig-koblingen/
akslingen, må denne demonteres, rengjøres med
rødsprit og monteres igjen med gjengelim (full låsing)
slik at forgaffelen låses i lagerhuset.

Svinghjul demonteres fra forgaffelen for rengjøring av akslingen. Hjulene rengjøres med rødsprit og sjekkes for slark i lageret. Ved slark eller stor slitasje skal svinghjulene skiftes.


Kontroller at hurtigkoblingen låser hjulet i montert tilstand (se brukermanual for detaljer).

Kontroller at lagerhuset er loddrett montert i forhold til bakken for å få korrekte kjøreegenskaper (se bruker-manual for detaljer).

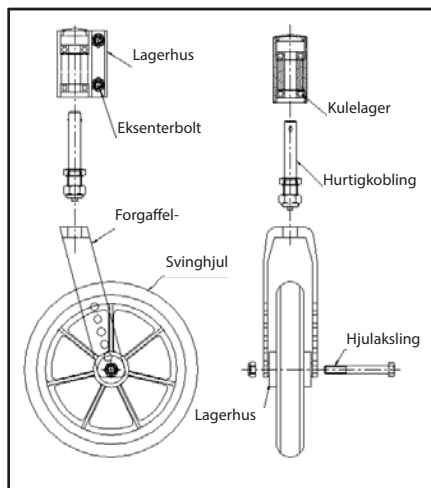


ARMLENER - Netti III/Netti V

Kontroller at låsesporet er rent. Sjekk at posisjons-skruen er montert og står i riktig posisjon. Kontroller at armlenspad er montert med 2 skruer, evt etterstram dem. Armlens-paden kan skyves frem og tilbake, velg lik plassering på begge armlen. Sett armlenet på plass i armlensbraketten på rullestolrammen. Juster settskruene på armlensbraketten til slarken er tatt opp. Fest settskruene med kontermutterne.

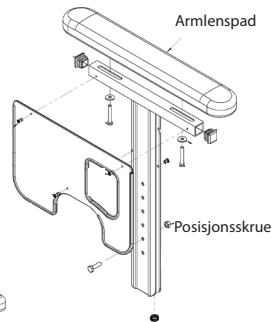


ARMLENER Netti 4U

Påse at låse- og utløsermekanismen fungerer. Sjekk at dybde-/lengde forskyvning av armlenspads fungerer. Stram skruene til armlenspads.

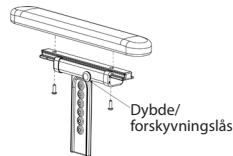

KJØREHÅNDTAK

Sjekk for skader på gummi- og kjørehåndtak og erstatt hvis de er slitt. Kontroller at sikkerhets-skruen på kjørehåndtakene er montert og at føringen for kjørehåndtaket med klem-braketten er ikke deformert.

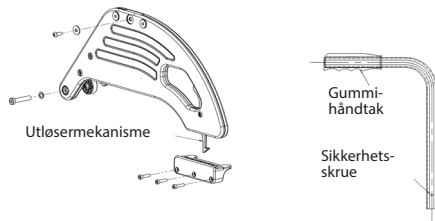


⚠ Hvis kjørehåndtaket med holk er skadet, må hele kjørehåndtaket skiftes.

KJØREBØYLE

Kontroller samtlige skruer og innfestninger. Løsne skruer demonteres og rengjøres med rødsprit før de monteres med gjengelim (full låsing). Kontroller at tilt- og ryggutløser håndtakene er riktig merket med symboler. Justeringshendler/ratt sjekkes og byttes ved behov.

Hvis feil rengjøring har skadet kjørehåndtak eller -bøyle, må disse skiftes til nye.

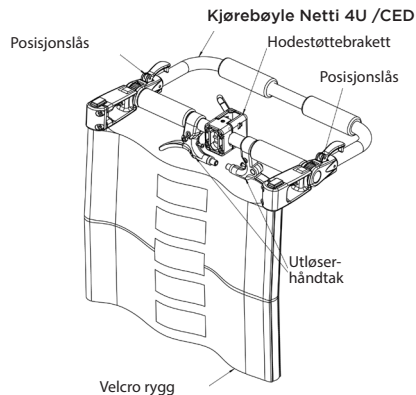


RYGGENHET

Sjekk Velcro-ryggen for skader i sømmer og låser, Rengjør Velcro om nødvendig med en fuktig klut. Velcro "han" kan rengjøres med en filbørste av stål. Sikkerhetsbånd strammes.

HODESTØTTE

Hodestøtten sjekkes for rifter og sår samt om den er forurenset/skitten. Det anbefales å bytte til ny hodestøtte ved ny bruker av rullestolen. Skruer og ratt smøres med olje. Alle justeringsratt og -hendler sjekkes og byttes ved behov.

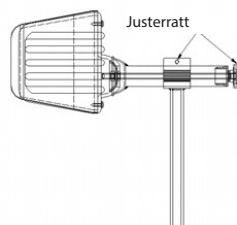

SETE-ENHET

Seteplaten kontrolleres for brudd og skader og evt. manglende skruer erstattes. Sitteputen rengjøres/ erstattes som beskrevet side 4.

RYGG OG TILT-MEKANISME

Gassfjærene sjekkes for lekkasje og erstattes ved skader. Wire og wire-overføringer oljes og etterstrammes, eventuelt byttes etter behov. Gassfjærene skal rengjøres og stempelstang skal oljes.

BENSTØTTER

Kontroller at alle justeringsskruer, reguleringsratt og hendler er hele og på plass. Etterstram løse muttere og skruer og olje alle bevegelige deler.

NB Justerstaget i mekanisk lås skal ikke oljes.

Kontroller mekanisk lås på vinkelregulerbare benstøtter, om nødvendig bytt deler / kjegle som er slitt. Kontroller benstøttenes låsing til rammen ved å ta støttene av og på. Om nødvendig oppgrader stolen med nye braketter for benstøttene.

PARKERINGSBREMSE

Kontroller at alle skruer er på plass. Juster bremsen slik at presset mot drivhjulet hindrer drivhjulet å rulle, mens kraftbehovet ved bruk av bremsen er rimelig. Hvis deler er defekt eller mangler skal hele bremsene erstattes p.g.a. sikkerhet. Trommelbrems rengjøres og justeres slik at bremsestrykket låser hjulene ved maks trykk.

TIPPESIKRING

Kontroller at tippesikringene fungerer ved å sette dem ut av og i funksjon. Juster tippesikringen til riktig høyde i forhold til drivhjulsposisjonen (se brukermanual for korrekt innstilling - ca 30 mm over bakken i funksjon).

GENERELL INFORMASJON

Bruk KUN originale deler fra Alu Rehab AS.
Anbefalte oljer: Sykkelolje eller symaskin-olje (tynn olje)
Olje til gassylinder: HHS Lube (Würth).

Anbefalt lim:








Loctite 2701 (full låsning)

Loctite 243 (demonterbar)

Fargekode Sølvfarge: RAL 9007

Fargekode grafitgrå: RAL 7024

Fargekode svart: RAL 9005

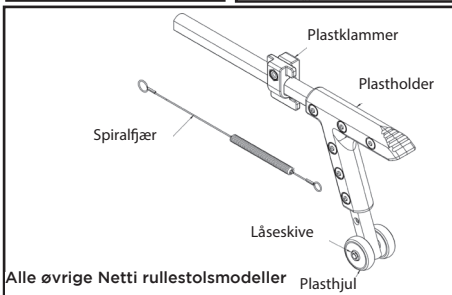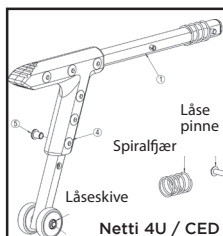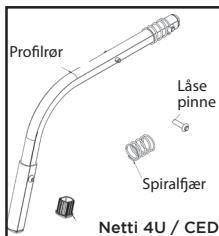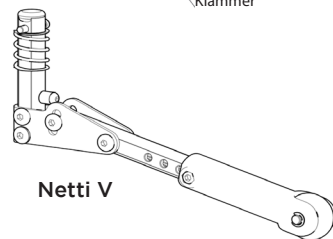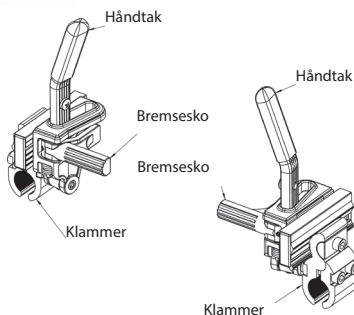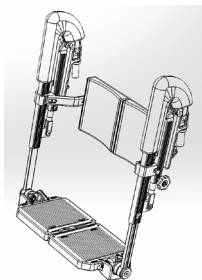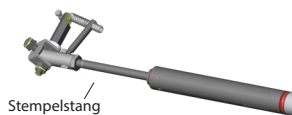

FUNKSJONKONTROLL FØR PRODUKTET LEVERES TIL BRUKER/KUNDE

Sjekk at rullestolen er innstilt i henhold til bestilling, kontroller mot endkontroll sjekkliste.

Visuell kontroll:

- Alle plugger, propper og skruer skal være på plass.
- Sjekk sømmer på Velcro-rygg - de skal være uten frynser.
- Sjekk at seteplaten er hel, har riktig lengde og er riktig montert i forhold til setedybde.
- For Netti Comfort seteplate, sjekk at seteduken er hel.
- Hver ny bruker skal få utlevert en brukermanual til stolen. Denne kan lastes ned fra www.My-Netti.com

Funksjon	Modell	Funksjonstest/sjekk	Utført/OK
Tilt	Netti III familien Netti S Netti 4U familien Netti Dynamic familien Netti AdaptPro familien Netti V familien	Beveg tiltfunksjoner i begge ytterstillinger og sjekk at det er fri passasje. Kontroller wire for slark, etterstram om nødvendig og se til at den går fri evt hinder. Sjekk at tiltfunksjonen er merket med tilt symbol-merke.	
Rygg / recline regulering	Netti III familien Netti S Netti 4U familien Netti Dynamic familien Netti AdaptPro familien Netti V familien	Beveg ryggreguleringen i begge ytterstillinger og sjekk at ryggen beveger seg fritt. Kontroller wire for slark, etterstram om nødvendig. Sjekk at ryggfunksjonen er merket med recline symbolmerke.	
Kjørehåndtak	Alle rullestoler unntatt Netti 4U CED og BASE	Holker skal være hele. Kjørehåndtak skal kunne reguleres lett og låses i ønsket posisjon. Stoppeskrue og fjær- stålplaten skal være montert.	
Kjørebøyle	Netti 4U CED	Ingen slark i reguleringsmekanismen. Etterstram om nødvendig.	
Hodestøtte	Alle rullestoler	Låseskruen på innfestingsbraketten skal være skrudd til og fjærstålplaten montert. Sjekk at hodeputen er ren og hel og at alle reguleringsmuligheter fungerer.	
Armlene	Netti III familien Netti S, Netti 4U familien Netti Dynamic familien Netti AdaptPro familien Netti V familien	Armlenpolster skal stå i lik posisjon og være av samme type på begge sider. Kontroller at høydereguleringen kan låses i ønsket posisjon. Juster plastskruer i armlensbraketten for å ta opp slark, stram kontermutterne. Armlenet skal gli lett i armlensbraketten. Stoppeskruen skal stå like høyt på begge sider. Glidemekanismen skal kunne reguleres lett. Sjekk at armlenet låser når det felles ned.	

Funksjon	Modell	Test/sjekk	Utført/OK
Lagerhus	Alle modeller unntatt Netti 4U familien Netti AdaptPro familien Netti V familien	Sjekk at lagerhusene er montert i loddrett posisjon på horisontalt grunnlag.	
Svinghjul	Alle rullestol-modeller	Sjekk at svinghjulene låser i lagerhusene. De skal lett kunne taes av og på (hurtigkobling). For å være sikker på at hurtigkoblingen låser skal det være litt slark i denne. Begge svinghjul skal være montert i lik posisjon i forgaffelen.	
Drivhjul	Alle rullestol-modeller	Sjekk at drivhjulene låser i montert posisjon. De skal lett kunne taes av og på (hurtigkobling). For å sikre at hurtigkoblingen låser, skal det være litt slark i denne. Begge drivhjul skal være montert i lik hullposisjon i hjulrammebrakketten.	
Bremser	Alle rullestol-modeller	Sjekk at de er likt innstilt på begge sider og at de låser drivhjulene i låst posisjon uten at den nødvendige kraften for å låse er for stor.	
Uttreksstykke benstøtter	Alle rullestol-modeller	Uttreksstykket skal stå likt på begge sider og være fastskrudd.	
Benstøtter - vinkelregulerbare	Netti III familien Netti S Netti 4U familien Netti Dynamic familien Netti V familien	Skal lett kunne låses i ønsket vinkel. Skal lett kunne taes av og på. Det skal ikke være slark i stolramme-innfestingen. Lengdejusteringen skal fungere lett. Leggputene skal stå i samme høyde og dybde på begge sider. Knepolster skal være rengjort.	
Benstøtter - universal	Netti III familien Netti S Netti 4U familien Netti Dynamic familien Netti V familien	Sjekk at de lett kan taes av og på. Det skal ikke være slark i stolramme-innfestingen. Lengdejusteringen skal fungere lett.	
Tippesikring	Alle rullestol-modeller	Kontroller at innstillingene er like på begge sider og i riktig posisjon i forhold til drivhjulene. Kontroller at tippesikringen lar seg sette i aktiv og passiv stilling. Sjekk at tippesikringene er merket med symbolmerker.	
Retningsstabil	Alle rullestol-modeller	Sett stolen i bevegelse ved å skyve forsiktig med lik kraft på begge sider av kjørebøylen når stolen står på horisontalt gulv. Stolen skal selv trille videre i tilnærmet rett retning. Hvis ikke, sjekk brukermanualen - svinghjul og drivhjul.	

Påse at brukermanualen alltid er tilgjengelig.

RESIRKULERING

Rullestolen er designet for å gjøre det enkelt å dele opp stolens komponenter i enkelte materialer for å gjøre resirkuleringen enklest mulig. Se Alu Rehabs Resirkuleringsmanual SM0032 for å få oversikt over hvilke materialer som er brukt til de forskjellige komponentene og hvordan de kan separeres og resirkuleres.

Vurder alltid reparasjon og gjenbruk før kast. Det mest miljøvennlige er å gjenbruke hvis mulig.

Ta kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon for å få informasjon om hvilke komponenter og materialer de kan gjenvinne.

Det laveste nivå av gjenvinning er å skille metall, plast + skumkomponenter og tre.

Det høyeste nivået er å skille mellom de enkelte metallsorter, plastsorter og tre.



Gassfjær, batterier og elektriske komponenter skal alltid skilles i separate beholdere og leveres til autoriserte gjenvinningsstasjoner.

Ødelagte deler kan bli råstoff til nye produkt!

KVITTERING FOR UTFØRT VASK OG GJENBRUKS-PROSEDYRE.

Stolnummer / serienummer


Prosedyre utført

OK

• Rengjøringprosedyre

• Renovering

• Funksjonskontroll

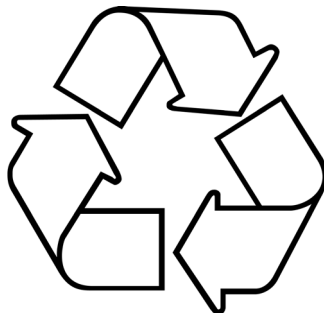☐☐☐

Rullestolen er gjennomgått på ovenforstående punkter og er klar til utlevering:

Verksted

Tekniker:

.....

Sted - Dato :

Signatur:

.....

Denne utfylte og signerte vaskemanualen skal følge rullestolen ved utlevering for å dokumentere at rullestolen er renoveret og har fått service i henhold til produsentens anbefalinger. Dette sikrer opprettholdelse av sluttbrukers sikkerhet og lang levetid for rullestolen.

Prosedyre utført

OK

- Rengjøringprosedyre
- Renovering
- Funksjonskontroll

☐
☐
☐

Rullestolen er gjennomgått på ovenforstående punkter og er klar til utlevering:

Verksted

Tekniker:

Prosedyre utført

OK

- Rengjøringprosedyre
- Renovering
- Funksjonskontroll

☐
☐
☐

Rullestolen er gjennomgått på ovenforstående punkter og er klar til utlevering:

Verksted

Tekniker:

Prosedyre utført

OK

- Rengjøringprosedyre
- Renovering
- Funksjonskontroll

☐
☐
☐

Rullestolen er gjennomgått på ovenforstående punkter og er klar til utlevering:

Verksted

Tekniker:

*inspire
joy of life*

Manufacturer:

 Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

 post@My-Netti.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.no

Distributor

 Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
 Denmark

info@my-netti.com
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
my-netti.dk

Distributor

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal
Germany

info@my-netti.com
T: +49 5733 922 311
F: +49 5733 922 9311
my-netti.de

Distributor

MDH Sp. zo.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Poland

biuro@mdh.pl
T: +48 42 674 83 84
my-netti.com