



Netti[®] *Ryggdynor*

GMDN 11100 and GMDN 62720

Användarmanual



CE Denna produkt uppfyller kraven i MDR
2017/745/EU för medicinska produkter.

MD0151 SE 2022-09

*inspire
joy of life*

ANVÄNDARMANUAL FÖR NETTI RYGGDYNOR

Manualen innehåller viktig information för att produkterna ska vara säkra att använda.



Netti Uno Back

Är en PU gjuten ryggdyna med 100 mm sidostöd. Den fästes med kardborrband. Dynan är 500 mm hög och är steglöst justerbar i höjdlid. Ryggdynan lyfts från sittdynan, så att svankstödet hamnar i nivå med ländryggen. Se till att det finns utrymme för användarens höft och bakdel. Kom ihåg att ställa in rullstolens kardborreband till den enskilde användaren.

Avsedd användning i rullstolar och sittsystem.



Netti Smart

Är en flerskiktad konstruerad PU dyna med 120 mm sidostöd. Flikarna på baksidan öppnas och dynan fästes med kardborrband. Dynan finns som 500 mm hög samt 600 mm hög med ryggförlängare. Den är steglöst justerbar i höjdlid. Ryggdynan lyfts från sittdynan, så att svankstödet är i nivå med ländryggen. Se till att det finns utrymme för användarens höft och bakdel. Kom ihåg att ställa in rullstolens kardborreband till den enskilde användaren.

Avsedd användning i rullstolar och sittsystem.



Netti Stabil

Är en flerlager konstruerad PU dyna med 170 mm sidostöd. Textilflikarna på baksidan öppnas och dynan fästes med kardborrband. Dynan finns som 500 mm hög samt 600 mm hög med ryggförlängare. Den är steglöst justerbar i höjdd. Ryggdynan lyfts från sittdynan, så att svankstödet är i nivå länderyggen. Se till att det finns utrymme för användarens höft och bakdel. Textilflikarna är stängda för att täcka banden i ryggen. Kom ihåg att ställa in rullstoleryggens kardborreband till den enskilde användaren.

Avsedd användning i rullstolar och sittsystem.



Netti Super Stabil


Är en flerlager konstruerad PU dyna med 170 mm sidostöd. Textilflikarna på baksidan öppnas och dynan fästes med kardborrband. Dynan finns som 500 mm hög samt 600 mm hög med ryggförlängare. Den är steglöst justerbar i höjdd. Ryggdynan lyfts från sittdynan, så att det finns utrymme för användarens höft och bakdel. Svankstödet inuti dynan är justerbart och placeras i vid länderyggen hos brukaren. Textilflikarna är stängda för att täcka banden i ryggen. Kom ihåg att ställa in rullstolens kardborreband till den enskilde användaren. Avsedd användning i rullstolar och sittsystem.

 **Netti** Kyphotic

Är en flerlager konstruerad PU dyna med 170 mm sidostöd. Ryggdynan är utvecklad för brukare med krum rygg. Den fästs med kardborreband. Dynan finns som 500 mm hög och är steglöst justerbar i höjdlid. Kom ihåg att ställa in rullstolens kardborreband till den enskilde användaren. Avsedd användning i rullstolar och sittsystem

MONTERING AV RYGGDYNAN

- 1. På baksidan av ryggen finns två rader med numrerade halvmånar.
- 2. Montera ryggen på rullstolens kardborreband. Observera att ryggen skall monteras i samma höjd på båda sidor. När halvmånarna hamnar på samma nivå garanteras horisontellt läge. Det vita området kan eventuellt märkas med penna för korrekt position, efter exempelvis tvätt.
- 3. På Netti Smart, Netti Stabil och Netti Super Stabil finns ett bakre överdrag.
- Dessa viks kring kardborreryggen för en extra låsning samt en snygg design.

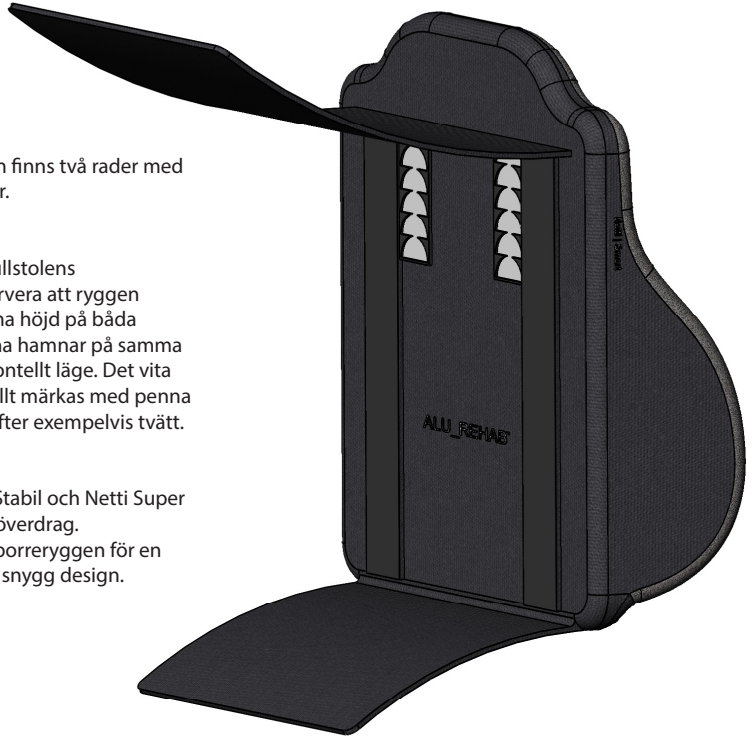

NETTI SMART, NETTI STABIL OCH NETTI SUPER STABIL FINNS I 600 MM HÖJD. VID ANVÄNDNING AV DEM SKA EN RYGGFÖRHÖJARE MONTERAS.

MONTERING AV RYGGFÖRHÖJARE

- Ta bort skyddspluggarna i ryggrörens övre del.
- Skruva ur skruvarna för kardborreryggen på båda sidor. Dessa sitter baktill och håller kvar kardborreryggen på ryggrören.
- Skruva även ur skruven som håller körhandtag/körbygelfästet i ryggröret (Netti III).
-
- För ned ryggförhöjaren i båda ryggrören.
- Skruva tillbaka skruvarna.
- Kontrollera att ryggförhöjaren sitter fast.
-
- Anpassa kardborretyget
- Klipp av det i rätt längd.
-
- Montera ryggdynan

RUTINER FÖR KONTROLL

- Behov av tvätt kommer att variera från användare till användare.
- En tumregel kan vara att en gång i månaden ta ut kärnan från överdraget och låt den stå på högkant för att luftas.
- Passa samtidigt på att tvätta överdraget, som ska sändas under tvätt egenskaper.
- För att ta bort fläckar går det bra att använda tvål och vatten samt en mjuk trasa.
- För att ta bort envisa fläckar, blöta fläcken lite i förväg.

RENGÖRING AV NETTI-DYNORNA

KÄRNAN	
Tvätt	Handtvätta 40 °C
Desinficering	Virkon S
	Autoklav 105 °C
Torkning	Vrid ur
	Lufttorka i sidoläge
YTTERSKYDDET	
Tvätt	Maskintvätt 60 °C
Torkning	Torktumla vid max. 85 °C

Manufacturer:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

post@My-Netti.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.no

Distributor

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

info@my-netti.com
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
my-netti.dk

Distributor

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal
Germany

info@my-netti.com
T: +49 5733 922 311
F: +49 5733 922 9311
my-netti.de

Distributor

MDH Sp. zo.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Poland

biuro@mdh.pl
T: +48 42 674 83 84
my-netti.com
