

 **Netti[®] III XHD**

 **Netti[®] III XXHD**

GMDN 41620 EMDN Y122103 og Y122106

Bruker manual

 Dette produktet samsvarer med MDR
2017/745/EU for medisinske produkter.

UM0106NO 2023-06

*inspire
joy of life*

INNHOLD

1. INTRODUKSJON	4
1.1 BRUKSOMRÅDER / INDIKASJONER FOR NETTI III XHD OG NETTI III XXHD	5
1.2 KONTRAINDIKASJONER	5
1.3 KVALITET OG HOLDBARHET	5
1.4 MILJØET OG AVFALLSHÅNDTERING	6
1.5 INFORMASJON FOR GJENBRUK	6
1.6 OM DENNE HÅNDBOKEN	7
1.7 VITALE MÅL	7
2. HURTIGREFFERANSE	9
3. BESKRIVELSE*	10
4. FUNKSJONER HOS NETTI III XHD & NETTI III XXHD	11
5. TILBEHØR	12
5.1 MONTERING AV HOFTEBELTE	15
5.2 MONTERING AV H-BELTE	15
6. MONTEREING OG JUSTERING	16
6.1 UTPAKKING (SE KAPITTEL 5 OG 6)	16
6.2 DRIVHJUL	16
6.3 FORGAFFEL	16
6.4 FORHJUL	17
6.5 SETEHØYDE FORAN	17
6.6 SETEHØYDE BAK	18
6.7 RYGGSTØTTE	18
6.8 JUSTERING AV SETEDYBDEN	19
6.9 JUSTERING AV SETEDYBDE FORAN	20
6.10 TIPPESIKRING	21
6.11 JUSTERING AV ARMSTØTTER	21
6.12 PUTER	22
6.13 JUSTERE BORRELÅSEN	22
6.14 BENSTØTTER	23
6.15 HODESTØTTE	26
6.16 SKYVEHÅNDTAK	28
6.17 JUSTER BREMSENE	28
7. SETEVINKEL / TILT OG RYGG VINKEL	30
7.1 SETEVINKEL	30
7.2 RYGGVINKEL	30
7.3 NØKKELOD OM TILT OG LENE PÅ STATISKE KOMFORT RULLESTOLER	30
7.4 REDUSER FAREN FOR UTGLIDNING, TRYKKSÅR OG SHEAR:	31
7.5 BRUK AV TILTHÅNDTAK: VIPPE SETE-ENHETEN	31
7.6 BRUK AV RYGGREGULERING-HÅNDTAKET: REGULERING AV STOLENS RYGGVINKEL	32

8. TRANSPORT	33	
8.1	TRANSPORT I BIL	33
8.2	LEGGESAMMEN FOR TRANSPORT	35
8.3	TRANSPORT I FLY	35
8.4	Å REISE MED OFFENTLIG TRANSPORT	35
9. MANØVRERING	36	
9.1	GENERELLE TEKNIKKER	36
9.2	KJØRETEKNIKKER - STEG OPP -	37
9.3	KJØRETEKNIKKER - TRINN NED -	37
9.4	KJØRETEKNIKKER - BAKKE -	38
9.5	KJØRETEKNIKKER - OPP TRAPPER -	38
9.6	KJØRETEKNIKKER - NED TRAPPER -	39
9.7	FORFLYTNING	39
9.8	BALANSEPUNKT	40
9.9	LØFTING AV RULLESTOL	41
10. VEDLIKEHOLD	42	
10.1	VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER	42
10.2	RENGJØRINGSINSTRUKSJON	42
10.3	LANGTIDSLAGRING	43
11. FEILSØKING	44	
12. TESTER OG GARANTI	45	
12.1	TESTER	45
12.2	GARANTI	45
12.3	REKLAMASJON	45
12.4	NETTI CUSTOMIZED / SPESIALTILPASNINGER	46
12.5	PRODUKTKOMBINASJONER	46
12.6	SERVICE OG REPARASJON	46
13. MÅL OG VEKT	47	

1. INTRODUKSJON



Netti III XHD og XXHD er komfortrullestoler for både innendørs og utendørs bruk. De er testet i henhold til EN 12183:2014. Testene ble utført av TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland.

I Alu Rehab forutsetter vi at rullestoler velges basert på en grundig vurdering med fokus på brukerens behov og krav fra omgivelsene.

Det er derfor viktig å kjenne til rullestolens muligheter og begrensninger. Netti III XHD og XXHD er rullestoler laget for brukere med behov for komfort og avlastning. Kombinasjonen av sittesystem og de ergonomiske løsningene i rammekonstruksjonen gir mange muligheter for tilpasning og justeringer og muligheter for å variere sittestillingen fra aktivitet til hvile ved hjelp av tilt- og ryggglene-funksjoner.

Netti III XHD & XXHD er tilgjengelig i 2 versjoner:

Netti III XHD setebredder:	500 – 600 mm
Netti III XXHD setebredder:	650 – 750 mm

Maks brukervekt:	200 kg.
-------------------------	----------------



Ved montering av tilbehør som hjelpemotor etc, må vekten av tilbehøret trekkes fra maks brukervekt.



Netti III HD - er kollisjonstestet med maks brukervekt 160 kg. Netti III XHD & XXHD er forsterkede varianter av Netti III HD og godkjente som bruk som sete i en bil med maks brukervekt 160 kg.



Spesifikasjonene varierer fra land til land.

1.1 BRUKSOMRÅDER / INDIKASJONER FOR NETTI III XHD OG NETTI III XXHD

Netti III XHD og XXHD er multifunksjonelle rullestoler for transport av delvis eller helt immobile personer med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger. Det er en mulighet for en brukere som trenger å kunne variere sittestillingen fra aktivitet til hvile, og som vil ha fordel av å bruke tilt- og lene-funksjoner. Stolen er designet for brukere med behov for komfort og avlastning. Kombinasjonen av sittesystemet og den ergonomiske løsningen i rammekonstruksjonen gir mange muligheter for tilpasning og justeringer.

Funksjonshemningene kan ha flere årsaker. Netti III XHD og XXHD har justerbar sete- og ryggvinkel, slik at brukerne kan endre posisjon, øke mobilitet og korrigere sittestilling (stabilisering), når følgende funksjonshemninger med deres mange mulige årsaker er til stede:

- redusert eller mangler mobilitet
- redusert eller manglende muskelkraft
- redusert bevegelsesområde
- redusert eller begrenset stabilitet i overkroppen eller hele kroppen
- høy brukervekt, røff bruk
- hemiplegi
- revmatiske lidelser
- kranio cerebrale skader, ufrivillige bevegelser
- amputasjoner
- andre nevrologiske eller geriatrike lidelser.



Hvis våre standardløsninger ikke dekker dine behov, ta gjerne kontakt med vår kundeservice for Netti sine tilpassede løsninger.

1.2 KONTRAINDIKASJONER

Med sterkt muskuløs spastisitet anbefaler vi Netti Dynamic System som tilbyr en rammekonstruksjon som følger brukerens bevegelsesmønster. Å ignorere dette rådet kan i uheldige tilfeller føre til deformasjon eller brudd på metalleder i området på bakrøret, benstøttene eller armlenene og dermed også at brukeren kan bli skadet.

1.3 KVALITET OG HOLDBARHET

Netti III XHD og XXHD rullestolene er testet hos TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland, i henhold til den europeiske standarden DIN EN 12183:2014.



Som produsent vurderer Alu Rehab AS testen til å tilsvare 5–6 år normal bruk av stolen. Brukers funksjonshemming, hvor røft den brukes samt vedlikeholds nivået avgjør først og fremst rullestolens holdbarhet. Dermed vil holdbarheten variere avhengig av disse tre faktorene.

1.4 MILJØET OG AVFALLSHÅNDTERING



Alu Rehab og deres leverandører ønsker å beskytte miljøet.

Dette betyr:

- At vi i så langt det er mulig, unngår miljøskadelige stoffer og prosesser.
- At Alu Rehabs produkter sikres lang levetid og høy grad av fleksibilitet - til fordel for miljøet og økonomien.
- At all emballasje kan resirkuleres.
- At rullestolen ble designet for å kunne separeres i komponentmaterialene - for å gjøre resirkulering enklere.



Kontakt din lokale gjenvinningstjeneste for å få riktig informasjon om hvordan dette gjøres i ditt område.



TEMPERATUROMRÅDE

Netti III XHD og XXHD rullestoler er designet for temperaturområder fra -10 °C til + 40 °C.

1.5 INFORMASJON FOR GJENBRUK

Alle produktene fra Alu Rehab er designet for å gi mange års vedlikeholdsfri bruk. Alle produktene kan tilpasses for gjenbruk av en autorisert forhandler. For å garantere ytelse og sikkerhet, anbefaler Alu Rehab følgende tester før gjenbruk.

Undersøk følgende komponenter for funksjon, integritet etc, og bytt om nødvendig ut deler:

- Hjul (slitebane)
- Rullestolramme
- Fronthjul og hurtigutløser
- Nav
- Bremsfunksjon
- Retningsstabilitet på hjul
- Lagre: Test for slitasje og smøring.
- Puter
- Benstøtter
- Armstøtter
- Tilt- og rygglenefunksjoner
- Skyvstang / håndtak
- Tippetisering

Av hygieniske årsaker: Bytt hodestøtten før ny bruker.

Vær også oppmerksom på innholdet i avsnitt 10.2 rengjøring og vedlikehold.

VELTESIKRING

Riktig innstilt tippetisering hindrer rullestolen fra å tippe bakover.

Vi anbefaler alle å bruke tippetiseringen.

Nyeste oppdatering av brukerhåndbok, produktsikkerhetsmerknader, adresser og annen produktinformasjon som tilbakekalling osv. vil bli publisert på vår nettside.

1.6 OM DENNE HÅNDBOKEN

For å unngå skader ved bruk av Netti III XHD- eller XXHD-rullestol, vennligst studer denne håndboken nøye før du begynner å bruke stolen.



Symbol for forbudte handlinger.
Ingen garanti kan kreves
dersom disse handlingene er
utført.



Advarselssymbol.
Når dette symbolet brukes må det
utvises
ekstra stor forsiktighet.



Symbol for viktig informasjon.



Symbol for nyttige tips.



Symbol for verktøy.



Symbol for:
Maks sikker helling for håndbrems.



Symbol for: Maks brukervekt.



Symbol for medisinsk utstyr



Produsent: navn + adresse



Produksjonsdato



Produktets serienummer



Les bruksanvisningen



Vær oppmerksom på at denne håndboken er
oppdatert det år og måned som er angitt på hver side.

Brukerhåndbok på nettet

For bedre lesbarhet (for brukere med nedsatt syn), kan
brukermanualen lastes ned fra vår hjemmeside: [www.
My-Netti.no](http://www.My-Netti.no) – manuals – user manual Netti III XHD &
XXHD.

1.7 VITALE MÅL

Netti III XHD og XXHD er komfortrullestol konstruert
både for utendørs og innendørs bruk.



Spesifikasjonene varierer fra land til land.

TOTAL VEKT: 35 KG
(Stol med bredde på 500 mm)


SETEBREDDE:
Netti XHD: 500, 550, 600,
Netti XXHD: 650, 700, 750 mm



SETEDYBDE:
(Fra ryggpute
til fronten av seteplate)
400 , 425 , 450 , 475, 500 mm



SETEHØYDE:
(Fra gulv til topp seteplate
med 24 " hovedhjul i
øvre hullposisjon).
440 mm*

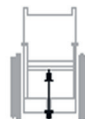

* Ved å endre plassering på hovedhjulene er det
mulig å oppnå setehøyde på 475 mm. Andre
sittehighder kan nås ved å bruk av hjul med andre
diameter og annen plassering.

HØYDE RYGGSTØTTE:
500 mm*



* Bruk av ryggstøtteforlenger gir 600 mm inkludert
ryggpute.

** For Netti III XHD og XXHD med setebredde
500 mm er den totale bredden 240 mm større.
Totalbredden overstiger anbefalte 700 mm.

*** Minst stabil og mest stabil refererer til
plasseringen av tippesikringen. Bruk alltid
tippesikring når du kjører oppoverbakke.



For Netti III XHD og XXHD med
setebredde 500 mm og mer,
overstiger den totale bredden
anbefalte 700 mm.

Spesifikasjon	min.	maks.
Total lengde med benstøtte - horisontalt sete. (Sete + rygg vippet maks fremover. Benstøtter loddrett)	1030 mm (955 mm)	1030
Total bredde **	740 mm	990
Sammenfoldet lengde	780 mm	780
Sammenfoldet bredde (uten hjul)	710 mm	960
Sammenfoldet høyde (uten hjul, puter, armlener, hode + benstøtte)	520 mm	520
Total vekt	36,0 kg	42,0 kg
Vekt tyngste del: ramme	17,0 kg	25,0 kg
Vekt tyngste komponent: benstøtte	3,8 kg	4,0 kg
Statisk stabilitet nedoverbakke		13°
Statisk stabilitet oppoverbakke ***	8 °	15 °
Statisk stabilitet sidesvegs	15 °	15 °
Sikker skråning, bruk veltesikring		10 °
Setevinkel	-9 °	16°
Effektiv setedybde	400 mm	500 mm
Effektiv setebredde	460 mm	710 mm
Komfort Sittehøyde i front	440 mm	475 mm
Ryggvinkel	86°	133°
Ryggghøyde uten pute	490 mm	590 mm
Avstand fotplate til sete	280 mm	560 mm
Vinkel, benstøtte til sitteflate	105°	182°
Avstand, armstøtte til sete	185 mm	325 mm
Front, plassering av armstøttestruktur	300 mm	430 mm
Drivring diameter	535 mm	535 mm
Horisontal akslingposisjon	-10 mm	95 mm
Parkeringsbrems, maks helning	–	7 °
Minimum svingradius, vertikale benstøtter	R 700 mm	825 mm

Modell med 24" hovedhjul. Målt uten puter.

2. HURTIGREFFERANSE

Innholdet på denne siden er et sammendrag av hele håndboken. Det gir deg en kort introduksjon til bruk og stell av rullestolen **Netti III XHD & XXHD**.

 **Hurtigrefferansen er ikke en erstatning for håndbok, bare en huskeliste / sjekkliste.**

- Pakk ut rullestolen (kapittel 6.1).
- Monter hovedhjulene (kapittel 6.2).
- Monter fronthjulene (kapittel 6.4).
- Legg ryggen bakover og monter ryggssylinderen til ryggen ved hjelp av låsebolten. (Kapittel 6.7).
- Monter armstøttene (kapittel 6.11).
- Monter putene (kapittel 6.12).
- Monter benstøttene (kapittel 6.14).
- Juster skyvehåndtakene (kapittel 6.16).
- Monter hodestøtten (kapittel 6.15).
- Sett tippesikringen i aktiv posisjon (kapittel 6.10)
- Monter tilbehør (se kapittel 5. for mer informasjon). Monteringsbeskrivelser vil følge tilbehøret.).

 **JUSTER RULLESTOLEN TIL BRUKEREN:**

Juster setedybde og eventuelt rullestolbalansen, benstøtتهøyden, armlenens høyde, hodestøtتهøyde og dybde, putehøyde i stolryggen.

For mer informasjon om tilpasning av rullestolen til brukeren, se www.My-Netti.no viten og support.

 **Produktkonfigurasjonen kan variere fra land til land. Illustrasjoner kan avvike fra det leverte produkt.**

 **Se kapittel 11 for feilsøking. For justeringer, se kapittel 6.**

 **Kunngjøringer om produktsikkerhet og eventuelle tilbakekallinger av produkter vil bli publisert på vår hjemmeside [www. My-Netti.no](http://www.My-Netti.no)**

 **For brukere med nedsatt syn, kan håndbøker og lastes ned fra www.My-Netti.no**

 **Kjør forsiktig! På grunn av stolens størrelse og maksimal belastning kan det være utfordrende å manøvrere rullestolen. Kjøring i utforbakke må gjøres med stor forsiktighet.**

 **Tippesikringen bør alltid brukes for brukerens sikkerhet.**

 **Bremsene alltid være i bruk når brukeren er vippet bakover.**

 **Påse at alle håndtak er ordentlig låst.**

 **Stå aldri på fotplatene på grunnnet fare for å tippe fremover.**

 **Løft aldri rullestolen ved hjelp av benstøttene, armstøttene eller hodestøtten.**

 **Vær oppmerksom på klemfare når du bretter og bretter ut, vipper, lener og alle andre justeringsbevegelser.**

 **Vær oppmerksom på at friksjon mot trykkfelger kan medføre en varm overflate.**

 **Overflatetemperaturen på metalleder i rammestrukturen kan øke når de utsettes for direkte sollys.**

 **Saltvann kan øke faren for korrosjon, det er nødvendig med ekstra tiltak relatert til miljøforhold.**


 **Dersom elektriske funksjoner er montert: Lad batteriet daglig.**

 **Hvis stolen har luftfylte dekk: Sørg for å sjekke dekktrykket hver uke og fyll på til 45 PSI for 24" og til 36 PSI for 7" hjul**

 **Hvis du er i tvil - kontakt forhandleren!**

3. BESKRIVELSE*

1. Hodestøtte
2. Ryggpute - modell Stabil
3. Armstøtte med polstring
4. Setepute
5. Knepute
6. Brakett for leggpute
7. Lagerhus / forgaffelfeste
8. Hurtigtutløsning for forgaffel
9. Forgaffel
10. Forhjul
11. Fotbrettlås
12. Fotbrett
13. Leggpute
14. Skruer for vinkeljustering
15. Høydejusteringskrue
16. Vinkeljusteringsknott
18. Veltesikring
19. Brems
20. Hurtiglås på akslingen
21. Drivring
22. Hovedhjul
23. Rullestol typeskilt på tverrstangen i nedre ramme.
24. Utløserhåndtak for armstøtte
25. Låsespak for kjørehåndtak
26. Skyvehåndtak

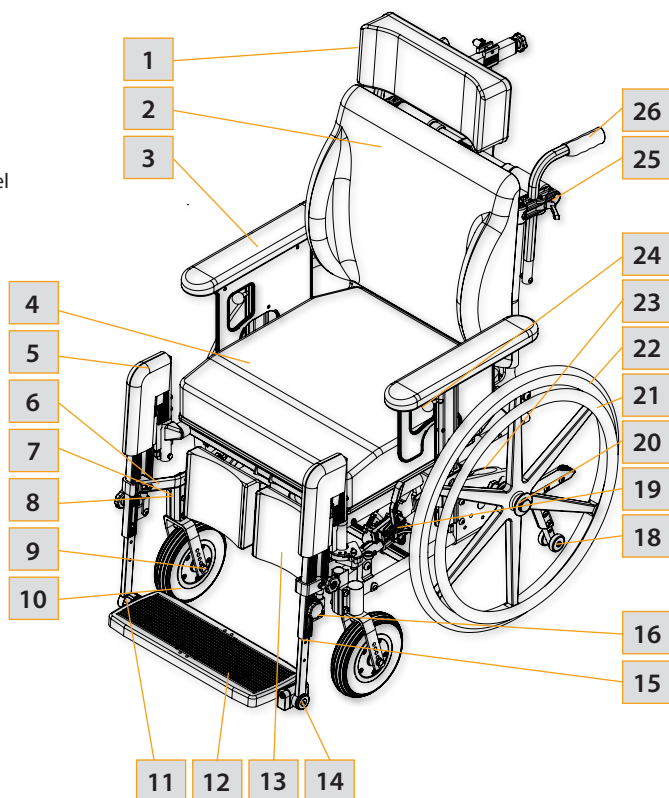

* Vær oppmerksom på at spesifikasjonene kan variere fra land til land.



Ta kontakt med forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



Ta kontakt med forhandleren for mer informasjon.

4. FUNKSJONER HOS NETTI III XHD & NETTI III XXHD

STANDARD

SETE – NETTI SITTEPUTE

- Forsterket solid seteplate.
- Pute med gode trykkfordelingsegenskaper
- Tilt -9 ° til + 16 °
- Dobbel gassfjær for setevisp
- Justerbar høyde 400 til 485 mm ved endring av hjulstørrelse og posisjon
- Justerbar dybde opptil 100 mm

HJUL *

- 24 "x 1 3/8" punkteringssikre forsterkede hovedhjul med hurtigutløseraksel
- Drivring: Aluminium integrert i felg
- 8" punkteringssikre brede forhjul med forsterket 15 mm hurtigutløseraksel

RAMME – Tverrstenger av stål

SKYVEHÅNDTAK

- Høydejusterbar, svingbar, avtakbar.

BREMSER – Brukerbrems

VELTESIKRING

- Høyde- og lengdejusterbar - svingbar

RYGGSTØTTE - NETTI STABIL PUTE

- Ryggvinkelregulering fra: 86 ° - 133 °
- Høyde: 500 mm
- Forsterket hengsel for ryggstøtte
- Ryggpute med integrert korsryggstøtte og sidestøtte, justerbar i høyden
- Høydejusterbare, avtakbare skyvehåndtak.
- Dobbel gassfjær for ryggvinkelregulering.

BENSTØTTE - NETTI GRANDIS

- Fotbrett m låsebolt fra sw 650 mm
- Forsterkede uttrekksstykker
- Høyde- og vinkeljusterbare fotplater med leggputer og polstring for kne

ARMSTØTTE

- 80 mm bred armstøttepute, justerbar dybde.
- Høydejusterbar og avtakbar
- Forsterkede armstøttebraketter

HODESTØTTE

- Høyde, dybde og vinkel kan justeres
- Stabilisator for hodestøtte

ALTERNATIVER / TILBEHØR

SETE

- Flere modeller av seteputer
- Universalbrett (se kapittel 5)
- Hoftebelter og 4-punktsbelter (Se kapittel 5)

HJUL

- 12 1/2" hovedhjul med trommelbrems
- Eikebeskyttere (se kapittel 5)

BREMSER – Trommelbrems

RYGGSTØTTE

- Ryggforlenger (se kapittel 5)
- Korsryggstøtte og kile (se kapittel 5)
- Ryggputer - forskjellige modeller

BENSTØTTE

- Netti Dynamisk vinkeljusterbar - DUAL
- Amputasjonsstøtte
- Støtte for kne og lår (se kapittel 5)

ARMSTØTTE

- Ulike polstringer (se kapittel 5)
- Hemi armlen og Hemi pute (se kapittel 5)

HODESTØTTE

- Netti Dynamisk hodestøtte
- Ulike modeller (se kapittel 5)

5. TILBEHØR



Det alltid oppdaterte komplette tilbehørsprogrammet finner du på nettsiden vår
www.My-Netti.no - bestillingsskjema.



Ikke alt tilbehør er tilgjengelig for alle rullestolkonfigurasjoner. Vennligst sjekk hjemmesiden eller spør kundeservice for mer informasjon.

BELTER

Flere modeller:
Hoftebelter med eller uten polstring og med plastlås eller billås. (Se kapittel 5.1 for montering.)



H-BELTE, FESTESTANG

Monteres på separate stenger eller på skyvehåndtakene.
Leveres i to størrelser med teleskopstang.
(Se kapittel 5.2)



BORD

Flere modeller:
Svingbar, låsbar og standard "skyv på"-modell.



POLSTRING FOR BRETT

Tilbyr et mykt undelag for armen som hviler på brettet.



KILE

Øker sidestøtten.



KORSRYGGSTØTTE

Øker korsryggkurven.



PUTER

SETEPUTER

Mange å velge mellom. Ta kontakt med forhandleren.



RYGGSTØTTEPUTER

Mange å velge mellom. Ta kontakt med forhandleren.



EIKEBESKYTTERE

For 20", 22" og 24". Svart eller gjennomsiktig er valgfritt.



BENSTØTTER

FOTBOKS NETTI GRANDIS
Polstret.



GRANDIS BENSTØTTE

Fra setebredde 600 mm er den tilgjengelig med et helt fotbrett og låsing på den ene siden.



NETTI DYNAMIC VINKEL

Justerbar benstøtte DUAL



AMPUTASJONSSTØTTE



BREMSEFORLENGERE

90 mm
120 mm
250 mm



**POLSTRING FOR LEGG
STØTTEBRACKETT**
Reduserer trykk.

STØTTE FOR KNE / LÅR
Støtten reduserer adduksjon.

ABDUKSJONSKLOSS
Klossen reduserer
abduksjon.
Liten: 80 mm bredde
Medium 110 mm bredde
Stor: 140 mm bredde

HODESTØTTE

Støtte A
Sidestøtte også tilgjengelig
med pannestropp.





Støtte B
Liten

Støtte C
Stor

Støtte D
komfort-trykkfordelende

Støtte E
justerbare sidestøtter

Støtte F
med kinn / hakestøttebånd

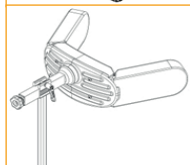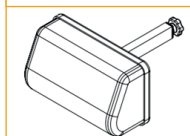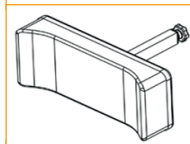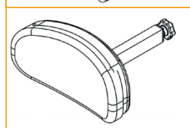

HYGIENETREKK
Beskytter kjernen på
hodestøtten.

HODEPUTE
400 x 400 mm pute med
Kospoflex fyll og gummi.

HODEPUTE KOMFORT
Pute med Kospoflex-fyll, for å
trekke på hodestøtten.

RYGGFORLENGER
120 mm forlenger.
Brukes sammen med 600 mm
ryggpute. Når du bruker Netti
III med setebredde 500 mm og
mer som sete i bilen, anbefales
ryggforlenger og forsterket
hodestøtteinnfesting.

ARMSTØTTEPUTER
Bred: 415 x 80 mm
Lang: 445 x 70 mm
Lang/Bred: 525 x 80 mm
Kort: 333 x 58 mm
Standard: 385 x 58 mm
Arm støttepute bøyd

HEMI ARMSTØTTE
Tilbyr ekstra støtte for den
berørte armen. Kan settes i
faste posisjoner.

HEMI PUTE
En mer føyelig støtte enn hemi
armstøtte.



KOMFORTPUTER

Skal festes til klesbeskytteren. Gir en trykkfordelingseffekt. 25 mm, 35 mm og 45 mm.



FOTBRETT MED LÅS

Benstøttene kan svinges til siden slik som standard benstøtter.



SIDESTØTTE STABIL

Beregnet for brukere med nedsatt stabilitet i overkroppen. For optimal funksjon, bruk sammen med stabil pute.



PUTE FOR SIDESTØTTE STABIL



LANG RYGGHENGSEL

Dekker setedybde: 545, 570 og 590 mm.
Må brukes med ekstra langt låsehode.



EL. KOMPONENTER

For tilt, ryggvinkelregulering og benstøtter, separate eller komplette. Se Netti III EL med maks setebredde 600 mm på



My-Netti.no

for detaljert informasjon

RAMMEUTVIDELSE

Øker avstanden mellom hovedhjul og forhjul.
Reduserer tipperisiko.



VERKTØYSETT



5.1 MONTERING AV HOFTEBELTE

Se www.My-Netti.no for kontinuerlig oppdatert oversikt over belter og seler og monteringsanvisninger.

- Trekk beltet gjennom hullet i hoftebelte-braketten.



- Tre beltet tilbake gjennom belteklemmen.



- Fest hoftebelte-braketten, ved hjelp av medfølgende skruer og muttere, til det bakste hullet på bakhengslet.



2 stk 13 mm fastnøkkel.

5.2 MONTERING AV H-BELTE

- Se egen monteringsbeskrivelse MD0074 for adaptersett til sele.
- Fest skyvehåndtakene i riktig posisjon og lås godt. Fest deretter stangen i riktig posisjon / høyde. Høyden skal være på nivå med brukerens skuldre.



- Tre beltet gjennom rullene og lås beltet ved å trekke beltet gjennom belteklemmen. Juster beltet til ønsket lengde.



6. MONTEREING OG JUSTERING



6.1 UTPAKKING (SE KAPITTEL 5 OG 6)

1. Pakk ut alle delene, og sjekk at alt er der i henhold til pakklisten.
2. Monter drivhjul og svinghjul.
3. Monter ryggstøtte, armstøtter, puter og benstøtter.
4. Monter tilbehør.

Komponentvekt (450 mm stolbredde):

Drivhjul:	1,90 kg pr. hjul
Forhjul:	0,80 kg pr. hjul
Benstøtte Grandis:	2,60 kg pr. hjul
Stabil Rygg:	1,35 kg
Netti Sitt:	1,00 kg
Hodestøtte A:	1,00 kg
Hodestøtte C:	0,90 kg
Armstøtte:	1,10 kg pr. hjul

Nødvendige verktøy er beskrevet under hvert kapittel. Tilbehør beskrevet i kapittel 5 er en presentasjon av opsjoner, og vil bli levert med separate monteringsbeskrivelser.

Når sitte- og hjuljusteringer gjøres i de stillinger som er mulig med standardutstyr, vil justeringene ikke føre til at sikkerhetsgrenser overskrides.

6.2 DRIVHJUL

For å montere drivhjul, fjern hurtigutløser-bolten fra navbøsingen, før den gjennom sentrum av hovedhjul og inn i navbøsingen mens du holder kanppen trykket inn.



For å kontrollere at drivhjul er godt festet til navet, fjerner du fingeren fra den sentrale knotten og trekker i hovedhjul.



Dersom drivhjul ikke låses, se Feilfinning og juster. Hvis drivhjul fortsatt ikke låser, må du ikke bruke rullestolen, men kontakte forhandleren.



Sand og sjøvann (salt som brukes til strøing om vinteren) kan skade lagrene på hovedhjulene. Rengjør rullestolen grundig etter eksponering.

6.3 FORGAFFEL

Forgaflene har som standard aksler med hurtigutløser. Forgaffelen fjernes enkelt ved å trykke på hurtigutløserknappen på toppen av lagerhuset.



Kontroller vinkelen på lagerhuset til forhjulene (se kapittel 6.5).



6.4 FORHJUL

Fjerne

- Trykk på utløserknappen på toppen av det fremre gaffellagerhuset - gjennom silikonhetten.



Montering

- Før den hurtigutløste akslingen inn i lagerhuset. Trekk litt i gaffelen for å sikre at gaffelen er helt låst.



Sand og sjøvann (salt som brukes til strøing om vinteren) kan skade lagrene på forhjulene. Rengjør rullestolen grundig etter eksponering.

6.5 SETEHØYDE FORAN


Setehøyden avhenger av:

- Størrelse på forhjulene.
- Størrelse av forgaffelen.
- Kontroller vinkelen på hjulhuset.

I kapittel 5 viser oversikten at du kan velge mellom flere modeller av både forhjul og forgaffer. For å endre høyden på de fremre hjulene - løsne hjulet og sett det i ønsket posisjon på gaffelen.

Vinkel på lagerhuset

Riktig justert vinkel på forgaffelen er viktig for at rullestolen skal få gode manøvreringsegenskaper. Løsne de to skruene på innsiden av rammen så mye at du kan justere de eksentriske mutrene. Vinkle lagerhuset slik at det står 90 ° i forhold til bakken. Stram til skruene med 16 Nm

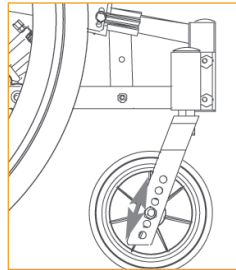

1 stk 5 mm unbrakonøkkel.



Lagerhuset kan ikke justeres i høyden.



Kontroller og juster om nødvendig posisjonen til veltesikringen.

6.6 SETEHØYDE BAK

Setehøyden bak avhenger av:

- Størrelse på hovedhjulet.
- Posisjonen til hovedhjulet i bakhjulsbraketten.

Hovedhjul

Løsne navbøssingen, inkludert skive og mutter, og monter den i ønsket posisjon i hovedhjulbraketten.



2 stk 24 mm fastnøkkel.



Forsikre deg om at mutteren på innsiden av rammen omkranser hjulforingen helt.



Når setehøyden endres, må du forsikre deg om at lagerhuset til de fremre hjulene er justert loddrett på underlaget (se kapittel 6.5).



Risikoen for velt øker når hovedhjulet flyttes fremover i hovedhjulbraketten.



Sjekk posisjonen på veltesikringen.



Juster bremsene på nytt (se kapittel 6.17).

6.7 RYGGSTØTTE

- Løft opp ryggen og før gassylinderen inn i låsebraketten. .
- Fest ryggstøtten ved å skyve låsebolten inn fra siden, gjennom braketten og gassfjærhodet.



Hvis gassfjæren ikke ser ut til å passe, bruk den nedre horisontale stangen på ryggstøtten for å komprimere gasssylinderen. Hold lenehåndtaket trykket inn mens du presser stangen mot gassylinderen og komprimerer den. Slipp håndtaket og skyv gassfjæren inn i braketten.

6.8 JUSTERING AV SETEDYBDEN

Setedybden kan justeres både i bakkant og forkant av setet. Justeringer gjøres for å gi brukeren en komfortabel sittestilling med riktig korsryggstøtte mens kneleddet er på linje med kne-dreiepunktet på benstøtten.

Ved å justere setedybden kan stolens balanse og kjøreegenskaper endres. En godt balansert stol er enkel å kjøre uten at den lett tipper bakover. Begynn alltid med å justere setedybden bakover, og juster deretter festebraketten for benstøtten for å få benstøttens kneledd på linje med brukerens kneledd. Ved behov må også posisjonen til hovedhullet endres.

Setedybden kan justeres 100 mm bakover og 100 mm framover.

JUSTERING AV SETEDYBDE BAK

Justering av setedybde bak:

- Ryggstøttehengslen har 5 hull med 25 mm avstand mellom hver.
- Setedybden kan justeres fra 400–500 mm (Målt fra fronten av seteplaten til ryggørret uten ryggpute).
- På rammen under stolplaten er det montert et ekstra låsehode for gassfjæren.
- Det korte låsehodet dekker setedybde 400 mm, 425 mm og 450 mm.
- Det lange låsehodet dekker setedybde 450 mm, 475 mm og 500 mm. (Det er også et langt rygghengsel som dekker lengre setedybder. Se kapittel 5).



- Når du endrer posisjonen til rygghengslet, må du også huske å endre plasseringen på gassfjæren under stolen. Braketten har 3 hull. Når hengselet til ryggstøtten er stilt inn i den korteste posisjonen, plasseres gassfjæren i det fremre hullet ved hjelp av det korte låsehodet.



For hver posisjon rygghengselet trekkes ut, flyttes gassfjæren ett hull bakover. Når gassfjæren når det bakre hullet med kort låsehode, bytter du til langt låshode og starter fra det fremre hullet igjen.



Når du bruker komfortseteplaten, anbefales det å bytte seteplate når du endrer setedybde. Seteplaten kommer i dybdene: 400 mm, 430 mm og 460 mm.



Ved å bruke stolryggens borrelåsjusteringsstroker kan du få noen ekstra cm på dybden.

6.9 JUSTERING AV SETEDYBDE FORAN

Setedybden bak justeres som følger:

- Løs ut tilt-sylinderen ved å tilte setet maksimalt framover.
- Trekk ut låsebolten for ryggfestet, legg ryggen fram i setet.
- Fjern skruene som holder hengslet til ryggstøtten, og sett hengslet i en posisjon som gir ryggstøtten ønsket plassering. Gjør det samme på begge sider.
- Sett tilbake ryggskruene og fest dem.
- Husk å flytte gassstaget som beskrevet tidligere i dette kapittelet - for å nå 90 ° vinkel bakover når ryggssylinderen bunner.

 Når du justerer setedybden bak, må skruen i rygghengslet strammes med 14 Nm.

 6 mm unbrakonøkkel.
13 mm fastnøkkel.

 Hvis brukeren har behov for en annen ryggvinkel enn hva som er standard, er det mulig å endre posisjonen på gassfjæren i tre posisjoner under stolen foran.

 Når du endrer setedybde, endrer du også stolens veltepunkt. Dette kan forhindres ved å endre posisjonen til hovedhjulet i hovedhjulbraketten (Se kapittel 6.6). Juster tippesikringen tilsvarende (se kapittel 6.10).

Det er mulig å justere setedybden opp til 100 mm foran. For urolige brukere skal uttrekksstykket ikke trekkes ut mer enn 50 mm.

Gjør følgende:

- Løsne skruen som holder uttrekksstykket for benstøtten.
- Sett uttrekksstykket til ønsket posisjon.
- Fest skruene, strammes med 25 Nm.



 6 mm unbrakonøkkel.

 Ved å sette uttrekksstykkene i forskjellige posisjoner, er det mulig å kompensere for et rotert bekken eller forskjellig lengde på lårene.

6.10 TIPPESIKRING

- Juster tippesikringen slik at den ikke stikker utenfor hjulets radius.
- Trekk tippesikringen ut / bakover fra understellet.
- Drei den ned 180 °.
- Slipp tippesikringen slik at den går i lås.



Sikringene leveres justert etter bestilt hovedhjulstørrelse i standardposisjon. Hvis andre justeringer utføres, må sikringene justeres tilsvarende.

Justering av tippesikring

Tippesikringene må justeres når hovedhjulenes posisjon eller dimensjon endres. Korrekt justerte sikringer skal plasseres rett på innsiden av hovedhjulets radius. Tippesikringene justeres som følger:

- Løsne låseklemmen på Tippesikringene med en unbrakonøkkel.
- Trekk eller skyv stangen til ønsket posisjon.
- Fest låseklemmen.
- Utfør samme prosedyre på motsatt side.



6 mm unbrakonøkkel.



Kontroller at begge veltesikringene har samme lengde. Avstanden mellom veltesikring-hjulene og gulvet må være 20 - 30 mm.



Hvis veltesikringen er plassert på utsiden av hovedhjulets radius, vil den lage problemer med fortauskanter og trapper.



Veltesikringen bør alltid brukes for brukerens sikkerhet.

6.11 JUSTERING AV ARMSTØTTER

- Vri utløserhåndtaket for armstøtte til siden og hold den.
- Juster armlenet til ønsket høyde, og slipp håndtaket. Løft eller senk armlenet litt til det går i lås.



Armputen og låseskruen er satt i midtposisjon. Dette kan justeres for å tilpasses brukeren.

6.12 PUTER

Puter festes og justeres på rullestolen ved hjelp av borrelås.




Det er viktig å sette opp puten riktig for å sikre god sittekomfort.



Putetrekken er vaskbare og kan derfor gjenbrukes. Følg instruksjonene på baksiden av puten for riktig vedlikehold og vask av puten.

6.13 JUSTERE BORRELÅSEN

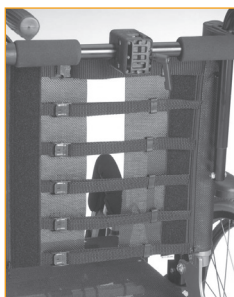

- Løsne stroppene, og plasser ryggputen slik at brukeren får plass til baken og den integrerte korsryggstøtten i riktig posisjon.
- Stram stroppene slik at de følger ryggraden og gir litt ekstra støtte i korsryggen.

6.14 BENSTØTTER

Netti III XHD og XXHD har følgende alternative benstøtter:

- Netti Grandis vinkeljusterbar benstøtte
- Netti Dynamic benstøtte DUAL
- Amputasjonsstøtte
(Se bilder i kapittel 5).

Som standard leveres **Netti III XHD og XXHD** med Netti Grandis vinkeljusterbar benstøtte. Fra setebredde 650 mm leveres benstøttene med et helt fotbrett og låsing på venstre benstøtte.

En egen brukerhåndbok - UM0119 for Netti Grandis benstøtte er tilgjengelig på hjemmesiden vår **My-Netti.no**

Se den separate brukerhåndboken UM0115 for støtte for Netti Dynamic benstøtte DUAL.


Netti Grandis benstøtte er svingbar og avtakbar. Den er høydejusterbar og leveres med høyde- og dybdejusterbare leggputer. Fotplatene er hengslet og svinges opp sideveis. Når de er brettet ned, kan de vinkles i faste posisjoner. Som standard kommer fotplatene med en lås som forbinder de to platene, noe som øker styrken og reduserer vedlikeholdet. Hvis låsing ikke er ønsket, kan låsebolten fjernes ved hjelp av en unbrakonøkkel.

MONTERING AV GRANDIS BENSTØTTE



Hvordan montere:

- Brett fotplatene opp.
- Hold benstøtten på toppleddet, og plasser den i uttrekksstykket i en vinkel som vist på bildet nedenfor.
- Sving benstøtten innover og skyv den litt nedover til den går i lås.

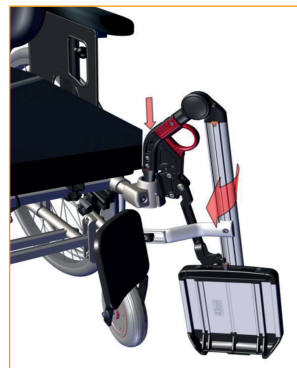


Justering av vinkel på benstøtte:

For å justere vinkelen på benstøtten, bare åpne den røde spaken og løft eller senk benstøtten. Benstøtten holder seg i den posisjonen der du låser spaken.

Fotplate, høydejustering:


Fotplatene kan justeres trinnløst i høyden.

- Løsne justerskruen slik at justerstangen beveger seg fritt.
- Skyv fotplaten til ønsket høyde, og stram deretter skruen.

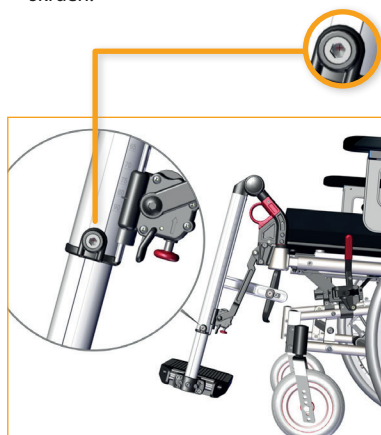

Fotplate dybdejustering:

- Skru de 2 skruene som vist nedenfor helt ut med en 5 mm unbrakonøkkel.
- Trekk ut fotplaten og løsne de 2 neste skruene som er blitt synlige.
- Skyv fotplaten forover eller bakover til ønsket dybde før du skrur alle skruene inn igjen.

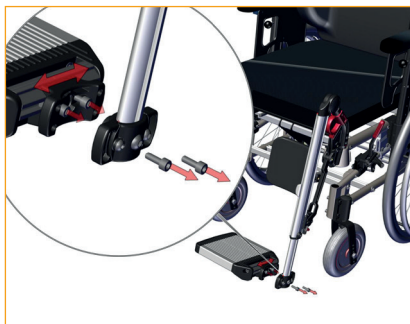

Fotplate, vinkeljustering:

- Løsne de 2 skruene som vist nedenfor med en 5 mm unbrakonøkkel.
- Juster fotplaten til ønsket vinkel, og stram til skruene.



Låse og løsne fotplatene

- Fotplatene leveres med en lås som forbinder de to fotplatene, noe som gjør platene sterkere.
- For å låse fotplatene, la høyre fotplate falle over bolten som står ut fra den venstre, den klikker på plass.
- For å løsne fotplaten skyver du plastknappen under høyre fotplate og løfter høyre fotplate opp.



-  Under justeringen skal ikke fotplatene belastes.
-  For utendørs bruk skal det være en klaring på 40 til 50 mm mellom fotplaten og bakken.
-  Stå aldri på fotplatene på grunn av fare for å tippe fremover.
-  Når du justerer benstøttevinkelen, må du være oppmerksom på klemfare mellom bevegelige deler.

Fjerning av benstøtten:

- Løsne fotplaten ved å skyve på den røde plastknotten under høyre fotplate og løfte høyre fotplate opp.
- Trekk i det røde sirkulære grepet på toppen av benstøtten og løft støtten oppover mens du snur den litt utover.



Justering av leggputene

Leggputen kan justeres i høyden og dybden. Leggputene skal justeres i en høyde og dybde som forhindrer at føttene glir ned fra fotplaten.

For å justere høyden, løsne skruen på leggputebraketten og skyv den til ønsket posisjon der du strammer skruen.



5 mm unbrakonøkkel.



For å justere leggputens dybde, løsner du skruen som holder leggputen og skyver den til ønsket posisjon der du strammer skruen igjen.




5 mm unbrakonøkkel.



Stå aldri på fotplatene!



Løft aldri rullestolen i benstøttene, armstøttene eller hodestøtten.

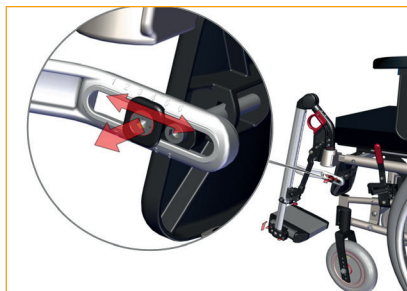

Netti III XHD og Netti XXHD med Grandis benstøtte med fotbrett, fra setebredde 650 mm:




Amputasjonsstøtte



6.15 HODESTØTTE

- A – Spak for dybdejustering
- B – Hjul for vinkeljustering
- C – Spak for høydejustering
- D – Hodestøttebrakett.

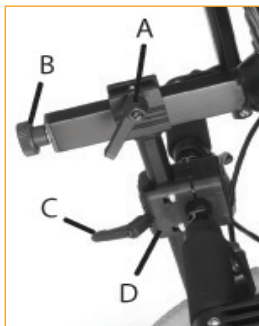

- Plasser den firkantede mutteren i sporet på hodestøttebraketten som vist nedenfor.



- Plasser hodestøtten i hodestøttebraketten.
- Høyden og dybden på hodestøtten er satt til de nødvendige posisjonene og strammet.
- Hodestøttebraketten festes ved å stramme de fire skruene to og to diagonalt slik at braketten er festet med samme styrke delt på de fire skruene.

Hodestøttestabilisatoren hjelper hodestøttens festebrakett med å sin dens posisjon og retning når den monteres på en bred rullestol.



Husk å løsne spakene når du justerer hodestøtten.



Hvis hodestøtteholderen ikke passer perfekt til braketten, er braketten sannsynligvis festet for stramt eller ujevnt. Etter å ha montert hodestøtten, fest den ordentlig ved å stramme den lille settskruen i midten på toppen av hodestøttebraketten med en unbrakonøkkel.



Hvis hodestøtten virker for kort i høyden, kan den dreies 180 ° ved å løsne justeringshjulet på baksiden av den horisontale stangen (B).

Justering av hodestøtten i dybden:

- Løsne låsespaken på toppen av den vertikale stangen (A).
- Juster hodestøtten og fest den i ønsket posisjon.

Justering av hodestøtten i høyden:

- Løsne låsespaken på hodestøtteadapteren (C).
- Juster hodestøtten og fest den i ønsket posisjon.

Justering av vinkel på hodestøtten:

- Løsne justeringshjulet på baksiden av den horisontale stangen (B).
- Juster hodestøtten og fest den i ønsket posisjon.

Justering av hodestøtten sidelengs:

- Hodestøtteadapteren kan flyttes både til høyre og venstre, og gir muligheten til å imøtekomme spesielle behov for hodestøtte.
- Løsne de fire skruene som holder adapteret sammen.
- Flytt adapteret til ønsket posisjon, og fest adapteren ved å stramme skruene diagonalt.

6.16 SKYVEHÅNDTAK

Justering av skyvehåndtak:

- Løsne spaken på siden og løft håndtaket helt opp.
- Vri håndtakene til ønsket posisjon.
- Juster høyden.
- Lås håndtaket i ønsket posisjon ved å stramme spaken.



Kontroller at sikkerhetsskruen er strammet ordentlig.



For å fjerne håndtakene, må sikkerhetsskruen nederst på håndtakene fjernes.

6.17 JUSTER BREMSENE

- Kneledd-bremsene er fritt justerbare langs rammerøret.
- For å aktivere bremsen, skyv håndtaket forover.



- For å løsne bremsen, trekk håndtaket bakover.



- For å løsne bremsen, løsner du de to skruene på innsiden av bremseklemmen.



- For finjustering, løsne den øvre skruen på innsiden av bremsene.
- Juster bremseposisjonen og stram til skruene.



5 mm unbrakonøkkel.

-  Kontroller at bremsene er riktig justert ved å aktivere bremsene, og test at rullestolen ikke beveger seg.
-  Knehåndtak-bremsene er konstruert som parkeringsbremsar og skal ikke brukas som kjørebremser.
-  Vær oppmerksom på potensiell klemfare mellom brems og dekk.

TROMMELBREMS

Netti III XHD og XXHD er som standard utstyrt med ledsager hånd trommelbremsar.



Hvis bremsen ikke bremsar ordentlig:

Juster wren på den ene eller begge sider, juster fotskruen 2–4 tørn ut. Kontroller deretter bremsene på nytt.

Hvis wren er for løs:

Juster fotskruen helt inn. Stram wren ved å løsne wireklemmen før du trekker wren vidare gjennom den. Stram wireklemmen, og juster fotskruen ut igjen.




-  1 stk 10 mm fastnøkkel.

-  For å sikre at wirene fungerer som de skal, må disse aldri være stramme.

Betjening og bruk av trommelbremsen

Rullestolen med trommelbrems tillater regulering av hastighet i bakker og under kjøring. Bremsespakene er plassert på skyvehåndtakene.

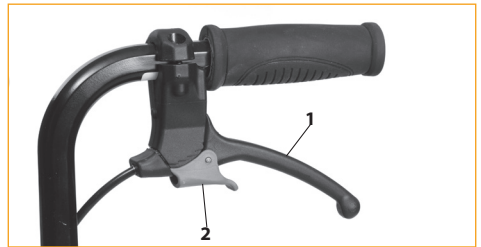

- For å bruke bremsene, trekk bremsespakene (1) jevnt mot håndtaket så rullestolen stanser.
- For å aktivere og låse parkeringsbremsen (2) trykk spaken (1) mot skyvehåndtaket og lås parkeringsbremsen ved å skyve det lille røde håndtaket fra deg. Forsikre deg om at begge parkeringsbremsene er låst.
- Parkeringsbremsen frigjøres når du trykker spaken (1) mot skyvehåndtaket. Den er låst med en fjær, og dette vil frigjøre den.

-  Ikke la brukeren sitte i rullestolen uten å aktivere parkeringsbremsen.

7. SETEVINKEL / TILT OG RYGG VINKEL

7.1 SETEVINKEL

Setevinkelen reguleres ved hjelp av utløserhåndtaket **tilt** montert på skyvestangen. Sitteenheten kan vippes fra -9° til $+16^{\circ}$.



7.2 RYGGVINKEL

Ryggvinkelen reguleres ved hjelp av utløserhåndtaket montert på skyvestangen. Vinkelen kan reguleres fra 4° frem til 40° bakover.

 For å sikre at wirene fungerer som de skal, må disse aldri være stramme.

 Setevinkelen og ryggstøttevinkelen må ikke justeres uten å bruke veltesikringene.

Utløserhåndtakene har hver sin av følgende etiketter:



Tilt



Ryggvinkel

 Veltefare. Sjekk posisjonen på veltesikringen.

 Når stolens ryggforlenger er montert, øker velterisiko. Om nødvendig bør det kompenseres ved å flytte hovedhjulene lenger bakover.

 Bruk alltid tippesikring når lene- og vippefunksjoner er aktivert.

7.3 NØKKELODD OM TILT OG LENE PÅ STATISKE KOMFORT RULLESTOLER

Vipp- og leneregulering er de grunnleggende fordelene med en komfortrullestol. Det gir mulighet for varierende sitteposisjoner i rullestolen.

Vi har gjennomgått de kliniske bevisene angående tilt og lening, og funnet at det er flere studier eller retningslinjer for beste praksis som tyder på at tilt- og ryggvinkel reguleringsekvensen er viktig for å redusere forskyvning og glidning:

Tilt først, og lene etterpå. Når du bringer klienten til oppreist stilling igjen, bør sekvensen være å først rette opp ryggvinkelen og deretter rette opp tilten. Feil rekkefølge øker faren for utglidning og dermed økt fare for «shear» og trykksår.

7.4 REDUSER FAREN FOR UTGLIDNING, TRYKKSÅR OG SHEAR:

Bruk bare tiltfunksjonen for å oppnå variasjon i brukerens sitteposisjon. Det er allment kjent at ryggvinkelen ikke skal justeres etter at ryggvinkelen er tilpasset brukerens beste sitteposisjon. Muskeltonen i nakken og ryggen skal være så lav som mulig for brukeren for å forhindre glidning, og en endring av ryggvinkel fra den opprinnelige stillingen vil forstyrre riktig kroppsposisjon, og forårsake økt muskeltonus i nakken.

Hvis ryggvinkelen justeres under en forflytting eller andre situasjoner, er det veldig viktig at ryggvinkelen justeres tilbake til riktig, opprinnelig posisjon når brukeren er tilbake til en normal sitteposisjon. Feil bruk av ryggregulering fører til økt fare for utglidning («sliding») for brukeren, og dermed økt fare for «shear» krefter og trykksår.

FORSIKRE DEG OM AT BRUKEREN ER TRYGG NÅR TILT ELLER RYGGREGULERING JUSTERES:


Tilt og ryggregulering til alle Netti komfortrullestolmodeller er «enhåndsbetjent», inkludert de dynamiske rullestolmodellene. Dette er en stor fordel for brukeren: Pleiere og ledsagere kan etablere øyekontakt med brukeren når tilt- eller ryggvinkelen skal justeres. Ledsageren kan kommunisere med brukeren før tilt eller ryggvinkelen endres. Brukeren vil føle seg tryggere når han / hun er klar over at tipp eller ryggvinkelen skal justeres.

7.5 BRUK AV TILTHÅNDTAK: VIPPE SETE-ENHETEN


Trykk på venstre håndtak på skyvestangen og legg press på skyvestangen for å tilte sitteenheten med den ene hånden, mens du har øyekontakt med brukeren og legger den andre hånden på armstøtten.

Den korrekte relative vinkelen mellom kroppsdelene forblir den samme når sitteenheten tiltes.

Uansett hvor du slipper håndtaket, vil sitteenheten forbli i denne posisjonen. For å løfte sitteenheten opp, trykk på håndtaket og tiltsylinderen vil hjelpe deg med å løfte sitteenheten.

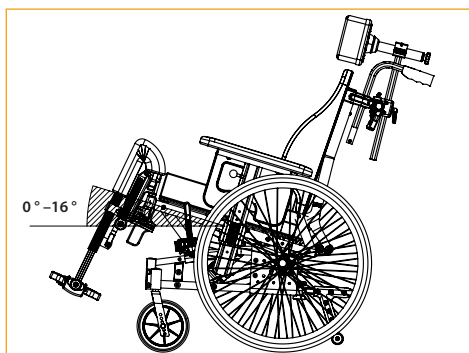

En bakovertiltet seteenhet gir brukeren en brattere sittevinkel i forhold til underlaget, og dette reduserer faren for at brukeren sklir ut av korrekt sitteposisjon. En seteenhet som er vippt fremover bringer brukeren i en posisjon der aktiviteter - for eksempel ved et bord eller å stå opp fra rullestolen - støttes.

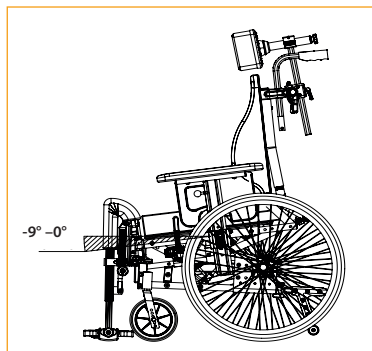


Tilthåndtaket og tiltskiltet er på skyvestangen - vist på forrige side.



La aldri brukeren være alene når setet er vippt forover. Brukeren kan gli fremover.

7.6 BRUK AV RYGGREGULERING-HÅNDTAKET: REGULERING AV STOLENS RYGGVINKEL

Trykk på høyre håndtak og legg press på trykkstangen for å lene ryggen tilbake med en av hendene, mens du har øyekontakt med brukeren og legg den andre hånden på armstøtten. Uansett hvor du slipper håndtaket, vil stolryggen forbli fast og låst.

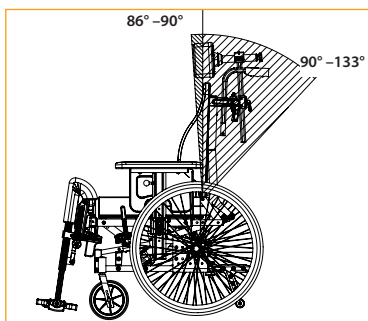

8. TRANSPORT

8.1 TRANSPORT I BIL

Om mulig, flytt brukeren til et bilsete og sikre med bilens sikkerhetsbelte ved bilkjøring. Sikre rullestolen eller lagre den i bilens bagasjerom.



Netti III XHD & XXHD er forsterkede varianter av Netti III HD.

Netti III HD er vellykket kollisjonstestet i fremoverpekende retning med både bekken og skulderbelter i henhold til kravene til ISO 7176-19:2008 og er godkjent for å brukes som sete i et kjøretøy, med maks. brukervekt 160 kg.

Stolen er testet med en kombinert rullestol- og brukerfestesystem W120/DISR fra Unwin Safety Systems. For ytterligere informasjon: BraunAbility Europe. <https://www.braunability.eu/wtors>

Netti III XHD og XXHD er godkjent for bruk som sete i en bil med maksimal brukervekt 160 kg.

Bruk alltid godkjent rullestol- og brukersikringssystem (ISO 10542:2012) for å feste rullestolen i kjøretøyet. Bruk 4-punkts stropptype fester for å sikre rullestolen i kjøretøyet

Vurderingen for rullestolens innfesting med forankrede beltefester i bilen er vurdert A = god.

DEMONTERE TILBEHØR

Før du bruker Netti III XHD & XXHD som sete i en bil, må du sørge for å fjerne og sikre alle ekstra deler og tilbehør (f.eks. Brett og abduksjonskloss) som kan falle av i tilfelle en ulykke.

Stolen har blitt kollisjonstestet uten hjelpemotor eller osv. Hvis hjelpemotor, trappeklatrer osv. er montert, må du sjekke om assistentenheten er kollisjonstestet og godkjent for rullestoler som brukes som sete i en bil. Dersom ikke, må dette tas av når rullestolen brukes som sete i en bil.

SIKRE RULLESTOLEN


 Løft stolen til oppreist seteposisjon med maks 10 graders lening og 10 graders tilbakelent stilling. Sving skyvebuen opp og fest bak hodestøtten.

For å feste rullestolen i kjøretøyet skal kun de forankrede siringspunktene brukes.



Stolen er markert med klistremerker som viser stolens sikringspunkter. Festeøyde dimensjon 25x60 mm.

Foran: Bruk krok- eller stoppefeste.

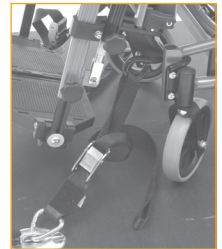

På baksiden:

Fest på en stropp eller en krok på bilens festeløkker på rammen. Vinkelen på stroppene skal være nær 45°




SIKRE BRUKEREN


 **Bruk alltid 3-punkts festebelter.**

 **Bruk både hofte- og skulderbelte for å redusere risikoen for hode- og brystpåvirkning med kjøretøykomponentene. Pass på at beltet ikke er vridd og at festespennen ikke kommer i kontakt med stolen ved en kollisjon.**

Forsikre deg om at bilens bekkenbelte ligger tett over eller foran bekkenet - vinkelen mellom bekkenbeltet og den horisontale mellom 30 - 75 grader, jo skråere jo bedre. Skulderbeltet skal alltid ligge nær kroppen til brukeren og ikke krysse armstøttene, hjulene etc. Se illustrasjon

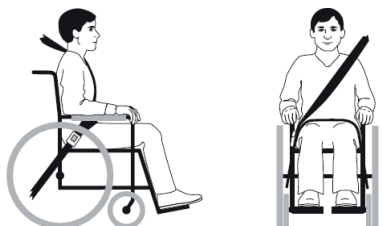

 **Skulderbeltet må ikke ligge i kryss over armstøttene, hjulene etc. Se illustrasjon**

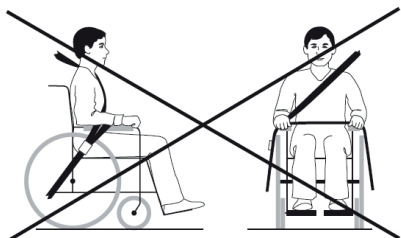

 **Korrigerende seler som brukes i rullestol er ikke sikkerhetsbelter.**

 **Dersom brukeren er 1,85 m eller lengre må ryggforlengersettet og en 500 mm vertikal stang for hodestøtten monteres når Netti III XHD og XXHD brukes som sete i en bil.**

 **Hvis en Netti-hodestøtte er montert riktig, er den svært stabil, men erstatter ikke behovet for en ekstern nakkestøtte montert i bilen.**

 **Bruk alltid Netti-puter når Netti III XHD og XXHD rullestol brukes som sete i en bil.**

 **Bruk aldri rullestolen som sete i en bil hvis den har vært involvert i en ulykke med slag før den har blitt inspisert og godkjent for dette av produsentens representant.**

 **Eventuelle endringer eller utskiftninger på rullestolens festepunkter eller på konstruksjons- og rammedeler må ikke utføres uten å konsultere rullestolprodusenten.**

 **Rullestolens vekt uten puter er mellom 35 og 45 kg, avhengig av rullestolens størrelse og konfigurasjon.**



Netti III XHD og XXHD med setebredde 500 mm og mer, overstiger maksimal bredde på 750 mm spesifisert i PRM-TSI og påvirker muligheten for togtransport. Det kan også skape problemer ved passering av dører og andre åpninger.



Vær oppmerksom på at større rullestoler har større svingradius og redusert manøvrerbarhet i kjøretøy. Mindre rullestoler gir generelt større brukervennlighet og manøvrerbarhet til en fremovervendt posisjon.

8.2 LEGGE SAMMEN FOR TRANSPORT

Når rullestolen er tom, bretter du den som beskrevet under. Legg rullestolen i bagasjerommet eller baksetet. Når stolen plasseres i baksetet, fest rammen med sikkerhetsbeltene.

- Fjern hodestøtten (kap. 6.15)
- Drei tippesikringene opp (kap. 6.10)
- Sving skyvehåndtakene inn (kap. 6.16)
- Fjern armstøtter (kap. 6.11)
- Fjern benstøttene (kap. 6.14)
- Fjern ryggputen (kap. 6.12)
- Trekk ut låsebolt for ryggfeste og fold ryggen frem i setet (kap. 6.7)
- Ta av drivhjulene (kap. 6.2)
- Ta av svinghjulene (kap. 6.4).

8.3 TRANSPORT I FLY

Netti III XHD og XXHD kan transporteres i fly uten noen begrensninger. Netti III XHD og XXHD rullestoler er utstyrt med 4 gassfjærer. Disse er imidlertid ikke klassifisert som farlig gods. I motsetning til generell farlig godsinstruksjon UN3164, regulerer IATA-DGR (spesiell forskrift A114) at gods som inneholder gass og er beregnet på å fungere som støtdempere (inkludert energiabsorberende enheter eller pneumatiske fjærer) IKKE er underlagt transportinstruksjonene, dvs. de er fritatt fra følgende krav:

- a) Hver artikkel har et gassvolum som ikke overstiger 1,6 l og et ladetrykk som ikke overstiger 250 bar, der produktet av kapasiteten uttrykt i liter og ladetrykk uttrykt i bar ikke overstiger 80.
- b) Hver artikkel har et minimum sprengtrykk på 4 ganger ladetrykket ved +20° Celsius for produkter som ikke overstiger 0,5 l gasskapasitet.
- c) Hver artikkel er laget av materiale som ikke vil splintre.
- d) Hver artikkel ble produsert i samsvar med kvalitetsstandard som er godkjent av ansvarlig nasjonal myndighet
- e) Det er bevist at artikkelen slipper ut trykket kontrollert via forsegling som løses ved brann og derfor ikke vil sprenges eller katapultere.

8.4 Å REISE MED OFFENTLIG TRANSPORT

Rullestolen skal plasseres i et spesielt område for rullestoler.

Rullestolen skal være vendt bakover. Ryggen av rullestolen skal lene mot en fast vegg, stolrygg el. lignende. Sørg for at brukeren kan holde seg i håndtak eller stang. Sørg for at brukeren enkelt kan nå alle rekkverk eller håndtak. Bruk belter og seler i stolen for å holde brukeren. Bruk sikkerhetsbelter hvis det er tilgjengelig for å feste brukeren i kjøretøyet.

9. MANØVRERING

9.1 GENERELLE TEKNIKKER

Vektfordelingen i rullestolen er avgjørende for kjøreegenskapene.

Vekt, størrelse og sittestilling til brukeren påvirker også dette. Hjulenes posisjon vil påvirke kjøreevnen. Jo mer vekt som legges over hovedhjulene, jo lettere er det å manøvrere. Hvis det legges tung vekt over forhjulene, vil stolen være tung å manøvrere.

 Netti III XHD og XXHD kan være utfordrende å manøvrere på grunn av størrelse og last. Vær svært forsiktig når du kjører på et underlag som ikke er horisontalt. Du kan miste kontrollen.

 Forsering av hinder og trinn: Nærm deg alltid trinnet i sakte fart, og unngå at fronthjulene treffer trinnet med kraft. Brukeren kan falle ut av stolen på grunn av støtet. Fronthjulene kan knekke.

 Kjøre fremover ned trinn / fortau: Vær forsiktig med at du ikke kjører ned trinn høyere enn 30 mm. Benstøttene kan treffe bakken først. Dermed kan du miste kontrollen og benstøttene kan knekke.

 Ledsager: Hvis brukeren blir sittende alene i rullestolen, må du alltid låse bremsene og sikre at veltesikringene er vendt ned.

 Parkering: Øk rullestolens standflate ved å bevege stolen ca. 100 mm bakover slik at fronthjulene svinger fremover.

 Vær ekstra forsiktig med å kjøre rullestolen på mykt, glatt eller grovt underlag. Hjulene kan miste grepet og det blir vanskelig å kontrollere rullestolen trygt.

 **NØDUTGANGER:** Netti III XHD med setebredde 500 mm og mer, har en total bredde på mer enn 700 mm og kan ha vanskeligheter med å komme seg ut gjennom nødutganger.

9.2 KJØRETEKNIKKER – STEG OPP –



Ledsagere, som kjører opp et trinn fremover:

- Kontroller at tippesikringen er vendt oppover.
- Vipp rullestolen bakover.
- Løft skyvehåndtakene mens du skyver stolen opp på trinnet.



Drei veltesikringen nedover.

Brukere, kjøre opp et trinn baklengs:

Denne teknikken er bare brukbar hvis trinnet er veldig lavt. Dette avhenger også av klaring mellom fotplatene og bakken.

- Kontroller at tippesikringen er vendt oppover.
- Kjør stolen baklengs mot trinnet.
- Ta godt tak i drivringen og beveg kroppen fremover mens du trekker.
- Trekk rullestolen opp trinnet og bakover langt nok til å få forhjulene opp på trinnet.



Drei veltesikringen nedover.

Ledsagere, kjøre opp et trinn baklengs:

- Kontroller at tippesikringen er vendt oppover.
- Trekk stolen bakover til trinnet.
- Vipp rullestolen bakover, og løft forhjulene litt opp i luften.
- Trekk rullestolen opp trinnet og bakover langt nok til å få forhjulene opp på trinnet.



Drei veltesikringen nedover.

9.3 KJØRETEKNIKKER – TRINN NED –

Ledsagere, kjøre ned et trinn forover:

- Kontroller at tippesikringen er vendt oppover.
- Vipp rullestolen bakover, og løft forhjulene litt opp i luften.
- Kjør forsiktig ned trinnet og vinkle rullestolen fremover, så forhjulene er på bakken.



Drei veltesikringen nedover.

Ledsagere, kjøre ned et trinn baklengs:

- Kontroller at tippesikringen er vendt oppover.
- Rygg rullestolen frem til kanten/terskelen.
- Kjør forsiktig ned trappetrinnet og beveg rullestolen bakover på hovedhjulene til forhjulene har kommet bort fra trinnet.
- Sett forhjulene ned på bakken.



Drei veltesikringen nedover.

9.4 KJØRETEKNIKKER - BAKKE -

Viktig råd for å unngå velt når du kjører opp og ned bakker. Vær veldig forsiktig og ta hensyn til den styrken som er nødvendig for å bremse og kontrollere en stor rullestol i en skråning.

-  Unngå å snu rullestolen midt i en skråning.
-  Kjør alltid så rett som mulig.
-  Det er bedre å be om hjelp enn å ta en sjanse.
-  Vær alltid ekstra forsiktig, på grunn av stolens størrelse og vekt, når du kjører opp og ned bakker og skråninger. Det kan bli for tungt å stoppe stolen.

Brukere som kjører oppoverbakke:

Len overkroppen fremover for å opprettholde stolens balanse.

Brukere som kjører nedover:

Len overkroppen bakover for å opprettholde stolens balanse.

Kontroller hastigheten på stolen ved å gripe drivringene.

Ledsager:

Ikke bruk parkeringsbremsene på dekkene. Bruk trommelbremsene.

Vær forsiktig og unngå bråstopp, brukeren kan falle ut av stolen.



9.5 KJØRETEKNIKKER - OPP TRAPPER -

-  Be alltid om hjelp.
 -  Bruk aldri rulletrapper, selv om du blir hjulpet av en ledsager.
- Med assistanse bakover:**
- Kontroller at tippesikringen er snudd oppover, og at skyvehåndtakene er ordentlig festet.
 - Trekk rullestolen bakover til trappens første trinn.
 - Vipp rullestolen bakover på hovedhjulene.
 - Trekk rullestolen sakte opp trappen, ett trinn om gangen og hold balansen på hovedhjulet.
 - Når du kommer til toppen av trappen, trekker du rullestolen bakover langt nok til å sette fronthjulene trygt ned på gulvet.

-  Hvis det er to ledsagere tilstede, kan en av dem hjelpe til med å løfte foran på rammen. Løftepunkter på rammen er merket med dette skiltet:



-  Ledsagerne bør bruke styrken i beina når de løfter stolen, og unngå unødvendig belastning på ryggen.
-  Ikke løft rullestolen ved å holde i benstøtter, armlener eller hodestøtte.
-  Drei veltesikringen nedover.

9.6 KJØRETEKNIKKER - NED TRAPPER -

 **Bruk aldri rulletrapper, selv om du blir hjulpet av en ledsager.**

Med assistanse, fremover:

- Kontroller at tippesikringen er snudd oppover og at skyvehåndtakene er ordentlig festet.
- Kjør rullestolen frem til trappens første trinn.
- Vipp rullestolen bakover på hovedhjulene.
- Ta godt tak i skyvehåndtakene, og hold balansen på hovedhjulet og ta ett trinn om gangen.
- Når du kommer til bunnen av trappen, setter du forhjulene trygt ned på gulvet.



Hvis det er to ledsagere tilstede, kan en av dem hjelpe til med å løfte foran på rammen. Løftepunkter på rammen er merket med dette skiltet:



Ikke løft rullestolen ved å holde i benstøtter, armlener eller hodestøtte.



Drei veltesikringen nedover.

9.7 FORFLYTNING

Teknikker for forflytning til / fra rullestolen bør øves grundig med de involverte personene. Her gir vi noen viktige råd for klargjøring av stolen:



Med eller uten ledsager - sidelengs.

Før forflytning:

- Rullestolen skal plasseres så nær målet for overføringen som mulig.
- Trekk rullestolen 50–100 mm bakover for så de forhjulene til å svinger fremover.
- Lås bremsene.
- Fjern fotstøtten og armstøtten på den siden forflytningen skal skje.

Med eller uten ledsager - fremover.

Før forflytning:

- Rullestolen skal plasseres så nær målet for overføringen som mulig.
- Trekk rullestolen 50–100 mm bakover for så de forhjulene til å svinger fremover.
- Lås bremsene.
- Vipp stolen fremover.

BRUKE HEIS:**Før forflytning til stol:**

- Vipp stolens sitteenhet litt.
- Fjern hodestøtten.
- Fjern benstøttene.
- Åpne ryggvinkelen litt for å gi plass til beltet bak brukerens rygg.
- Sett komponentene tilbake når forflytningen er ferdig.



 Stå aldri på fotplatene på grunn av risikoen for å velte stolen fremover.

9.8 BALANSEPUNKT

Juster balansepunktet ved å endre hovedhjulets posisjon i hovedhjulbraketten.

- Flytt hovedhjulnavet og hovedhjulet (kap. 6.6).
- Juster bremsene. (kap. 6.17).



2 stk 24 mm fastnøkkel.



5 mm unbrakonøkkel.

Når hovedhjulene flyttes fremover, vil det være lettere å manøvrere rullestolen, men risikoen for å velte bakover øker.



Balansepunktet kan også endres ved å justere setedybden, setevinkelen og / eller vinkelen på ryggstøtten.



Bruk alltid veltesikringen.



Kontroller at hovedhjulet og hurtigutløseren er ordentlig låst (kap. 6.2).

9.9 LØFTING AV RULLESTOL

- Rullestolen bør løftes ved hjelp av 2 personer som kun holder i rammen og skyvebøylen. Det er merket med symbolet nedenfor der det skal løftes.



Ikke løft rullestolen i ben, arm eller hodestøttene. De kan løsne og rullestolen kan falle og bli skadet.



Løft aldri rullestolen med en bruker i den.

10. VEDLIKEHOLD

10.1 VEDLIKEHOLD SINSTRUKSER

- i** Du som bruker av rullestolen (og dine ledsagere og familien) er ansvarlig for det daglige vedlikeholdet av den. Rengjør den regelmessig og utfør vedlikehold for å sikre sikker og langvarig pålitelig funksjon og hygiene.

Frekvens	Ukent- lig	Måned- lig
Kontroller for mangler / skader, f.eks. brudd / manglende deler	X	
Vask av rullestol		X
Vask av puter		X
Kontroller tippesikringene		X
Sjekk bremsejustering		X
Kontroller dekkslitasje		X
Smør lager med sykkelolje		X
Smør vertikale benstøtteprofiler med hvit vaselin	X	

10.2 RENGJØRINGSINSTRUKSJON

1. Fjern puter før du vasker rullestolen.
2. Rengjør rammen med vann og klut.
3. Vi anbefaler å bruke grønnsåpe.
4. Skyll rullestolen godt med rent vann for å fjerne all såpe.
5. Bruk rødsprit for å fjerne eventuelle rester.
6. Rengjør puter og trekk i henhold til instruksjonene som er trykt på putene.

RENGJØRINGSPROSEDYRER FOR NETTI PUTE

KJERNE	
Vask	Håndvask 40 °C
Desinfeksjon	Virkon S
	Autoklave 105 °C
Tørrking	Krystes
	Lufttørkes stående
YTTER TREKK	
Vask	Maskinvask 60 °C
Tørrking	Tørketrommel maks. 85 °C

DESINFISERING AV RULLESTOLEN

Fjern puter.
Se separate vaskeinstrukser over:
Desinfeksjon: Bruk en myk klut fuktet med hydrogenperoksid eller teknisk alkohol (isopropanol) og tørk over hele stolen.
Hydrogenperoksid som anbefales:
NU-CIDEX "Johnsen og Johnsen".

- i** Kontroller / juster på nytt, justeringen av skruer og muttere med jevne mellomrom.

- i** Sand og sjøvann (salt som brukes til strøing om vinteren) kan skade lagrene på forhjulene og hovedhjulene. Rengjør rullestolen grundig når den har vært eksponert for det.

* Som en tommelfingerregel, bruk olje på bevegelige deler og alle lagre. Alu Rehab anbefaler bruk av vanlig sykkelolje.

10.3 LANGTIDSLAGRING

Hvis rullestolen oppbevares i lengre tid - (lenger enn 4 måneder) er det ikke behov for spesielle tiltak. Vi anbefaler at stolen rengjøres før oppbevaring. Fullfør vedlikeholdsinstruks ovenfor før den tas i bruk igjen.

RESERVEDELER

Netti-stolene er bygget opp av moduler. Alu Rehab lagerfører alle deler og er klar til å levere disse på kort varsel. Nødvendige monterings instruks vil følge delene.

Deler som skal håndteres av brukeren er definert i reservedelskataloger som kan lastes ned på **www.My-Netti.no**.

Disse delene kan om nødvendig også fjernes og sendes til produsent / distributør på forespørsel.



Deler relatert til rullestolens rammekonstruksjon må håndteres av produsent eller autorisert serviceverksted.



Kontakt forhandleren hvis det oppstår feil eller skader.



Originalmaling for reparasjon av riper, kan bestilles fra Alu Rehab.

11. FEILSØKING

Symptom	Årsak / handling	Referanse i håndboken
Rullestolen drar skjevt	- Lagerhusets vinkel er kanskje ikke 90 °. - Kontroller at forhjulene er montert i samme høyde. - Hovedhjulnavene kan være montert feil. - En av bremsene kan være for stram. - Brukeren sitter skjevt i stolen. - Brukeren kan være sterkere på den ene siden enn den andre.	6.4 6.3 6.6 6.17
Rullestolen er tung å manøvrere	- Hovedhjulnavene kan være montert feil. - Rengjør fronthjulene og gafflene for smuss. - For mye vekt over de fremre hjulene (Juster balansepunktet ved å flytte hovedhjulene bakover).	6.6
Rullestolen er tung å snu	- Kontroller at for gaffelen ikke er festet for stramt. - Juster vinkelen på lagerhuset. - For mye vekt på forhjulene, justerer balansepunktet.	6.4 6.5
Forhjulene vakler/vingler	- Forhjulene er ikke ordentlig festet. - Kontroller at frontgafflene er montert i samme høyde. - Lagerhusets vinkel er kanskje ikke 90 °. - For mye vekt på forhjulene, justerer balansepunktet.	6.4 6.4 6.3 6.5
Hovedhjulene er vanskelige å ta av og på	- Rengjør og smør hurtigutløseren. - Juster lengden på navakslingen.	6.6
Bremsene tar dårlig	- Kontroller hjulene og avstanden til bremsene. - Juster bremsen.	6.17
Rullestolen slarker	Sjekk skruer og justeringspunkter generelt.	



Ta kontakt med forhandleren din for informasjon om autoriserte servicefasiliteter som kan gi støtte hvis løsningen ikke finnes i dette skjemaet.



Ta kontakt med forhandleren hvis du trenger reservedeler.



Når du gjør endringer som påvirker rammekonstruksjonen, kontakt forhandleren / produsenten for bekreftelse.

12. TESTER OG GARANTI

12.1 TESTER

Netti III XHD og Netti III XXHD er testet og er godkjent for bruk både innendørs og utendørs. Stolene er CE-merket.

MAKSIMAL BRUKERVEKT:
200 kg for Netti III XHD & XXHD

Stolene er testet av
TÜV SÜD Product Service GmbH i
henhold til EN 12183:2014.



Netti sittesystem er testet for brannmotstand i
henhold til: EN 1021-2:2014.

Netti III HD er kollisjonstestet og
Netti XHD & XXHD er forsterkede
varianter av Netti III HD
som er godkjent for bruk som sete
i en bil. Maks brukervekt er 160 kg.



12.2 GARANTI

Alu Rehab gir deg 5 års garanti på alle ramme deler. Det er 2 års garanti på alle andre CE-merkede komponenter unntatt batterier. For batterier gis 6 måneders garanti.



Alu Rehab er ikke ansvarlig for skader som følge av upassende eller uprofesjonell installasjon og / eller reparasjoner, forsømmelse, slitasje fra endringer i rullestolmoduler eller instruksjoner som ikke er godkjent av Alu Rehab eller ved bruk av reservedeler levert eller produsert av tredjepart. I slike tilfeller skal denne garantien anses som ugyldig.



Denne garantien er bare gyldig når brukeren bruker, vedlikeholder og håndterer rullestolen som beskrevet i brukerhåndboken.

12.3 REKLAMASJON

Dersom produktet viser seg å ha en produksjonsfeil som dukker opp i løpet av garanti-tiden, kan du sende inn en reklamasjon.

- Reklamasjonen skal fremsettes overfor den som har solgt rullestolen så raskt som mulig og ikke senere enn 2 uker etter at feilen først ble oppdaget.
- Krav skal rettes til selger av rullestolen. Det er viktig at kjøpsbevis blir nøyaktig utfyllt slik at tid og sted for kjøpet kan

dokumenteres. Fyll inn serienummer og evt NeC-nummer.

- Alu Rehab og selger skal vurdere om manglen gir grunnlag for reklamasjon. Du får melding om vurderingen så raskt som mulig.
- Dersom reklamasjonen blir godkjent, vil Alu Rehab og selger avgjøre om feilen skal repareres, eller om produktet skal erstattes eller om kjøper har rett på en prisreduksjon.
- Dersom reklamasjonen ikke blir godkjent (etter grundig vurdering av fagfolk) fordi feilen er oppstått som resultat av feil bruk, og / eller mangel på vedlikehold, avghør bruker selv om det ønskes reparasjon (hvis mulig) for brukers regning eller kjøp av nytt.



Normal slitasje, feil bruk eller feil håndtering er ikke grunn til krav.

12.4 NETTI CUSTOMIZED / SPESIALTILPASNINGER

Netti spesialtilpasninger er definert som alle justeringer som ikke er inkludert i denne håndboken. Individuelle tilpasninger utført av Alu Rehab er merket med et unikt NeC-nummer for identifikasjon.

Rullestoler som er spesialtilpasset av kunden kan ikke beholde CE-merket gitt av Alu Rehab AS Norge. Hvis justeringene utføres av andre enn Alu Rehabs godkjente forhandlere, vil ikke garantien gitt av Alu Rehab AS Norge være gyldig.

Ved usikkerhet/spørsmål vedrørende spesialtilpasning, vennligst kontakt Alu Rehab AS.



Desersom du har andre behov enn det våre standardløsninger kan dekke, vennligst ta kontakt med vår kundeservice for eventuelle spesialtilpasninger / Netti Customized løsninger.

12.5 PRODUKTKOMBINASJONER

Kombinasjoner av Netti og andre produkter som ikke er produsert av Alu Rehab AS: Generelt vil ikke CE-merket for noen av de involverte produktene være gyldig i disse tilfellene. Men, Alu Rehab A.S har inngått kombinasjonsavtaler med noen produsenter for noen kombinasjoner. Ved disse kombinasjonene er CE-merket og garantiene gyldige.



For mer informasjon, kontakt din forhandler eller Alu Rehab AS Norge direkte.

PRODUKTANSVAR

Netti III XHD og Netti III XXHD med forskjellige konfigurasjoner av Netti-utstyr er testet / risikovurdert av Alu Rehab.

Eventuelle endringer eller utskiftninger på rullestolens festepunkter eller på konstruksjons- og rammedeler må ikke utføres uten å konsultere rullestolprodusenten Alu Rehab. Erstatning eller endring av komponenter fra tredjepartsleverandører til Netti III XHD & XXHD krever risikovurdering og aksept av produktansvar og sikkerhet for bruk av rullestolen fra produsenten som utfører utskiftningen eller endringen.

12.6 SERVICE OG REPARASJON

For informasjon om service- og reparasjonstjenester i ditt område, kontakt din lokale forhandler.



Et unikt identifikasjonsnummer / serienummer finnes på tverrstangen på hjulrammen på venstre side av stolen.



En reservedelskatalog for rullestolen kan fås via din lokale forhandler eller lastes ned på www.My-Netti.no



En Gjenbruksmanual for rullestolen kan fås via din lokale forhandler eller lastes ned på www.My-Netti.no



Informasjon om produktsikkerhetsmerknader og tilbakekallinger av produkter er tilgjengelig på www.My-Netti.no



En resirkuleringsmanual for rullestolen kan fås via din lokale forhandler eller lastes ned på www.My-Netti.no

13. MÅL OG VEKT

Størrelse* setebredde	Setedybde Standard **	Rygg høyde *** (forlenger)	Total bredde	Vekt
Netti III XHD				
500 mm	400–500 mm	500 (600) mm	740 mm	34,5 kg
550 mm	400–500 mm	500 (600) mm	790 mm	36,5 kg
600 mm	400–500 mm	500 (600) mm	840 mm	38,5 kg
Netti III XXHD				
650 mm	400–500 mm	500 (600) mm	890 mm	40,5 kg
700 mm	400–500 mm	500 (600) mm	940 mm	42,5 kg
750 mm	400–500 mm	500 (600) mm	990 mm	44,5 kg

* Målt mellom ytterkantene på rammerørene. For avstand mellom, legg til 25 mm.

** Målt fra seteplatens front til hengslet på ryggstøtten uten pute.

Ved bruk av standard Uno ryggpute trekker du fra omtrent 30 mm.

*** Målt fra seteplate til toppen av ryggputen.

 **Vekten inkluderer drivhjul, svinghjul, benstøtter og armlen.**
Ingen pute.

 **Anbefalt dekktrykk på luftfylte dekk er: 60 – 65 PSI.**

 **Maks brukervekt er 200 kg.** Ved bruk som sete i en bil er maks brukervekt 160 kg.

 **Ved montering av tilbehør som hjelpemotor etc, må vekten av tilbehøret trekkes fra maks brukervekt.**

Forhandler:	
Rammenummer.:	
Dato:	
Stemple:	



Produsent:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norge

✉ post@My-Netti.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.no

Distributør

📍 Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Danmark

✉ info@my-netti.com
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
my-netti.dk

Distributør

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal
Tyskland

info@my-netti.com
T: +49 5733 922 311
F: +49 5733 922 9311
my-netti.de

Distributør

MDH Sp. zo.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Polen

biuro@mdh.pl
T: +48 42 674 83 84
my-netti.com
